



BRUKSANVISNING

Flamskyddade textilier TCS



Järven Health Care

Tack till ditt val av produkt från Järven Health Care. Vårt mål är att du ska bli nöjd med produkten både vad gäller funktion och livslängd. Vi ber dig därför att ägna några minuter till att läsa igenom denna bruksanvisning för att säkerställa bäst hantering av din produkt.

Har du några frågor som inte berörs i denna bruksanvisning ber vi dig att ta kontakt med oss på Järven Health Care. Du hittar våra kontaktuppgifter på baksidan av denna bruksanvisning.

Varnings- och informationsrutor



Varningsruta som informerar om en viktig säkerhetsaspekt eller fara.
Om du inte förstår eller följer informationen kan du skada dig själv eller andra!

Informationsruta med anvisningar som, om de inte följs, kan skada och/eller försämra produkten.

CE-märkning

Järven Health Cares madrasser och överdrag är CE-märkta enligt den medicintekniska förordningen MDR (EU) 2017/745 klass 1. CE-märkningen innebär att Järven Health Care har tillverkarens ansvar för att säkerställa att denna produkt uppfyller de väsentliga kraven i relevant europeisk lagstiftning. Detta inkluderar tillhandahållande av teknisk dokumentation och försäkran som upprätthålls i minst tio år efter att produkten har släppts ut på marknaden.

Försäkran om överensstämmelse med väsentliga krav har lämnats in till Läkemedelsverket i Sverige.

Vårt kvalitetsarbete

Våra kvalitetsstandarder och mål för kundfokus förverkligas genom att vi svarar upp mot våra kunders behov och förväntningar. Vi tror på att bygga långsiktiga relationer genom samarbete och förtroende.

Ständiga förbättringar av våra produkter och tjänster är grunden för vår förmåga att tillfredsställa både nuvarande och framtida kunder. I vårt arbetssätt ingår att utveckla utvärderingsmetoder och standarder som ger kunden en garanterad kvalitet när det gäller komfort, funktion, hållbarhet och pris.

Genom vårt team av kompetenta och engagerade medarbetare fokuserar vi på att stödja utbildning, utveckling och innovation inom vården. Våra mål är att underlätta vård av hög kvalitet för att förebygga trycksår, minska vårdrelaterade infektioner och förbättra brandsäkerheten i vårdmiljöer.

Om du behöver ytterligare information eller hjälp är du välkommen att kontakta oss.

Telefon: +46 660-22 28 50
E-post: healthcare@jarven.se
Webb: www.jarven.se

Järven Health Care
Bromsvägen 3
SE-891 60 Örnsköldsvik, SWEDEN

Innehållsförteckning

Säkerhetsföreskrifter	4
Brandskydd.....	4
Produktinformation	5
Avsedd användning	5
Kontraindikationer.....	5
Handhavande	6
Mottagande och uppackning.....	6
Rengöring och skötsel.....	6
Förvaring	7
Förväntad livslängd.....	7
Övrigt	8
Produktansvar	8
Returer och reklamationer.....	8
Transportskador	8
Återvinning och miljö.....	8
Symbolförklaring	10
Märkning	11
Etiketter	11

Säkerhetsföreskrifter

Läs följande information innan du använder din Specialmadrass Brand och Specialkudde Brand!

- Järven Health Care madrasser och kuddar ska bara användas i enlighet med beskrivningen i denna bruksanvisning.
- Produkten skall optiskt bedömas innan och efter varje användning.
- Järven Health Care madrasser/kuddar ska inte kombineras, monteras eller repareras med andra delar, tillbehör eller reservdelar än de som beskrivs i denna bruksanvisning eller annan dokumentation från Järven Health Care.
- Madrassen/kudden ska användas så att den inte blir klämd eller skadad.
- Undvik att använda vassa föremål i närheten av madrasserna/kuddarna.
- Alla våra madrasser är brandtestade. Det är kundens ansvar att göra en risk bedömning utifrån risken för anlagd brand eller andra brandrisker och därefter välja rätt madrass. Kontakta oss gärna vid frågor.
- Försäkra er om att ni beställer rätt madrass till rätt ändamål.
- Vid allvarliga tillbud som inträffar i samband med produkten ska detta omgående rapporteras till Järven Health Care och behörig myndighet.

Brandskydd

Produkterna uppfyller alla av oss kända brandnormer i världen. Madrasskärnan och kud- dens kärna (37 kg/m³) är tillverkad av CMHR-polyeter som uppfyller brandstandard SS 876 00 10:2016.

Överdraget motstår öppen gaslåga och glödande partiklar (900°).

Uppfyllda brandstandarder:

- SS 876 00 10 testmetod NT-Fire 055
- BS 6807:2006 Crib 7
- FAR 25.853

Produktinformation

Flamskyddade sängtextilier (sängkläder) som är behandlade eller tillverkade för att inte lätt ta eld, är avsedda för krävande och brandfarliga miljöer. Produkterna är tillver- kade av ett permanent flamskyddat och miljövänligt fiber och yttertyget är av 100% Trevira CS.

Flamskyddet i produkterna är beständiga och går inte att tvätta bort.

Bruksanvisningen gäller för följande produkter:

- Kudde TCS art.nr: 14-130000-008
- Örngott TCS art.nr: 14-100200-003
- Täcke TCS art.nr: 14-120000-003
- Påslakan TCS art.nr: 14-100000-003
- Filt TCS art.nr: 14-100400-001
- Bäddmadrass TCS art.nr: 14-110000-003 (80×205cm) & 14-110000-004 (90×205cm)
- Lakan TCS art.nr: 14-100100-003

Avsedd användning

Används som ett komplement i säng, för ökad komfort. Produkterna är avsedda för plat- ser som ordinärt boende, polisarrestorer, fängelser, avvänjningskliniker eller liknande, där säkerhetskraven är extra höga.

Kontraindikationer

- Använd inte produkten om användaren har en känd allergi eller överkänslighet mot något av dess innehållsämnen.
- Produkten ska inte användas på skadad hud, öppna sår eller brännskador.

Handhavande

Mottagande och uppackning

Börja med att kontrollera att produkten inte är skadad. Vid eventuell transportskada, se sid 8. Ta bort förpackningen samt eventuellt skyddsmaterial. **Användning av kniv eller andra vassa föremål, bör undvikas vid hantering av förpackningen och produkten.** Produkten kan användas direkt efter uppackning.

Rengöring och skötsel

De flamskyddade textilierna ska ej medvetet utsättas för öppen låga, då detta skadar produkten genom att materialet smälter.

Upprätta en inspektionsplan för revision av produkten. Kontrollera regelbundet madrassen/kudden för synliga tecken på skador eller slitage, exempelvis revor, sprickor, hål, fläckar eller färgning/missfärgning.

Produkterna rengörs genom vanlig maskintvätt 70°.

Trevira CS-fibern är känslig för värme. Detta innebär att täcken och kuddar har en krymp mån på 2-3% medan övriga textilier krymper ungefär 1-1,5 % vid tvätt i 70°C. Vid högre tvätttemperaturer blir det något högre krympmån. Vid ett ordinarie boende kan man tvätta i 60°C.



Om produkten är förorenad ska den omedelbart kasseras.



Använd ej sköljmedel.
OBS! Gäller enbart kuddar & täcken.



Kan strykas med svalt strykjärn.



Tål torktumling i låga temperaturer.



Kan kemtvättas.

Förvaring

Förvara produkterna i torra, rumstempererade lokaler. Undvik direkt solljus.

Förväntad livslängd

Följ alltid våra skötselråd för produkterna för längsta möjliga livslängd med bibehållen funktion.

Övrigt

Produktansvar

Med produktansvar avses tillverkarens, importörens eller försäljarens lagstadgade skadeståndsansvar för eventuella skador som produkten orsakat. Produktansvarslagen fastställer tillverkarens, importörens eller försäljarens lagstadgade skadeståndsansvar för eventuella skador som produkten orsakat. Reglerna gäller för fysiska produkter i form av lösa föremål men även för produkter som kopplas ihop med andra lösa föremål eller fast egendom. Finns det ingen produkt som orsakat någon form av egendoms- eller personskada är lagstiftningen kring produktansvar inte relevant.

Returer och reklamationer

Reklamationer skall skriftligen anmälas till Järven Health Care. Retur av produkt skall efter godkänt reklamerationsärende ske enligt våra instruktioner. Returneras produkt innan reklamerationsärendet är godkänt räknas ärendet som avslutat och ersättning till kund betalas inte ut.

Transportskador

Eventuella transportskador skall noteras på fraktsedeln innan påskrift för att vara giltig. Ta därefter kontakta med Järven Health Cares (*se sidan 2 eller bruksanvisningens baksida för kontaktuppgifter*).

För snabbare behandling av ditt ärende ber vi dig fotografera transportskadan så utförligt som möjligt innan ni kontaktar kundtjänst.

För snabbare behandling av ditt ärende ber vi dig fotografera transportskadan så utförligt som möjligt innan ni kontaktar kundtjänst.

Återvinning och miljö

Textilkomponenter: Sorteras som textilavfall. Lämna dem i den kommunala textilinsamlingen eller på återvinningsstationer för textilåtervinning.

Brännbart material: Om produkten innehåller skum eller andra brännbara material, vänligen sortera dessa som brännbart avfall. Detta ska lämnas i den vanliga avfallsinsamlingen för förbränning eller energiutvinning.

För produkter med smittförande material

För produkter som har varit i kontakt med smittsamma ämnen, vänligen följ specifika riktlinjer för farligt avfall. Ta kontakt med din lokala avfallshantering för korrekt kassering.

OBS! Kassering och återvinning av begagnade produkter och förpackningar måste följa de lagar och föreskrifter som gäller för avfallshantering i respektive land.



Använd handskar och alkoholbaserat rengöringsmedel för att först desinficera madrassen innan återvinning eller deponering, detta för att undvika att spridning av infektioner bland de personer som utför arbetet.

Järven Health Care jobbar kontinuerligt med att utveckla sitt miljöarbete.

Vi eftersträvar att alltid använda material och produkter med minsta möjliga miljöavtryck.

Järven Health Care är ansluten till Näringslivet Producentansvar, www.npa.se, och uppfyller därigenom sitt producentansvar.

För mer information om vårt miljöarbete kontakta Järven Health Care.



Symbolförklaring



Anger artikelnummer



Anger serienummer



Anger batchnummer



Produkten är en medicinteknisk produkt



Anger tillverkningsdatum



Anger tillverkare




Denna produkt är CE-märkt i enlighet med MDR 2017/745 (Klass 1)




Denna produkt är testad och godkänd enligt SS8760001, testmetod EN597-1




Denna produkt är testad och godkänd enligt SS8760001, testmetod EN597-2

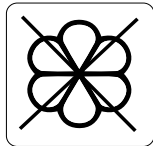


Ej sköljmedel

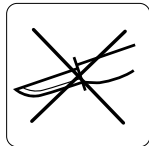

Ej vassa föremål

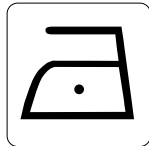

Svalt strykjärn

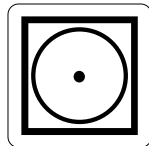

Torktumling i låg temperatur



Tål kemtvätt

Märkning

Etiketter

Nedan följer exempel på produkternas märkning. Etiketternas utseende kan variera.

Järven Health Care
Bäddmadrass
 Art. nr: 32986
 Storlek: 90x205 cm
 Fiberkvalitet: TCS
 Uppfyller: SS 8760001
 Tillverk.år: 2018

CE



Järven Health Care
Påslakan TCS
 Art. nr: 32966-T-255x158
 Storlek: 255x158 cm
 Fiberkvalitet: TCS
 Uppfyller: SS 8760001
 Tillverk.år: 2018

CE



Järven Health Care
Örngott TCS
 Art. nr: 32961-50x60
 Storlek: 50x60 cm
 Fiberkvalitet: TCS
 Uppfyller: SS 8760001
 Tillverk.år: 2018

CE



Järven Health Care
Kudde TCS
 Art. nr: 32945
 Storlek: 50x60 cm
 Fiberkvalitet: TCS
 Uppfyller: SS 8760001
 Tillverk.år: 2018

CE





Bruksanvisning Flamskyddade textilier. Alla varumärken tillhör respektive ägare.

Järven AB förbehåller sig rätten att uppdatera denna bruksanvisning vid behov och/eller påträffande av eventuella stav- eller faktafel.

Ytterligare exemplar kan beställas från Järven Health Care.
Kopiering för internt bruk är tillåten.

 **Järven Health Care**



Bromsvägen 3
SE-891 60 Örnsköldsvik
SWEDEN

Tel: +46 660-22 28 50
Fax: +46 660-824 10
Email: healthcare@jarven.se

www.jarven.se