



BRUKSANVISNING

LENTEX

Hygienmadrasser

AirO
Soft Euroflex
Magma
Exclusive
Waterlily

Comfort
Hygro Pure
Soft Comfort
Flex bäddmadrass
Barn och Junior



Järven Health Care

Tack till ditt val av LENTEX hygienmadrass. Vårt mål är att du ska bli nöjd med madrassen både vad gäller funktion och livslängd. Vi ber dig därför att ägna några minuter till att läsa igenom bruksanvisningen för att på bästa sätt hantera din madrass.

Har du några frågor som inte berörs i denna bruksanvisning ber vi dig att ta kontakt med oss på Järven Health Care. Du hittar våra kontaktuppgifter på baksidan av denna bruksanvisning.

Varnings- och informationsrutor



Varningsruta som informerar om en viktig säkerhetsaspekt eller fara. Om du inte förstår eller följer informationen kan du skada dig själv eller andra!

Informationsruta med anvisningar som, om de inte följs, kan skada produkten och/eller försämra systemets funktion och prestanda.

CE-Märkning

Järvens Health Cares madrasser och överdrag är CE-märkta enligt MDR 2017/745. Märkningen innebär att Järven Health Care har tillverkaransvaret och försäkrar att produkten uppfyller de väsentliga kraven samt att det finns teknisk dokumentation samt försäkran som ska bevaras i minst tio år.



Kvalitetsarbete

Vårt kvalitetsarbete och kundfokus förverkligas genom att vara lyhörd för kunders behov och förväntningar samt att i alla avseenden verka för ett samarbete som bygger på långsiktighet och förtroende.

Ständiga förbättringar av våra produkter och tjänster är grunden till vår förmåga att tillfredsställa våra nuvarande och framtida kunder. I vårt grundläggande kvalitetsarbete ingår också att finna utvärderingsmetoder och standarder som erbjuder kunden en säkerställd kvalitet gällande komfort, funktion, hållbarhet och pris.

Järven Health Care fokuserar särskilt på att, genom kompetenta och engagerade medarbetare, kontinuerligt fortbilda och kompetensutveckla vår personal. Vår förhoppning är att det ska leda till en högkvalitativ vård med inriktning på att förebygga trycksår och vårdrelaterade infektioner samt minska antalet brandtillbud inom vården.

Säkerhetsföreskrifter

Läs följande information innan ni använder er hygienmadrass!

- **Produkten ska bara användas i enlighet med denna bruksanvisning.**
- Produkten skall optiskt bedömas innan och efter varje användning. *Läs mer om skötsel av din LENTEX-madrass på sidan 13.*
- Produkten ska inte kombineras, monteras eller repareras med andra delar, tillbehör eller reservdelar än de som beskrivs i denna bruksanvisning eller annan dokumentation från Järven Health Care.
- Säkerställ att madrassen inte blir klämd eller skadad vid förvaring.
- Undvik vassa föremål i närheten av hygienmadrasserna så att inte ytskiktet skadas.
- Alla våra LENTEX-madrasser är brandtestade. Det är kundens ansvar att göra en bedömning utifrån faran för anlagd brand eller andra brandrisker och därefter använda rätt produkt. Kontakta oss gärna vid frågor.
- För att undvika skador får produkterna inte komma i kontakt med varma källor eller eld, till exempel glödande cigaretter, varma lampor eller liknande.
- Madrasskärnan är försedd med ett vätsketätt ytskikt av polyuretan. Undvik att använda andra plastskydd i kombination med madrassen.
- Försäkra er om att ni använder rätt madrassstorlek till avsedd säng samt rätt modell till aktuell patient.
- Positionera patienten så att andningsvägarna hålls fria.
- Vid eventuella olyckor och tillbud som har inträffat i samband med våra produkter är vi tacksamma om ni kontaktar oss så snabbt som möjligt.

Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter är tillverkaren skyldig att rapportera olyckor och tillbud som kan kopplas tillverkarens produkt. **Därför skall eventuella tillbud eller olyckor som kopplas till våra produkter omgående rapporteras till oss.**

Innehållsförteckning

Inledning	2
Säkerhetsföreskrifter	3
Innehållsförteckning	4
Produktinformation	6
Ytskiktet LENTEX	6
Brandskydd	6
Trycksårsförebyggande arbete	7
Obligatoriska omvårdnadsåtgärder (Vårdhandboken)	7
Lägesändringar för tryckavlastning	7
Avsedd användning	8
XP, LENTEX med evakueringsöverdrag	9
Kontraindikationer	9
Guide, LENTEX-madrasser	10
Handhavande	11

Mottagande och uppackning	11
Inspektion av din hygienmadrass	11
Skötsel och underhåll	11
Sonosteam	12
Förvaring	12
Förväntad livslängd	12
Skötsel av din LENTEX-madrass	13
Rengöring av madrassens yta (laminat)	13
Reparation av skadat ytskikt	13
Skötsel av madrassens skum	14
Madrassrevision för patientens skull	14
Madrassrevision för personalens skull	14
Madrassrevision för ekonomins skull	14
Evakuering med RXI	15
Övrig information	16
Produktansvar	16
Returer och reklamationer	16
Transportskador	16
Återvinning	16
Tillbehör	17
Symbolförklaring	19



.....
· **Saknar du någon information eller tycker att något är oklart?**
· **Vi är här för att hjälpa dig!**


Järven Health Care
Bromsvägen 3
SE-891 60 Örnsköldsvik, SWEDEN

Tel: +46 660-22 28 50
Email: healthcare@jarven.se
Web: www.jarven.se
.....

Produktinformation

LENTEX-sortimentet är en serie hygienmadrasser som placeras direkt på sängbotten och bäddmadrasser som placeras på en befintlig vårdmadrass. Madrasserna är utvecklade för att erbjuda en bra hygienlösning och samtidigt vara ett hjälpmedel i ett förebyggande och behandlande vårdarbete. Madrasserna passar alla vårdmiljöer och har olika nivåer av tryckavlastning.

Samtliga LENTEX-madrasser har tryckavlastande skum som lamineras med det unika laminatet LENTEX. Madrasserna har designats för att fördela trycket över hela kroppsytan genom Omslutning och Nedsänkning, de två viktigaste biomekaniska egenskaperna för att minska risken för trycksår^[1].

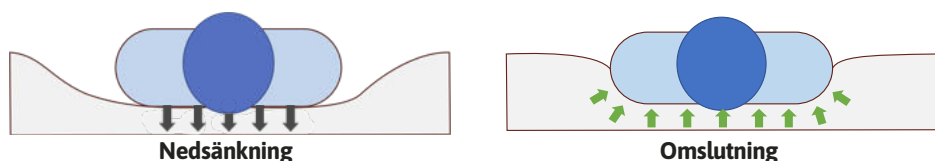

Ytskiktet LENTEX

LENTEX är ett flexibelt laminat som genom sin uppbyggnad bidrar till madrassernas tryckavlastande egenskaper. Laminatet omsluter hela madrassen och har inga perforerande sömmar eller dragkedjor. Vår Active Membrane teknologi medger att madrassen andas utan att försämra hygien.

LENTEX ljusa färg underlättar upptäckt av föroreningar på madrassens yta. Vid kontaminering rengörs och desinficeras madrassen med ett, för ändamålet avsett, rengöringsmedel. Madrasser med LENTEX finns som vårdmadrass, förebyggande anti-decubitus och för miljöer med hög risk för brand.

Hygienmadrasser med LENTEX kombineras med fördel med RXI evakueringsöverdrag alternativt Järven Räddningslakan för snabb evakuering vid brand(risk) i lokalerna.

Brandskydd

Alla LENTEX hygienmadrasser är testade och godkända enligt SS 876 00 01, EN 597-1 och EN597-2.

Magma hygienmadrass uppfyller även kraven för högre antändlighetsmotstånd enligt **standarderna SS 876 00 10:2016 testmetod NT-Fire samt BS 7177:2008 Medium Hazard.**

Det gör Magma hygienmadrass är särskilt lämpad för vårdinrättningar där det föreligger en förhöjd risk för brand t. ex. psykiatriska avdelningar och slutna vårdinrättningar.

Trycksårsförebyggande arbete

Obligatoriska omvårdnadsåtgärder (Vårdhandboken)

Vårdhandboken anger följande obligatoriska omvårdnadsåtgärder för att minska risk för trycksår i samband med vård:

- Genomför en visuell hudbedömning.
- Genomför en strukturerad riskbedömning vilket innefattar en klinisk bedömning tillsammans med ett riskbedömningsinstrument.
- Minska tryck, skjuv och friktion, exempelvis genom lägesändring och tryckavlastning.
- Håll huden torr, mjuk och smidig genom förebyggande hudvård.
- Tillgodose och följ upp närings- och vätskebehov.
- Involvera patient och/eller närstående i trycksårspreventionen.
- Kommunicera riskfaktorer och förebyggande åtgärder till nästa vårdenheter. För mer information om utskrivning se avsnittet om vårdssamverkan.
- Dokumentera, följ regelbundet upp och utvärdera alla åtgärder i en individuell vårdplan.

Lägesändringar för tryckavlastning

Lägesändringar minskar tryck på känsliga områden och främjar komfort, hygien och rörelseförmåga. Patienter bör uppmuntras till aktivitet eftersom rörelse är kroppens naturliga försvar mot trycksår. De som saknar förmåga att spontant ändra position behöver regelbunden hjälp enligt ett individuellt vändschema.

Vid varje lägesändring ska huden inspekteras för att identifiera tryckrodnader. Om personen inte svarar som förväntat bör frekvensen eller underlaget justeras. Undvik att placera någon på ett befintligt trycksår.

Positionering i sängläge:

Sidoläge 30 graders vinkel med stöd av positioneringskuddar.

Ryggläge Kilkuddar kan användas för att minska tryck, huvudändan max 30 grader.

Hälar Avlastas med kuddar eller hälavlastare för att undvika skador.

Även små lägesförändringar har betydelse och bör inkluderas i vårdplanen.

Se sid. 18 för positioneringshjälpmedel .

För mer information konsultera Vårdhandboken.

[1] Wounds International 2020 | Vol 11 utgåva 4 |, Gefen A and Soppi E, sid 39

“ De två viktigaste biomekaniska egenskaperna som avgör hur effektivt en stödyta minskar risken för trycksår hos patienter med nedsatt rörlighet eller sensoriska funktioner är nedsänkning och omslutning.

- Nedsänkning är det djup som en patients kropp tränger igenom när den placeras på en stödyta.
- Omslutning är stödytans förmåga att forma sig runt patientens kropp.”

Avsedd användning

LENTEX hygienmadrasser har ett LENTEX-laminat som helt omsluter skumkärnan på alla sidor. Laminatet är ljus och semi-transparent för att underlätta upptäckt av kontaminering, både på utsidan och av skumkärnan. LENTEX-madrasserna kännetecknas av dess följsamhet och är utvecklade för att underlätta Omslutning och Nedsänkning (se sid 6). Madrasserna är avsedda att användas tillsammans med ett lakan.

LENTEX-madrasserna har noga utvalda skumsammansättningar. Madrasserna är utvecklade som hjälpmedel i vårdarbete för förebyggande och behandling av trycksår. Madrasserna passar alla vårdmiljöer med olika nivåer av tryckavlastning. Magma är särskilt lämpad för vårdinrättningar där det föreligger en förhöjd risk för brand.

Madrasserna används inom vården och finns även som evakueringsmadrass med dubbla hygienbarriärer (XP) eller med ett överdrag som har svetsade sömmar, vätsketät dragkedja och handtag (RXH-WR).

Air0

Max brukarvikt: 300

Sårkategori: 3

Framtagen för tyngre brukare, patienter med smärta och högriskpatienter.

Soft EuroFlex (XP)*

Max brukarvikt: 180

Sårkategori: 3

Framtagen för smärt- och högriskpatienter.

Magma

Max brukarvikt: 180

Sårkategori: 2

Magma har testats enligt brandstandard SS 876 00 10 (motsvarar NT-Fire 055) och lämpar sig för miljöer med förhöjd brandrisk som psykiatriska kliniker, häkten mm.

Exclusive

Max brukarvikt: 180

Sårkategori: 2

En stabil madrass med god komfort

Waterlily

Max brukarvikt: 180

Sårkategori: 2

Framtagen för att ge tryckavlastning och god komfort med ett miljövänligt skum.

Soft comfort

Max brukarvikt: 130

Sårkategori: 2

En stadig madrass för den lättare brukaren.

Comfort

Max brukarvikt: 110

Sårkategori: 1

En madrass för den lättare brukaren och kortare liggtider

Hygro Pure (XP)*

Max brukarvikt: 220

Sårkategori: 2

En stadig och hållbar madrass.

Barn & junior

Max brukarvikt: 40

Sårkategori: -

Framtagen för unga brukare med sängvättningsproblem, inkontinens samt damm- och/eller kvalsterallergi.

Flex bäddmadrass

Max brukarvikt: 150

*XP, LENTEX med evakueringsöverdrag

Soft Euroflex och Hygro Pure kan levereras med ett RXI-5 överdrag med integrerad evakueringsfunktion och erbjuder då en evakueringsmadrass med dubbla hygienbarriärer. Dessa modeller får då tillägget XP.

RXI-5 överdraget är testat och godkänt som evakueringshjälpmedel enligt SS 87600039:2022.

Se sid 15 för information om evakuering med RXI-överdrag.

Kontraindikationer

Inga kända kontraindikationer finns.

Valet av madrass ska alltid matchas mot dess planerade användningsområde.

Guide, LENTEX-madrasser

Nedan presenteras en snabbguide med information för de olika LENTEX-madrasserna. Har du frågor som inte besvaras i denna guide eller på annan plats i bruksanvisningen, kontakta Järven Health Care. Kontaktinformation hittar du på sista sidan.

HYGIENMADRASS	Roterbar Vändbar		Max Brukarvikt	Sårkategori	Sårkategorier					Waterlily CMHR-skum	
					Supersoft-skum	35 kg kallskum	40 kg kallskum	50 kg kallskum	Flex viskoelastisk		
Air0	●	●	300 kg	1-3	●	-	-	-	●	●	-
Soft Euroflex (XP)	●	-	180 kg	1-3	●	-	-	-	●	●	-
Soft Euroflex	●	-	180 kg	1-3	●	-	-	-	●	●	-
Magma	●	●	180 kg	1-2	-	-	-	-	-	-	●
Exclusive	●	●	180 kg	1-2	●	-	●	-	-	-	-
Waterlily	●	●	180 kg	1-2	-	-	-	-	-	●	-
Comfort	●	●	110 kg	1	-	●	-	-	-	-	-
Hygro Pure (XP)	●	●	220 kg	1-2	-	-	-	●	-	-	-
Soft Comfort	●	●	130 kg	1-3	●	-	●	-	-	-	-
Barn & Junior	●	●	40 kg	1	-	●	-	-	-	-	-
Flex bäddmadrass	●	●	150 kg	1-2	-	-	-	-	●	-	-

Uppmätt mottryck (svensk standard SS 876 00 13)

	Stor intryckskropp 300 N	Stor intryckskropp 600 N	Liten intryckskropp 40 N
Air0	26	43	42
Soft Euroflex (XP)	26	48	45
Soft Euroflex	26	48	45
Magma	33	46	49
Exclusive	35	48	51
Waterlily	32	48	50
Comfort	39	49	50
Hygro Pure (XP)	30	48	49
Soft Comfort	33	47	48
Barn & Junior	39	49	50
Flex bäddmadrass	-	-	-

Flex bäddmadrass har inte trycktestats inte eftersom den är beroende av en underliggande basmadrass.

Handhavande

Mottagande och upppackning

Våra hygienmadrasser med LENTEX levereras planpackade eller vikta i återvinningsbar plast. Börja med att kontrollera att varan inte är skadad.

Vid eventuell transportskada, se sid 16.

Ta bort plastförpackningen samt eventuellt skyddsmaterial. Användning av kniv bör undvikas vid upppackning och hantering på grund av risk för skador på hygienmadrassen. Hygienmadrassen kan placeras ut och användas direkt.

Inspektion av din hygienmadrass

En inspektionsplan för revision av madrassen bör upprättas för att din hygienmadrass ska hålla och fungera så länge som möjligt. Kontakta gärna oss på Järven Health Care så hjälper vi er med detta. Kontaktuppgifter hittar du på manualens sista sida.

Kontrollera regelbundet ytskiktet för synliga tecken på skador eller slitage, exempelvis revor, sprickor, hål, fläckar eller färgning. Kontrollera madrassens alla sidor (även undersida).

Kontrollera att madrasskärnan inte blivit kontaminerad. Vid händelse av kontaminering av bör aktuell madrass omedelbart avlägsnas och kasseras för att minska risken för smittspridning.

Vid skada utan kontaminering av madrasskärnan lagas ytskiktet enligt anvisningar. (Se sid 13)

Skötsel och underhåll

Våra madrasser med LENTEX har transparent ytskikt som gör att smuts och föroreningar syns tydligt även om det trängt in i madrassen under ytskiktet. Ytskiktet är också lätt att rengöra.

För rengöring av madrasser med ytskiktet LENTEX används tvålbaserade rengöringsmedel. Desinficering sker med alkoholbaserat rengöringsmedel med tensider. Skulle odör kvarstå efter det att madrassen rengjorts ta lite citronessens på en fuktig trasa och torka av madrassen.

Alkoholer har en uttorkande effekt på ytskiktet och bör användas sparsamt.

Rekommenderade rengöringsmedel:

• Dax Ytdeinfektion Plus • Virkon, Perform • Dismozon Pur

Rengöringsmedel innehållande klor och fenoler kan påverka ytskiktet negativt och bör därför undvikas.

Sonosteam madrass tvätt

Våra madrasser med ytskiktet LENTEX är testade och godkända för Sonosteam madrass-tvätt. Detta gäller även våra LENTEX XP-modeller samt om madrassen är försedd med överdraget RXH-WR.

Förvaring

LENTEX hygienmadrasser förvaras i torra, rumstempererade lokaler.

Vi rekommenderar att madrassen förvaras plant, på högkant eller på sida. Madrassen bör inte vikas eller rullas vid förvaring eftersom den då riskerar att deformeras.

Undvik att utsätta madrassen för direkt solljus under längre tid.

Förväntad livslängd

Våra LENTEX-madrasser har en förväntad livslängd på 5 år men den kan variera beroende på belastning och skötsel. Madrasserna är både vänd- och roterbara (undantaget Soft EuroFlex som endast är roterbar). Livslängden baseras på bland annat på att madrassen vänds och roteras regelbundet.

VÄNDBAR madrassens under- och översida ger samma avlastning och komfort.

ROTERTBAR madrassens huvud- och fotända ger samma avlastning och komfort.

Undantagen är Soft Euroflex som endast är roterbar genom madrasskärnans uppbyggnad. Soft Euroflex är märkt med "DENNA SIDA UPP" för att visa hur madrassen skall placeras.

Följ alltid rekommenderat vändschema och madrassens skötselråd för bibehållen tryckavlastning och längsta möjliga livslängd.

Undvik att knivar, nyckelknippor eller andra föremål med skärande eller punkterande effekt kommer i kontakt med madrassen för att undvika att ytskiktet tar skada.

Skötsel av din LENTEX-madrass

Rengöring av madrassens yta (laminat)

Rengöring bör ske med tvålbaserade rengöringsmedel.

Desinficering av madrassöverdraget sker med alkoholbaserat rengöringsmedel med tensider (eller motsvarande). Dessa rekommenderas; Dax Ytdesinfektion Plus, Virkon, Perform och Dismozon Pur.

Skulle odör kvarstå efter det att madrassen rengjorts ta lite citronessens på en fuktig trasa och torka av madrassen.

Rengöringsmedel innehållande klor och fenoler kan påverka ytskiktet negativt och bör därför undvikas.

- Autoklivering av madrasskärnan avrådes då det gör att madrassen åldras i förtid.
- Överdraget tvättas i 70° C (max 95° C).**
- Överdraget kan torktumlas. Max 130° C.**
- Sköljmedel förstör överdragets vätsketäthet och får EJ användas.**
- Madrassen/överdraget får ej strykas.**

**Gäller XP som har RXI-överdrag.

Undvik vassa föremål i närheten av madrassen och överdraget.

Vid rengöring av madrass **läs alltid noga igenom säkerhetsdatabladet** som gäller för rengöringsmedlet och följ säkerhetsföreskrifterna.



Om laminatet är skadat utan att skumkärnan kontaminerats bör laminatet omgående repareras.

Reparation av skadat ytskikt

Eventuella skador lagas omgående med Hygientejp LENTEX (se sid 17) för att garantier ska gälla. Följ anvisningar nedan:

1. **Försäkra dig om att ingen kontaminering trängt ner i skumkärnan.**
Har detta skett ska madrassen kasseras. Följ lokala hänvisningar för hantering av smittade produkter.
2. **Rengör ytan runt skadan med ytdesinfektion. Låt torka.**
3. **Klipp en lämplig längd av lagningstejpen så att skadan täcks med marginal.**
4. **Ta lös en liten bit (ex. ett hörn) av det gröna skyddsskiktet** och dra bort resten allt eftersom materialet klistras fast. Lagningstejpen ska ej sträckas ut då den monteras.
5. **Då materialet täcker hela skadan, gnugga slutligen med handen över så att det fäster.**
Försäkra dig om att lagningstejpen har fäst över hela ytan och inga klibbiga kanter finns kvar.

Skötsel av madrassens skum

Inspektera regelbundet din LENTEX-madrass och leta efter våta fläckar, missfärgningar, tecken på skador och slitage på laminatet eller om madrassen luktar illa p.g.a kroppsvätskor. Detta gäller särskilt om ytskiktet visar tecken på slitage eller om det finns misstanke om skada. Laminatet är semi-transparent för att underlätta upptäckten av smuts som trängt igenom till skummet.

Kassera omedelbart madrasser som är kontaminerade för att minska risken för smittspridning!

Genom att regelbundet kontrollera och byta ut kontaminerade madrasser kan arbetsmiljön förbättras och risken för smittspridning minska, något som både gynnar personal och patient.

Madrassrevision för patientens skull

Att kontrollera skummet i en sjukvårdsmadrass för kontamination är avgörande för att säkerställa patientsäkerhet och hygien. Skummet kan absorbera vätskor, såsom blod, urin och sårsvätska, vilket skapar en miljö där bakterier och svamp kan växa. Om madrassen är kontaminerad finns en risk för smittspridning, försämrad sårhäkning.

Madrassrevision för personalens skull

En kontaminerad madrass kan försämma arbetsmiljön och öka arbetsbelastningen för vårdpersonalen:

- Risken ökar för smittspridning om personal utsätts för bakterier och svamp som kan finnas i den kontaminerade madrassen. Detta kan öka risken för egen sjukdom.
- Eventuell stress över att arbeta med potentiellt smittsamma ytor kan påverka den psykosociala arbetsmiljön.
- Dålig lukt och (o)synliga föroreningar kan skapa en obehaglig arbetsmiljö.
- Extra vårdarbete när en vårdrelaterad infektion uppstår.
- Den fysiska belastningen ökar för personalen om en patient behöver flyttas oftare på grund av en kontaminerad madrass eller om madrasser akut måste bytas ut.

Madrassrevision för ekonomins skull

Regelbundna madrasskontroller kan minska risken för vårdrelaterade infektioner (VRI), vilket i sin tur kan leda till kortare vårdtider och lägre kostnader för antibiotika och intensivvård. Den initiala kostnaden för inspektioner och madrassbyten vägs upp av besparingar från färre infektioner och komplikationer om antalet patienter som får vårdrelaterade infektioner minskar som en följd av madrassrevisionen.






Vid konstaterad kontamination skall madrassen kasseras och ersättas för att upprätthålla en säker vårdmiljö.

Evakuering med RXI

Om din LENTEX-madrass utrustats med ett RXI evakueringsöverdrag kan evakuering av patient ske direkt vid fara (brand eller liknande). Personal skall ha fått information och utbildning i hur man genomför evakuering med evakueringsöverdrag. Järven Health Care kan kostnadsfritt hålla evakueringsutbildning om så önskas. Kontaktinformation finns på bruksanvisningens baksida.

Evakuera från säng

- 1 Informera brukaren om vad som händer.
- 2 Sänk sängen maximalt och lås den i läge för en säkrare evakuering.
- 3 Dra ut banden på långsidan av överdraget och fixera banden runt brukaren.
- 4 Använd de yttre handtagen i fotändan för att dra madrassen ut från sängen och ner på golvet. Vi rekommenderar en 45° vinkel mellan madrass och sängkant.

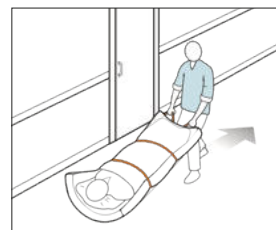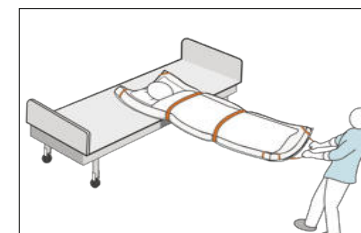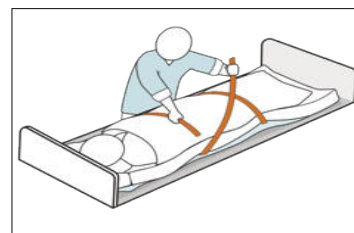

Evakuering på plant underlag

- 1 Dra madrassen med handtagen i fotändan.
- 2 Luta kroppen lätt bakåt. Detta underlättar evakueringen och avlastar armarna.
- 3 Gå i normal hastighet - spring inte!



Evakuering i trappor

- 1 Gå baklänges tills större delen av madrassen har glidit ner över det översta trappsteget.
 - 2 Vänd dig helt om så att du har blicken i färdriktningen, utan att släppa taget om madrassen.
 - 3 Håll en hand stadigt på ledstången.
 - 4 Följ trappen nedåt och låt madrassen vila mot dina ben vid behov.
- Gå nedåt i normal hastighet - spring inte!

Övrig information

Produktansvar

Med produktansvar avses tillverkarens, importörens eller försäljarens lagstadgade skadeståndsansvar för eventuella skador som produkten orsakat.

Produktansvarslagen fastställer tillverkarens, importörens eller försäljarens lagstadgade skadeståndsansvar för eventuella skador som produkten orsakat. Reglerna gäller för fysiska produkter i form av lösa föremål men även för produkter som kopplas ihop med andra lösa föremål eller fast egendom. Finns det ingen produkt som orsakat någon form av egendoms- eller personskada är produktansvarslagstiftningen inte relevant.

Returer och reklamationer

Reklamationer skall skriftligen anmälas till Järven Health Care. Retur av produkt skall efter godkänt reklamerationsärende ske enligt våra instruktioner.

Returneras produkt innan reklamerationsärendet är godkänt räknas ärendet som avslutat och ersättning till kund betalas inte ut.

Transportskador

Transportskada skall noteras på fraktsedeln innan påskrift för att vara giltig. Därefter kontaktas Järven Health Care kundtjänst - 0660-22 28 50 eller healthcare@jarven.se.

OBS! För snabbare behandling av ditt ärende ber vi dig fotografera transportskadan så utförligt som möjligt innan ni kontaktar kundtjänst.

Återvinning

Madrasen är helt energiåtervinningsbar och skall sorteras som brännbart avfall. Ingen demontering är nödvändig vid kassering av madrass. Eventuellt madrassöverdrag sorteras som textilavfall.

Järven Health Care jobbar kontinuerligt med att utveckla sitt miljöarbete.

Vi eftersträvar att alltid använda material och produkter med minsta möjliga miljöavtryck. Järven Health Care är ansluten till Näringslivet Producentansvar, www.npa.se, och uppfyller därigenom sitt producentansvar. Vi har även en fullständig livscykelanalys på våra LENTEX-madrasser.

För mer information om vårt miljöarbete kontakta Järven Health Care.

Tillbehör

LENTEX HYGIENTEJP

En mycket stark och elastisk lagnings-tejp, framtagen för Järvens unika ytskikt LENTEX.

Art. nr: 11-019900-002 (25m / 6 cm bred)



Tillhörande produkter

Utöver de produktspecifika tillbehören har vi ett urval av produkter som med fördel kan kombineras med våra LENTEX-madrasser.



EVAKUERINGSÖVERDRAG (för XP-modellerna)

Evakueringsöverdrag RXI-5 med stadiga handtag och fixeringsremmar för inbyggd evakueringsfunktion vid fara (brand, gasläcka, etc.).



RÄDDNINGSLAKAN

Som ett alternativ till evakueringsöverdraget RXI-5 rekommenderar vi JÄRVEN RÄDDNINGSLAKAN för att underlätta evakuering av patient.



KUDDE ZUZZA

En mjuk, skön och luftgenomsläpplig kudde som är tillverkad för att ge god komfort och lång livslängd. Hela kudden är kokbar för att möjliggöra effektiv rengöring.



RXP KUDDÖVERDRAG

Ett avtorkningsbart kuddöverdrag i behagligt material (PU).



BRANDSÄKRA TEXTILIER TCS

Vi har ett urval av brandsäkra textilier i materialet Trevira som har ett inbyggt brandskydd. Textilierna omfattar bl.a. filt, kuddöverdrag och lakan. Kontakta Järven Health Care för mer information.

Tillhörande produkter, forts.



FLEX HÄLDYNA

Erbjuder effektiv tryckavlastning för patienter med tryckkänsliga områden från underben till fot/hälar. Häldynan har ett laminat av LENTEX för extra hygienkontroll.




SCHAMPIKUDDEN

Erbjuder en trygg sittställning för den som inte orkar att sitta upp utan stöd. Järven Health Care har, i samarbete med vårdpersonal, tagit fram Schampikudden som enkelt placeras enkelt bakom brukarens rygg.



JÄRVEN KILKUDDE

Järven kilkudde hjälper till att positionera och avlasta brukaren för att minska risken för trycksår. Den kan användas som sidostöd eller för att höja huvud- eller fotändan.

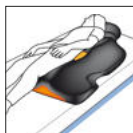

30° POSITIONERINGSKIL - SYST'AM P910L

Ett stadigt hjälpmedel för vårdpersonal som utför kontinuerliga lägesändringar för patienter. Kilen hjälper till att förebygga trycksår och andra komplikationer som ofta uppstår vid långvarigt sängläge.



STÖVEL FÖR HÄLSTÖD - SYST'AM P903T

Ett komfortabelt hälstöd särskilt utformat för patienter med normal eller något begränsad rörlighet. Det minskar trycket på fotens mest utsatta områden och minskar risken för trycksår.

Symbolförklaring



Anger artikelnummer



Anger serienummer



Anger batchnummer



Produkten är en medicinteknisk produkt



Anger tillverkningsdatum




Anger tillverkare




Produkt är CE-märkt enligt MDR 2017/745



Läs bruksanvisningen innan användning

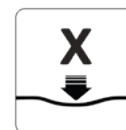

Anger upp till den särkategori produkten är anpassad för.

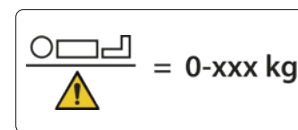

Max brukarvikt.



Kan torkas av



Rengörs med tvålbaserat rengöringsmedel



Desinficeras med alkoholbaserade rengöringsmedel



Använd citron-essens vid odör



Använd ej klorhaltiga rengöringsmedel



Torktumla ej




Ytskiktet är vätskeavvisande



Undvik vassa föremål



Eventuella skador på laminatet lagas med LENTEX lagningstejp

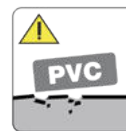

Plaster får inte placeras i kontakt med laminatet



Trycktestad enligt SS 8760013




Har testats enligt SS 876 00 01, testmetod EN 597-1 & 2.



Har testats enligt SS 876 00 10:2016, testmetod NT-Fire 055



Madrassen är roterbar

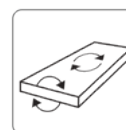

Madrassen är både vänd- och roterbar

Kontakta Järven Health Care för information om vårt kompletta utbud av positioneringshjälpmedel och beställning.



LENTEX Bruksanvisning. Alla varumärken tillhör respektive ägare.
Järven AB förbehåller sig rätten att uppdatera denna bruksanvisning
vid behov och/eller påträffande av eventuella stav- eller faktafel.

**Ytterligare exemplar kan beställas från Järven Health Care.
Kopiering för internt bruk är tillåten**



Järven AB
Bromsvägen 3
SE-891 60 Örnsköldsvik
SWEDEN

Telefon: 0660-22 28 50
Telefax: 0660-824 10
E-post: healthcare@jarven.se

www.jarven.se