



BRUKSANVISNING

Magma Plus



Järven Health Care

Tack till ditt val av Magma Plus vårdmadrass. Vårt mål är att du ska bli nöjd med madrassen både vad gäller funktion och livslängd. Vi ber dig därför att ägna några minuter till att läsa igenom denna bruksanvisning för att på bästa sätt hantera din madrass.

Har du frågor som inte berörs i denna bruksanvisning ber vi dig att ta kontakt med oss på Järven Health Care. Du hittar våra kontaktuppgifter på baksidan av denna bruksanvisning.

Varnings- och informationsrutor



Varningsruta som informerar om en viktig säkerhetsaspekt eller fara. Om du inte förstår eller följer informationen kan du skada dig själv eller andra!

Informationsruta med anvisningar som, om de inte följs, kan skada produkten och/eller försämra systemets funktion och prestanda.

CE-Märkning

Järvens Health Cares madrasser och överdrag är CE-märkta enligt MDR 2017/745. Märkningen innebär att Järven Health Care har tillverkaransvaret och försäkrar att produkten uppfyller de väsentliga kraven samt att det finns teknisk dokumentation samt försäkran som ska bevaras i minst tio år.



Järvens kvalitetsarbete

Vårt kvalitetsarbete och kundfokus förverkligas genom att vara lyhörd för kunders behov och förväntningar samt att i alla avseenden verka för ett samarbete som bygger på långsiktighet och förtroende.

Ständiga förbättringar av våra produkter och tjänster är grunden till vår förmåga att tillfredsställa våra nuvarande och framtida kunder. I vårt grundläggande kvalitetsarbete ingår också att finna utvärderingsmetoder och standarder som erbjuder kunden en säkerställd kvalitet gällande komfort, funktion, hållbarhet och pris.

Järven Health Care fokuserar särskilt på att, genom kompetenta och engagerade medarbetare, kontinuerligt fortbilda och kompetensutveckla vårdpersonal. Vår förhoppning är att det ska leda till en högkvalitativ vård med inriktning på att förebygga trycksår och vårdrelaterade infektioner samt minska antalet brandtillbud inom vården.

Innehållsförteckning

| | |
|---------------------------------------|----|
| Inledning | 2 |
| Varnings- och informationsrutor | 2 |
| CE-märkning | 2 |
| Vårt kvalitetsarbete | 2 |
| Innehållsförteckning | 3 |
| Säkerhetsföreskrifter | 4 |
| Produktinformation | 5 |
| Magma Plus | 5 |
| Avsedd användning | 5 |
| Kontraindikationer | 5 |
| Handhavande | 5 |
| Mottagande och uppäckning | 5 |
| Inspektion av din Magma Plus | 5 |
| Förvaring | 5 |
| Förväntad livslängd | 6 |
| Brandstandarder | 6 |
| Skötsel av madrass | 6 |
| Rengöring av överdraget | 6 |
| Övrigt | 7 |
| Produktansvar | 7 |
| Returer och reklamationer | 7 |
| Transportskador | 7 |
| Återvinning och miljö | 7 |
| Miljöarbete | 8 |
| Märkning | 10 |
| Produkten är märkt med | 10 |
| Symbolförklaring | 11 |
| Kontaktinformation | 12 |

Säkerhetsföreskrifter

Läs följande information innan ni använder er vårdmadrass!

- **Produkten ska bara användas i enlighet med denna bruksanvisning.**
- Produkten skall optiskt bedömas innan och efter varje användning.
- Vid skada på ytskikt skall produkten kasseras för att minimera eventuell risk för smittspridning.
- Produkten får inte monteras, modifieras eller repareras på annat sätt än som beskrivs i denna bruksanvisning eller i annan dokumentation från Järven Health Care.
- Se till att madrassen inte blir missformad eller skadad under förvaringen.
- Undvik vassa föremål i närheten av madrassen så att ytan inte skadas.
- Det är kundens ansvar att göra en brandriskbedömning av den avsedda användningsmiljön. Kontakta oss gärna om du har några frågor.
- Bär inte patienten på madrassen!

Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter är tillverkaren skyldig att rapportera olyckor och tillbud som kan kopplas tillverkarens produkt.

Därför skall eventuella tillbud eller olyckor som kopplas till våra produkter omgående rapporteras till oss.

Produktinformation

Magma Plus

Madrassen passar särskilt bra för miljöer där man ställer extra höga brandkrav såsom; häkten, arrester, psykiatriska kliniker och behandlingshem. Madrassen har även hög rivstyrka för att försvåra för patienter med självskaдебeteende eller som har suicidala tendenser.

Avsedd användning

Magma Plus är framtagen för extremt krävande och brandfarliga miljöer. Madrassen lämpar sig väl för användning inom sektorer som fängelseceller, avvänjningskliniker, psykiatriska avdelningar med mera.

Magma Plus kan användas direkt efter uppackning

Kontraindikationer

Inga kända kontraindikationer finns.

Handhavande

Mottagande och uppackning av produkten

Magma Plus levereras planpackad i återvinningsbar plast. Vid leverans kontrollera att emballaget och madrassen inte är skadade. *Vid eventuell transportskada, se sid 16.*

Ta bort plastförpackningen samt eventuellt skyddsmaterial. **Användning av kniv bör undvikas vid hantering p.g.a. risk för skador på madrassen och/eller överdraget.** Madrassen kan placeras och användas direkt.

Inspektion av din Magma Plus

En inspektionsplan för revision av madrasser bör upprättas för att minska risken för vårdrelaterade infektioner (VRI) samt för att madrassen ska hålla och fungera så länge som möjligt. Kontakta gärna oss på Järven Health Care så hjälper vi er med detta. Kontaktuppgifter hittar du på bruksanvisningens sista sida.

Kontrollera regelbundet överdraget för synliga tecken på skador eller slitage, exempelvis revor, sprickor, hål, fläckar eller färgning. Kontrollera madrassens alla sidor (även undersida). Om överdraget har skador måste en noggrann kontroll av madrassens skum genomföras och överdraget omgående bytas ut.

Säkerställ att madrasskärnan inte blivit kontaminerad. Vid händelse av kontaminerat skum skall aktuell madrass omedelbart avlägsnas och kasseras för att minska risken för

Förvaring

Magma Plus förvaras i torra och rumstempererade utrummen. Undvik direkt solljus.

Förväntad livslängd

Följ alltid våra skötselråd för längsta möjliga livslängd med bibehållen funktion. Förväntad livslängd vid normal användning är 5 år.

Brandstandarder

Magma uppfyller SS 876 00 10:2016 vilket motsvarar NT-Fire 055, en av de tuffaste testmetoderna för madrasskärnor.

Skötsel av madrass

Rengöring av överdraget

Den helt vattentäta madrassen kan rengöras med tvålbaserade rengöringsmedel. Se till att använda rätt spädningförhållande. **Använd aldrig koncentrat!**

Vid användning av klorhaltiga preparat använd inblandning 1 000 PPM.

Desinficering av madrassöverdraget sker med alkoholbaserat rengöringsmedel med tensider (eller motsvarande). Dessa rekommenderas; Dax Ytdesinfektion Plus, Virkon, Perform och Dismozon Pur.

Skulle odör kvarstå efter det att madrassen rengjorts ta lite citronessens på en fuktig trasa och torka av madrassen.

Rengöringsmedel innehållande klor och fenoler kan påverka ytskiktet negativt och bör därför undvikas.

- Autoklivering av madrasskärnan avrådes då det gör att madrassen åldras i förtid.
- Sköljmedel förstör överdragets vätsketätthet och får EJ användas.
- Madrassen/överdraget får ej strykas.

Undvik vassa föremål i närheten av madrassen och överdraget.

Vid rengöring av madrass **läs alltid noga igenom säkerhetsdatabladet** som gäller för rengöringsmedlet och följ säkerhetsföreskrifterna.



Om överdraget är skadat på ett sätt som gör att kroppsvätskor riskerar att tränga igenom till skumkärnan bör madrassen omgående bytas ut.

Övrigt

Produktansvar

Med produktansvar avses tillverkarens lagstadgade ansvar för eventuella skador som produkten orsakat enligt Produktansvarslagen. Denna lag fastställer tillverkarens, importörens eller försäljarens lagstadgade skadeståndsansvar.

Reglerna gäller för fysiska produkter i form av lösa föremål men även för produkter som kopplas ihop med andra lösa föremål eller fast egendom. Finns det ingen produkt som orsakat någon form av egendoms- eller personskada är produktansvarslagstiftningen inte relevant.

Returer och reklamationer

Reklamationer skall skriftligen anmälas till Järven Health Care. Retur av produkt skall efter godkänt reklimationsärende ske enligt våra instruktioner.

Returneras produkt innan reklimationsärendet är godkänt räknas ärendet som avslutat och ersättning till kund betalas inte ut.

Transportskador

Eventuella transportskador skall noteras på fraktsedeln innan påskrift för att vara giltig. Ta därefter kontakta med Järven Health Care (se sista sida för kontaktuppgifter). För snabbare behandling av ditt ärende ber vi dig fotografera transportskadan så utförligt som möjligt innan ni kontaktar kundtjänst.

Återvinning och miljö

Textilkomponenter: Sorteras som textilavfall. Lämna dem i den kommunala textilinsamlingen eller på återvinningsstationer för textilåtervinning.

Brännbart material: Om produkten innehåller skum eller andra brännbara material, vänligen sortera dessa som brännbart avfall. Detta ska lämnas i den vanliga avfallsinsamlingen för förbränning eller energiutvinning.

För produkter med smittförande material

För produkter som har varit i kontakt med smittsamma ämnen, vänligen följ specifika riktlinjer för farligt avfall. Ta kontakt med din lokala avfallshantering för korrekt kassering.

OBS! Kassering och återvinning av begagnade produkter och förpackningar måste följa de lagar och föreskrifter som gäller för avfallshantering i respektive land.

Miljöarbete

Järven Health Cares Miljöarbete

Järven Health Care jobbar kontinuerligt med att utveckla sitt miljöarbete. Vi eftersträvar att alltid använda material och produkter med minsta möjliga miljöavtryck.

Järven Health Care är ansluten både till REPA-registret samt El-kretsen AB och uppfyller därigenom sitt producentansvar. För mer information om vårt miljöarbete kontakta Järven Health Care.



Märkning

Produkten är märkt med:

Produktnamn, Storlek

Artikelnummer

Ordernummer

Tillverkningsdatum (år-månad- dag)


Produktspecifik information (såsom tvättinstruktioner etc.)

CE-märkning, MD-märkning samt Information om att läsa bruksanvisning

Tillverkare

EAN eller QR-kod

Nedan följer exempel på märkning. Notera dock att märkningen kan variera

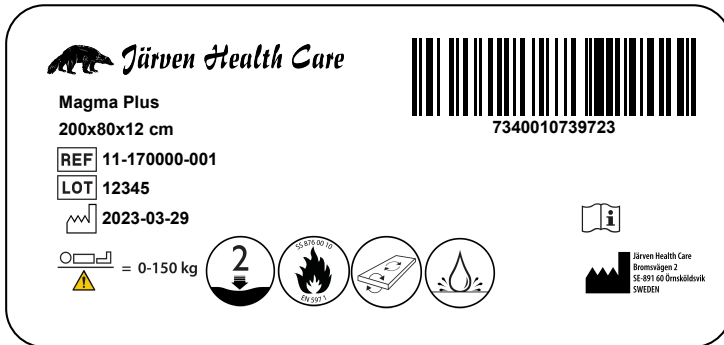

Symbolförklaring



Artikelnummer



Ordernummer



Anger att artikeln är en medicinteknisk produkt.




Anger att användaren måste läsa bruksanvisningen.




Anger uppgifter om tillverkaren



Produktionsdatum

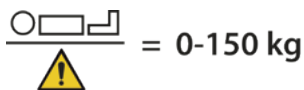


Anger max brukarvikt, 0-150 kg

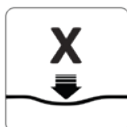

Anger upp till den sårkategori madrassen är anpassad för.



Madrassen har testats enligt SS 874 00 10:2016, testmetod NT-Fire 055 och EN 597-1 & 2.

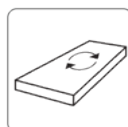

Madrassen är både vänd- och roterbar



Överdraget är vätskeavvisande



Denna produkt är CE-märkt enligt MDR 2017/745.



Bruksanvisning Magma Plus. Alla varumärken tillhör respektive ägare. Järven AB förbehåller sig rätten att uppdatera denna bruksanvisning vid behov och/eller påträffande av eventuella stav- eller faktafel.

**Ytterligare exemplar kan beställas från Järven Health Care.
Kopiering för internt bruk är tillåten**



Bromsvägen 3
SE-891 60 Örnsköldsvik
SWEDEN

Tel: +46 660-22 28 50
Fax: +46 660-824 10
Email: healthcare@jarven.se

www.jarven.se