



BRUKSANVISNING

Järven Räddningsmadrass



Järven Health Care

Tack för valet av en produkt från Järven Health Care. Vårt mål är att du ska bli nöjd med produkten både vad gäller funktion och livslängd. Vi ber dig därför att ägna några minuter till att läsa igenom denna bruksanvisning för att på bästa sätt hantera din räddningsmadrass.

Har du några frågor som inte berörs i denna bruksanvisning ber vi dig att ta kontakt med oss på Järven Health Care. Du hittar våra kontaktuppgifter på baksidan av denna bruksanvisning.

Varnings- och informationsrutor



Varningsruta som informerar om en viktig säkerhetsaspekt eller fara. Om du inte förstår eller följer informationen kan du skada dig själv eller andra!

Informationsruta med anvisningar som, om de inte följs, kan skada och/eller försämra produkten.

CE-Märkning

Järvens Räddningsmadrass är CE-märkt enligt MDR 2017/745. Märkningen innebär att Järven Health Care har tillverkaransvaret och försäkrar att produkten uppfyller de väsentliga kraven samt att det finns teknisk dokumentation samt försäkran som ska bevaras i minst tio år.



Kvalitetsarbete

Vårt kvalitetsarbete och kundfokus förverkligas genom att vara lyhörd för kunders behov och förväntningar samt att i alla avseenden verka för ett samarbete som bygger på långsiktighet och förtroende.

Ständiga förbättringar av våra produkter och tjänster är grunden till vår förmåga att tillfredsställa våra nuvarande och framtida kunder. I vårt grundläggande kvalitetsarbete ingår också att finna utvärderingsmetoder och standarder som erbjuder kunden en säkerställd kvalitet gällande komfort, funktion, hållbarhet och pris.

Järven Health Care fokuserar särskilt på att, genom kompetenta och engagerade medarbetare, kontinuerligt fortbilda och kompetensutveckla vårdpersonal. Vår förhoppning är att det ska leda till en högkvalitativ vård med inriktning på att förebygga trycksår och vårdrelaterade infektioner samt minska antalet bränder som uppkommer i vården.

Innehållsförteckning

Inledning	2
Symboler som används i denna bruksanvisning	2
CE-märkning	2
Kvalitetsarbete	2
Innehållsförteckning	3
Säkerhetsföreskrifter	5
Produktinformation	6
Järven Räddningsmadrass	6
Brandskydd	6
Handhavande	6
Mottagande och uppackning	6
Avsedd användning	6
Evakuering	7
Skötsel och rengöring	8
Symboler, tvättinstruktioner	8
Förvaring	9
Livslängd	9
Återvinning	9
Övrigt	9
Produktansvar	9
Returer och reklamationer	9
Transportskador	9
Märkning	10
Etiketter	10
Symbolförklaring	10
Tillbehör	10
Kontaktuppgifter	12

Säkerhetsföreskrifter

Läs följande information innan ni använder er Räddningsmadrass!

- **Produkten ska bara användas i enlighet med denna bruksanvisning.**
- Produkten ska inte kombineras, monteras eller repareras med andra delar, tillbehör eller reservdelar än de som beskrivs i denna bruksanvisning eller annan dokumentation från Järven Health Care.
- Säkerställ att produkten inte blir klämd eller skadad vid förvaring.
- Undvik vassa föremål i närheten av produkten.
- Bär aldrig brukaren och på räddningsmadrassen.
- Järven Räddningmadrass är brandtestad. Det är kundens ansvar att göra riskbedömning utifrån risken för anlagd brand eller andra brandrisker och därefter välja rätt produkt. Kontakta oss gärna vid frågor.
- För att undvika skador får produkterna inte komma i kontakt med varma källor eller eld, till exempel glödande cigaretter, varma lampor eller liknande.
- Försäkra er om att ni beställer rätt produkt till rätt ändamål.
- Personal som utför evakuering bör ha adekvat utbildning.
På jarven.se finns en instruktionsfilm som även kan beställas kostnadsfritt.
- Efter evakuering måste madrassen kontrolleras noggrant för eventuella skador.
Är du osäker? Kontakta Järven Health Care; 0660-22 28 50, healthcare@jarven.se
- Vid eventuella olyckor och tillbud som har inträffat i samband med våra produkter skall Järven Health Care kontaktas.



Räddningsmadrassen är designad för att dra patient på golv och i trappor.
Den får ej användas för att bära patient!

Produktinformation

Järven Räddningsmadrass

Räddningsmadrassen kan användas för en snabb och säker evakuering av personer som inte själva kan ta sig ut vid brand eller annan fara. Med räddningsmadrassen kan en person med några enkla handgrepp själv evakuera en nödställd och ger en extra trygghet för dig som har en verksamhet där en evakuering kan innefatta skadade, funktions- och/eller rörelsehindrade.

Räddningsmadrassen är liksidigt utformad med en undersida som glider lika bra på vått som torrt. Den är röntgentransparent och försedd med kardborreband som ger en stadig fixering. Undersidan är värmereflekterande. Storlek 190x48x8 cm

Brandskydd

Järven Räddningsmadrass är testat och uppfyller relevanta delar i SS 876 00 39. SS 876 00 01, EN 597-1.

Handhavande

Mottagande och uppackning

Börja med att kontrollera att produkten inte är skadad. Vid eventuell transportskada, se sid 8.

Ta bort plastförpackningen samt eventuellt skyddsmaterial. Användning av kniv bör undvikas vid hantering av förpackningen och produkten. Räddningsmadrassen kan därefter utplaceras och användas direkt.

Avsedd användning

Järvens Räddningsmadrass är avsedd att användas för evakuering av patient vid brand eller annan fara, när ingen annan evakueringsmöjlighet ges.



Kan användas i alla vårdmiljöer, men rekommenderas EJ till utåtagerande patienter eller patienter med självskadebeteende då madrassen har fixeringsband som kan användas för självskada.

Vid självskadebeteende rekommenderar vi att räddningsmadrassen placeras så den endast är åtkomlig för personal.

Evakuering

Evakuera från säng

- 1 Informera brukaren om vad som händer.
- 2 Sänk sängen maximalt och lås den i läge för en säkrare evakuering.
- 3 Se till att du har vänt madrassen rätt. Madrassen är märkt med "DENNA SIDA UPP".
Det spelar ingen roll hur du vänder madrassen i fot/huvud-led.
- 4 Använd det befintliga lakanet i sängen för att vända brukaren i position så att du kan lägga räddningsmadrassen under brukaren.
- 5 Dra sen lakanet med brukaren upp på räddningsmadrassen.
- 6 Använd spännbanden för att fixera madrassen runt brukaren. (Se illustration)
- 7 Använd handtagen i fotändan för att dra madrassen ut från sängen och ner på golvet.

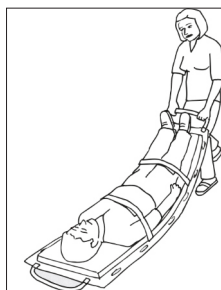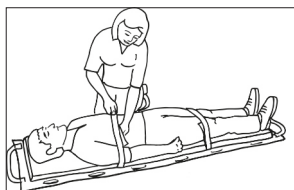

Evakuering på plant underlag

- 1 Dra madrassen med handtagen i fotändan.
- 2 Luta kroppen lätt bakåt.
Detta underlättar evakueringen och avlastar armarna.
- 3 **Gå i normal hastighet - spring inte!**



Evakuering i trappor

- 1 Gå baklänges tills större delen av madrassen har glidit ner över det översta trappsteget.
- 2 Vänd dig helt om så att du har blicken i färdriktningen, utan att släppa taget om madrassen.
- 3 Håll en hand stadigt på ledstången och dra med den andra handen.
- 4 Följ trappen nedåt och låt madrassen vila mot dina ben vid behov.
- 5 **Gå nedåt i normal hastighet - spring inte!**



Personal som utför evakuering bör ha fått adekvat utbildning.
På jarven.se finns en instruktionsfilm som även kan beställas kostnadsfritt.

Skötsel och rengöring

Efter evakuering måste alla sömmar kontrolleras noggrant.

Är du osäker Kontakta Järven Health Care:

Telefon: 0660-22 28 50 eller mejl: healthcare@jarven.se

Torka av madrassen med tvålbaserat rengöringsmedel och vatten. Se till att använda rätt spädningförhållanden enligt rekommendationer för rengöringsmedlet. Använd aldrig koncentrat.

Klorhaltiga preparat får ej användas!

Desinficering sker med alkoholbaserat rengöringsmedel med tensider.

Vid användning av rengöringsmedel eller andra kemikalier är det viktigt att beakta de instruktioner och säkerhetsföreskrifter som finns för respektive rengöringsmedel.

Symboler, tvättinstruktioner



Rengöring bör ske med tvålbaserade rengöringsmedel. Följ rengöringsmedlets bruksanvisning och rekommendationer angående säkerhet och personligt skydd o.s.v. Se till att använda rätt spädningförhållande.



Under inga omständigheter får klorhaltiga preparat användas!



Desinficering sker med alkoholbaserat eller liknande rengöringsmedel med tensider. OBS! Alkoholer har en uttorkande effekt och bör därför användas sparsamt. Järven rekommenderar; Dax Ytdesinfektion Plus, Virkon, Perform och Dismozon Pur.



Undvik vassa föremål i närheten av räddningsmadrassen.



Autoklivering avrådes då det åldrar madrassen i förtid.



Skulle odör kvarstå efter det att madrassen rengjorts, ta lite citronessens på en fuktig trasa och torka av madrassen.

Förvaring

Förvara räddningsmadrassen i torra, rumstempererade lokaler. Undvik att utsätta räddningsmadrassen för direkt solljus.

Livslängd

Följ alltid våra skötselråd på räddningsmadrassen för längsta möjliga livslängd med bibehållen säkerhet och funktion. Uppskattad livslängd, om skötselråden följs, är 5 år.

Återvinning

Järven Räddningsmadrass är helt energiåtervinningsbart och skall sorteras som brännbart avfall. Ingen demontering är nödvändig.

Övrigt

Produktansvar

Med produktansvar avses tillverkarens, importörens eller försäljarens lagstadgade skadeståndsansvar för eventuella skador som produkten orsakat. Produktansvarslagen fastställer tillverkarens, importörens eller försäljarens lagstadgade skadeståndsansvar för eventuella skador som produkten orsakat. Reglerna gäller för fysiska produkter i form av lösa föremål men även för produkter som kopplas ihop med andra lösa föremål eller fast egendom. Finns det ingen produkt som orsakat någon form av egendoms- eller personskada är produktansvarslagstiftningen inte relevant.

Returer och reklamationer

Reklamationer skall skriftligen anmälas till Järven Health Care. Retur av produkt skall efter godkänt reklimationsärende ske enligt våra instruktioner. Returneras produkt innan reklimationsärendet är godkänt räknas ärendet som avslutat och ersättning till kund betalas inte ut.

Transportskador

Transportskada skall noteras på fraktsedeln innan påskrift för att vara giltig. Därefter kontaktar ni kundtjänst på Järven Health Care (0660-22 28 50, healthcare@jarven.se) och lämnar relevant information.

För snabbare behandling av ditt ärende ber vi dig fotografera transportskadan så utförligt som möjligt innan ni kontaktar kundtjänst.

Märkning

Nedan följer ett exempel på hur räddningsmadrassen är märkt. Etikettens utseende kan variera. Räddningsmadrassen är märkt med instruktioner, skötselråd samt tillverkarens kontaktuppgifter.

Etikett



Symbolförklaring



Anger produktens artikelnummer



Anger batchnummer



Anger tillverkningsdatum



Läs bruksanvisningen för viktig information



Detta är en Medicinteknisk produkt



Denna produkt är CE-märkt enligt MDR 2017/745



Anger tillverkare



Rengöring bör ske med tvålaserade medel



Desinficering bör ske med alkoholbaserade medel innehållande tensider



Under inga omständigheter får klorhaltiga preparat användas!



Undvik vassa föremål

Tillbehör

Räddningsmadrasskytt inkl. fäste.

Ett enkelt och tydligt sätt att visa vart Räddningsmadrassar finns utplacerade.





Distributör

Bruksanvisning Järven Räddningsmadrass. Alla varumärken tillhör respektive ägare.
Järven AB förbehåller sig rätten att uppdatera denna bruksanvisning vid behov och/eller påträffande av eventuella stav- eller faktafel.

Ytterligare exemplar kan beställas från Järven Health Care.
Kopiering för internt bruk är tillåten



Järven AB
Bromsvägen 3
SE-891 60 Örnsköldsvik
SWEDEN

Telefon: 0660-22 28 50
Telefax: 0660-824 10
E-post: healthcare@jarven.se

www.jarven.se