

BRUKSANVISNING

**RX-P**  
**Kuddöverdrag**



*Järven Health Care*

*Tack till ditt val av kuddöverdrag. Vårt mål är att du ska bli nöjd med produkten både vad gäller funktion och livslängd. Vi ber dig därför att ägna några minuter till att läsa igenom denna bruksanvisning för att på bästa sätt hantera din produkt.*

*Har du några frågor som inte berörs i denna bruksanvisning ber vi dig att ta kontakt med oss på Järven Health Care. Du hittar våra kontaktuppgifter på baksidan av denna bruksanvisning.*

## Varnings- och informationsrutor



**Varningsruta** som informerar om en viktig säkerhetsaspekt eller fara. Om du inte förstår eller följer informationen kan du skada dig själv eller andra!

**Informationsruta** med anvisningar som, om de inte följs, kan skada och/eller försämra produkten.

## CE-Märkning

Järvens Health Cares madrasser och överdrag är CE-märkta enligt MDR 2017/745. Märkningen innebär att Järven Health Care har tillverkaransvaret och försäkrar att produkten uppfyller de väsentliga kraven samt att det finns teknisk dokumentation samt försäkran som ska bevaras i minst tio år.



## Kvalitetsarbete

**Vårt kvalitetsarbete och kundfokus** förverkligas genom att vara lyhörd för kunders behov och förväntningar samt att i alla avseenden verka för ett samarbete som bygger på långsiktighet och förtroende.

Ständiga förbättringar av våra produkter och tjänster är grunden till vår förmåga att tillfredsställa våra nuvarande och framtida kunder. I vårt grundläggande kvalitetsarbete ingår också att finna utvärderingsmetoder och standarder som erbjuder kunden en säkerställd kvalitet gällande komfort, funktion, hållbarhet och pris.

Järven Health Care fokuserar särskilt på att, genom kompetenta och engagerade medarbetare, kontinuerligt fortbilda och kompetensutveckla vårdpersonal. Vår förhoppning är att det ska leda till en högkvalitativ vård med inriktning på att förebygga trycksår och vårdrelaterade infektioner samt minska antalet bränder som uppkommer i vården.

## Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	2
Varnings- och informationsrutor .....	2
CE-märkning .....	2
Kvalitetsarbete .....	2
<b>Säkerhetsföreskrifter</b> .....	4
<b>Produktinformation</b> .....	5
RX-P kuddöverdrag .....	5
Avsedd användning .....	5
Kontraindikationer .....	5
Brandskydd .....	5
<b>Handhavande</b> .....	5
Mottagande och uppackning .....	5
Inspektion och underhåll .....	5
Skötsel och rengöring .....	6
Förvaring .....	6
Förväntad livslängd .....	6
<b>Övrigt</b> .....	8
Produktansvar .....	8
Returer och reklamationer .....	8
Transportskador .....	8
<b>Återvinning</b> .....	8
Miljö .....	9
<b>Märkning</b> .....	9
Etiketter .....	9
<b>Symboler med förklaring</b> .....	11
<b>Kontaktinformation</b> .....	12

# Säkerhetsföreskrifter

Läs följande information innan ni använder ert RX-P kuddöverdrag!

- **Produkten ska bara användas i enlighet med denna bruksanvisning.**
- Produkten ska inte kombineras, monteras eller repareras.
- Undvik att använda vassa föremål i närheten av produkten.
- För att undvika skador får inte produkten komma i kontakt med varma källor eller eld, till exempel glödande/brinnande cigaretter, varma lampor eller liknande.

**Vid allvarliga tillbud som inträffar i samband med produkten ska detta omgående rapporteras till Järven Health Care och behörig myndighet.**

# Produktinformation

## RX-P kuddöverdrag

RX-P kuddöverdrag är ett hygienöverdrag för kuddar tillverkat i polyuretan.

## Avsedd användning

RX-P kuddöverdrag är avsedd att använda som ett hygienskydd utanpå kudden.

## Kontraindikationer

Inga kända kontraindikationer finns.

# Handhavande

## Mottagande och uppackning

Vid leverans kontrollera att varan inte är skadad. Vid eventuell transportskada, se sid 8. Ta bort plastförpackningen samt eventuellt skyddsmaterial.

Användning av kniv bör undvikas vid hantering p.g.a. risk för skador på produkten.

Vi uppmanar till att källsortera emballaget för minskad miljöpåverkan.

## Inspektion och underhåll

Kontrollera alltid efter för synliga tecken på skador eller slitage innan produkten används. Leta efter revor, sprickor, hål, fläckar eller missfärgning.

Kuddöverdraget måste alltid ligga med rätt sida upp!

Droppkanten fungerar som ett skyddande tak över dragkedjan. Om droppkanten blir upp och ner tappar den sin funktion.



**Säkerställ att kuddöverdraget är intakt!** Ett skadat överdrag är inte längre hygieniskt då kroppsvätskor riskerar tränga in till kudden. Kontrollera därför noggrant att inga skador finns på kuddöverdraget.

**Om överdraget skadats** kan det ersättas så länge ingen kroppsvätska trängt ner till kudden. Vid osäkerhet rekommenderas att kuddöverdraget byts.

## Skötsel och rengöring

Kuddöverdraget kan torkas av med desinfektionsmedel mellan varje patient och vid behov kan det tvättas i maskin.

- Tvättas i temperatur 70-95° C samt torktumlas ca 10 min i max 130° C.
- Använd tvålbaserade rengöringsmedel vid rengöring av kuddöverdraget.
- Se till att använda rätt spädningförhållande. **Använd aldrig koncentrat.**
- Vid användning av klorhaltiga preparat använd inblandning 1 000 PPM.
- Desinficering av produkten sker med alkoholbaserat eller liknande rengöringsmedel med tensider.
- Stryk ej överdraget.
- Använd ej sköljmedel, då detta förstör den vätskeavvisande funktionen.

Rekommenderade rengöringsmedel:

- Dax Ytdesinfektion Plus
- Virkon
- Perform
- Dismozon Pur



Vid rengöring läs alltid noga igenom säkerhetsdatabladet som gäller för rengöringsmedlet och följ säkerhetsföreskrifterna.

## Förvaring

Förvaring skall ske i torra, rumstempererade lokaler.

## Förväntad livslängd

Beräknad livslängd på kuddöverdraget är 3 år.



# Övrig information

## Produktansvar

Med produktansvar avses tillverkarens, importörens eller försäljarens lagstadgade skadeståndsansvar för eventuella skador som produkten orsakat. Produktansvarslagen fastställer tillverkarens, importörens eller försäljarens lagstadgade skadeståndsansvar för eventuella skador som produkten orsakat. Reglerna gäller för fysiska produkter i form av lösa föremål men även för produkter som kopplas ihop med andra lösa föremål eller fast egendom. Finns det ingen produkt som orsakat någon form av egendoms- eller personskada är lagstiftningen kring produktansvar inte relevant.

## Returer och reklamationer

Reklamationer skall skriftligen anmälas till Järven Health Care. Retur av produkt skall efter godkänt reklamationensärende ske enligt våra instruktioner. Returneras produkt innan reklamationensärendet är godkänt räknas ärendet som avslutat och ersättning till kund betalas inte ut.

## Transportskador

Eventuella transportskador skall noteras på fraktsedeln innan påskrift för att vara giltig. Ta därefter kontakta med Järven Health Cares (se bruksanvisningens baksida för kontaktuppgifter).

För snabbare behandling av ditt ärende ber vi dig fotografera transportskadan så utförligt som möjligt innan ni kontaktar kundtjänst.

**För snabbare behandling av ditt ärende ber vi dig fotografera transportskadan så utförligt som möjligt innan ni kontaktar kundtjänst.**

## Återvinning

För att säkerställa att produkten hanteras på ett miljövänligt sätt när den inte längre är i bruk, vänligen följ dessa riktlinjer:

**För de produkter som består av både textil och brännbart material, vänligen dela upp produkten i sina komponenter innan kassering.**

**Textilkomponenter:** Sorteras som textilavfall. Lämna dem i den kommunala textilsamlingen eller på återvinningsstationer för textilåtervinning.

**Brännbart material:** Om produkten innehåller skum eller andra brännbara material, vänligen sortera dessa som brännbart avfall. Detta ska lämnas i den vanliga avfallsinsamlingen för förbränning eller energiutvinning.

**För produkter som har varit i kontakt med smittsamma ämnen, vänligen följ specifika riktlinjer för farligt avfall. Ta kontakt med din lokala avfallshantering för korrekt kassering.**

**OBS! Kassering och återvinning av begagnade produkter och förpackningar måste följa de lagar och föreskrifter som gäller för avfallshantering i respektive land.**

## Miljö

**Järven Health Care tar miljöansvar på allvar.**

Vi strävar efter att alltid använda material och produkter med minsta möjliga påverkan på miljön. Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra produktionstekniken. Järven Health Care är ansluten till Näringslivet Producentansvar, [www.npa.se](http://www.npa.se), och uppfyller därigenom sitt producentansvar.

**För mer information om vårt miljöarbete kontakta Järven Health Care**

## Märkning

### Produkten är märkt med:

Produktnamn, Storlek

Artikelnummer

Ordernummer

Tillverkningsdatum (år-månad- dag)


Produktspecifik information (såsom, max brukarvikt, trycksårsgrad etc.)

CE-märkning, MD-märkning, Information om att läsa bruksanvisning

Tillverkare

EAN eller QR-kod

Nedan följer några exempel på märkning. Notera dock att märkningen kan variera.

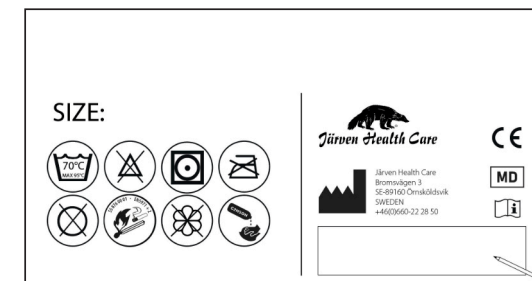

# Symbolförklaring



Denna produkt är testad och godkänd enligt SS8760001. Testmetod EN 597-1 & EN 597-2



Denna produkt är testad och godkänd enligt SS8760010



Denna produkt är testad och godkänd enligt BS7177:2008 Medium Hazard



Denna produkt är testad och godkänd enligt BS7177:2008 High Hazard



Denna produkt är vätskeavstötande




Denna produkt är CE-märkt enligt MDR 2017/745



Rengöring bör ske med tvålbaserade rengöringsmedel



Desinficering sker med alkoholbaserat eller liknande rengöringsmedel med tensider

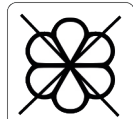

Sköljmedel får EJ användas.




Tvättas max 95 grader (överdrag)



Får ej strykas



Inga klorhaltiga preparat får användas!

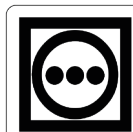

Tål torktumling i hög temperatur



Anger produktens artikelnummer



Anger produktens batch-nummer



Tillverkningsdatum



Tillverkare



Konsultera bruksanvisning



## Järven Health Care

Bruksanvisning RX-P kuddöverdrag. Alla varumärken tillhör respektive ägare.  
Järven AB förbehåller sig rätten att uppdatera denna bruksanvisning  
vid behov och/eller påträffande av eventuella stav- eller faktafel.

**Ytterligare exemplar kan beställas från Järven Health Care.  
Kopiering för internt bruk är tillåten**



Järven AB  
Bromsvägen 3  
SE-891 60 Örnsköldsvik  
SWEDEN

Telefon: 0660-22 28 50  
Telefax: 0660-824 10  
E-post: [healthcare@jarven.se](mailto:healthcare@jarven.se)

[www.jarven.se](http://www.jarven.se)