



Barn- & junior

Med det unika ytskiktet av LENTEX, för barn med damm- och kvalsterallergier

Barn & Junior hygienmadrass är lämplig för unga med sömnpåsningsproblem, inkontinens eller damm- och kvalsterallergi. Den passar alla typer av sängar, allt från små kuvöser till juniorsängar.

- **UPP TILL OCH MED SÅRKATEGORI 1.** Utvecklad som ett hjälpmedel i en förebyggande och behandlande trycksårsvård.
- **MÖJLIGGÖR NEDSÄNKNING & OMSLUTNING** med vårt extremt flexibla laminat. Två av de viktigaste biomekaniska egenskaperna för god tryckavlastning.**
- **SKÖN ATT SOVA PÅ.** Vårt unika ytskikt LENTEX är tillsammans med skumkärnan utvecklat för att minska trycket mot patienten samt ge en god komfort.
- **UNIK YTA FÖR EFFEKTIV RENGÖRING** Det ljusa ytskiktet underlättar för personal att upptäcka föroreningar på madrassens yta. Tack vare ytskiktets unika struktur håller överdraget kvar upp till 73% mer desinfektionsmedel* vid rengöring.

* Studie, Tyskland 1999

** Wounds International 2020 | Vol 11 Issue 4 | Gefen A och Soppi E, s. 39



Barn- & junior


MED DET UNIKA YTSKIKTET AV LENTEX, FÖR BARN MED DAMM- OCH KVALSTERALLERGIER.

Laminerad med Lentex

Madrasen har ett laminerat ytskikt av LENTEX som är helt utan sömmar och dragkedjor, vilket förbättrar hygienmöjligheterna. Det vita vätskeavvisande och semitransparenta ytskiktet gör det enkelt för personalen att upptäcka föroreningar på ytan såväl som madrasskärnan.

Hållbar med inbyggd sittfunktion

Madrasen har genomgått utmattningstest enligt standard SS 876 00 11 med goda resultat. Madrasen erbjuder därigenom sittfunktion med höjt ryggläge i säng.

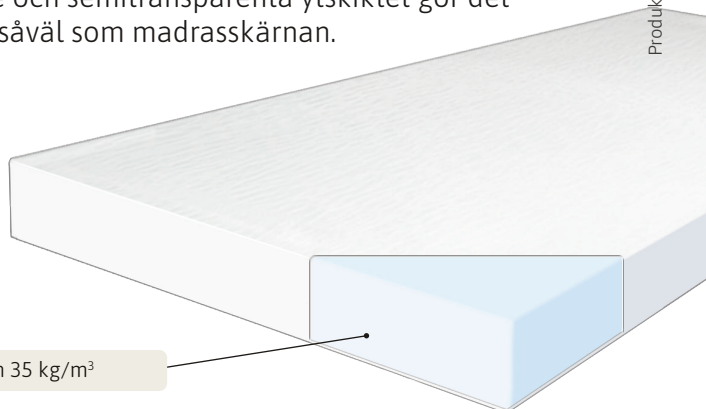

10 cm homogen kallsaum 35 kg/m³

STANDARD FÖR OBJEKTIV UTVÄRDERING AV MADRASSERS TRYCKFÖRDELANDE EGENSKAPER.

För att få en objektiv bedömning av madrassers tryckfördelande egenskaper har RISE* utvecklat en mätmetod där man med intryckskroppar mäter det faktiska mottrycket i en madrass. Mätmetoden är beskriven i Svensk standard SS 876 00 13.

Madrasen har testats av RISE* enligt SS 876 00 13 och är tryckfördelande upp till och med sårkategori 1.


Testresultaten redovisas nedan.

| Belastning | Extra låg | Låg | Medel | Hög | ** |
|--------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|----|
| Stor intryckskropp 300 N | < 30.0 | 30.0 - 34.9 | 35.0 - 39.9 | 40.0 - 44.9 | |
| Stor intryckskropp 600 N | < 45.0 | 45.0 - 52.9 | 53.0 - 60.9 | 61.0 - 68.9 | |
| Liten intryckskropp 40 N | < 45.0 | 45.0 - 52.9 | 53.0 - 60.9 | 61.0 - 68.9 | |

| Madras | Stor intryckskropp 300 N | Stor intryckskropp 600 N | Liten intryckskropp 40 N |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Comfort (Barn- & junior) | 39 | 49 | 50 |


* Research Institutes of Sweden

** Klassificering enligt tidigare grundförslaget i standarden

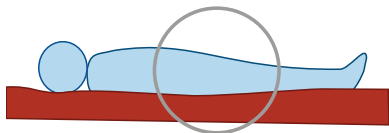


Stor intryckskropp, 300 N

Simulerar tryck från en brukare på cirka 80 kg som ligger på rygg i sängen.

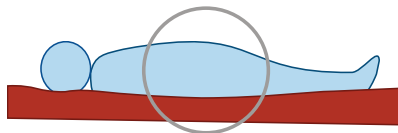

Stor intryckskropp, 600 N

Simulerar tryck från brukare ca 120 kg, eller brukare som sitter upp alt. ligger på sidan.

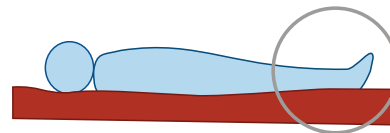

Liten intryckskropp, 40 N

Simulerar trycket från utstickande kroppsdelar som exempelvis hälar, armbågar eller axlar.

Produktspecifikationer

| | |
|--------------------|---|
| Material | Madrasen är uppbyggd av homogent kallsaum 35 kg/m ³ . Ytskiktet LENTEX är av polyuretan. |
| Storlekar | 58 x 116 x 10 cm (För andra storlekar kontakta Järven Health Care.) |
| Hygien | Uppfyller standard SS-EN 811:2018. |
| Sårkategori | Upp till och med sårkategori 1. |

| | |
|--------------------|---|
| Madrassvikt | 2,5 kg beroende på längd och bredd. |
| Brukarvikt | 1 - 40 kg. |
| Garanti | 1 år på utmattning av madrasskärnans B-värde enligt SS 876 00 11. 5 år med åldersavskrivning på vidhäftningen av LENTEX. |
| Brand | SS 87600 01, normalrisk. Testmetod EN 597-1 & 2. |

