



# Comfort

Basmadrass med fokus på hygien och kortare liggtider

Comfort är en stabil basmadrass framtagen för brukare som är rörliga och regelbundet lämnar sängen mellan perioder av vila. Passar bra för dem som trivs med en fastare madrass. Tack vare sin okomplicerade och slitstarka konstruktion är den ett ekonomiskt fördelaktigt val för miljöer med hög omsättning av vårdplatser, såsom boenden och korttidsavdelningar.

- **UPP TILL OCH MED SÅRKATEGORI 1.**  
Utvecklad som ett hjälpemedel i en förebyggande och behandlande trycksårsvård.
- **MÖJLIGGÖR NEDSÄNKNING & OMSLUTNING**  
med vårt extremt flexibla laminat. Två av de viktigaste biomekaniska egenskaperna\*\* för god tryckavlastning.
- **UNIK YTA FÖR EFFEKTIV RENGÖRING.**  
Tack vare ytskiktets unika struktur har utomstående studier visat att överdraget håller kvar upp till 73% mer desinfektionsmedel\* vid rengöring.
- **VÄTSKEAVVISANDE OCH HYGIENISKT YTSKIKT.**  
Det sömlösa Lentex-ytskiktet hindrar vätska från att nå skumkärnan och höjer hygien. Tack vare den vita, semitransparenta ytan kan personalen enkelt upptäcka eventuell kontaminering av madrasskärnan.

\* Studie, Tyskland 1999

\*\* Wounds International 2020 | Vol 11 Issue 4 | Gefen A och Soppi E, s. 39


# Comfort

## BASMADRASS MED FOKUS PÅ HYGIEN OCH KORTARE LIGGTIDER.

Comfort är en basmadrass med utmärkta hygieniska egenskaper. Madrassen är idealisk för både vårdhem och sjukhus, där behovet av enkel rengöring och hög hygien är viktigt.

### Hållbarhet och sittfunktion

Madrassen har genomgått utmattningstest enligt standard SS 876 00 11 med goda resultat. Madrassen erbjuder därmed sittfunktion med höjt ryggläge i säng.

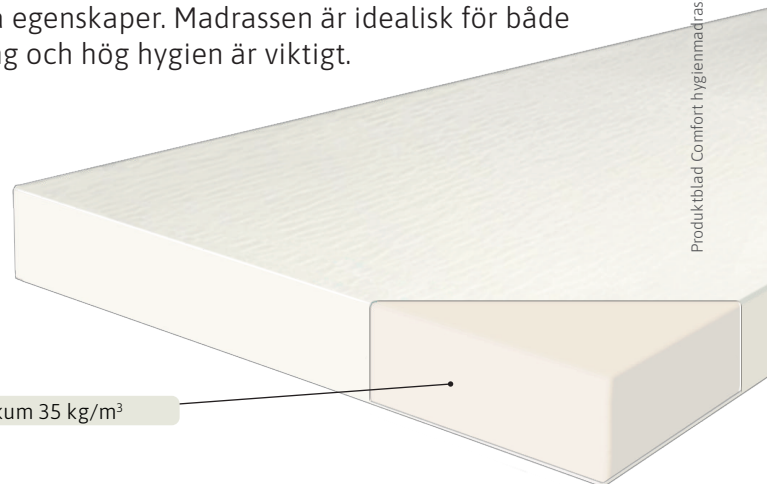

Produktblad Comfort hygienmadrass, rev. 26.06.00-SE

## STANDARD FÖR OBJEKTIV UTVÄRDERING AV MADRASSERS TRYCKFÖRDELANDE EGENSKAPER.

För att få en objektiv bedömning av madrassers tryckfördelande egenskaper har RISE\* utvecklat en mätmetod där man med intryckskroppar mäter det faktiska mottrycket en madrass ger. Mätmetoden är beskriven i Svensk standard SS 876 00 13.

Comfort har testats av RISE\* enligt SS 876 00 13 och är tryckfördelande upp till och med sårkategori 1.

Testresultaten redovisas nedan.


| Belastning               | Extra låg | Låg         | Medel       | Hög         |
|--------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Stor intryckskropp 300 N | < 30.0    | 30.0 - 34.9 | 35.0 - 39.9 | 40.0 - 44.9 |
| Stor intryckskropp 600 N | < 45.0    | 45.0 - 52.9 | 53.0 - 60.9 | 61.0 - 68.9 |
| Liten intryckskropp 40 N | < 45.0    | 45.0 - 52.9 | 53.0 - 60.9 | 61.0 - 68.9 |



| Madrass | Stor intryckskropp 300 N | Stor intryckskropp 600 N | Liten intryckskropp 40 N |
|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Comfort | 39                       | 49                       | 50                       |


\* Research Institutes of Sweden

\*\* Klassificering enligt tidigare grundförslaget i standarden

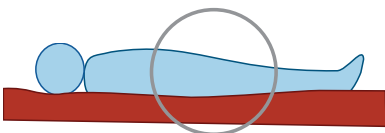


### Stor intryckskropp, 300 N

Simulerar tryck från en brukare på cirka 80 kg som ligger på rygg i sängen.

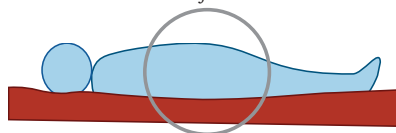

### Stor intryckskropp, 600 N

Simulerar tryck från brukare ca 120 kg, eller brukare som sitter upp alt. ligger på sidan.

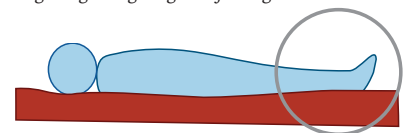

### Liten intryckskropp, 40 N

Simulerar trycket från utstickande kroppsdelar som exempelvis hälar, armbågar eller axlar.

## Produktspecifikationer

|             |   |
|-------------|---|
| Material    | 10 cm höglastiskt kallsaum 35 kg/m <sup>3</sup> , Ytskiktet Lentex® är av polyuretan.     |
| Storlekar   | 200/205/210 x 80/85/90/105/120 x 10 cm. (För andra storlekar kontakta Järven Health Care) |
| Sårkategori | Upp till och med kategori 1.  |
| Hygien      | ISO 811:2018.   |
| Madrasstätt | Godkänd för Sonosteam/Semistaal.  |

|                |  |
|----------------|--|
| Madrasvikt     | 6-8 kg beroende på längd och bredd.  |
| Max brukarvikt | 110 kg.  |
| Garanti        | 1 år på utmattning av madrasskärnans B-värde enligt SS 876 00 11. 5 år med åldersavskrivning på vidhäftningen av Lentex. |
| Brand          | SS 87600 01, normalrisk. Testmetod EN 597-1 & 2.   |



Bromsvägen 3 | 891 60 Örnsköldsvik | Sverige  
Telefon: 0660 - 22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10  
www.jarven.se | healthcare@jarven.se