



Exclusive

Stabil hygienmadrass för förebyggande av trycksår

Exclusive är en stabil hygienmadrass med det unika ytskiktet LENTEX. Den genomtänkta skumsammansättningen med en fastare skumkärna och två mjukare skum är utvecklad för att ge hög komfort och goda tryckfördelande egenskaper.

- **UPP TILL OCH MED SÅRKATEGORI 2.** Utvecklad som ett hjälpemedel i en förebyggande och behandlande trycksårsvård.
- **INGEN SEPARAT HÄLZON KRÄVS.** Det dokumenterat låga trycket för hälar och skuldror ger effektiv tryckfördelning – därav inget behov av separat hälzon.
- **UNDERLÄTTAR UPPTÄCKT AV KONTAMINERING.** Med ett Semi-transparent laminat, blir det enklare att upptäcka kontaminerade skumkärnor och det vita ytskiktet underlättar upptäckt av föroreningar.
- **UNIK YTA FÖR EFFEKTIV RENGÖRING** Tack vare ytskiktets unika struktur har utomstående studier visat att överdraget håller kvar upp till 73% mer desinfektionsmedel* vid rengöring.

* Studie, Tyskland 1999




Exclusive

STABIL HYGIENMADRASS FÖR FÖREBYGGANDE AV TRYCKSÅR.

Exclusive är en basmadrass som ger stöd och komfort och fungerar som ett hjälpmedel i förebyggande trycksårsvård. Med LENTEX-laminatet kombinerar den komfort med egenskaper som bidrar till att minska risken för trycksår.

Effektiv tryckavlastning - även i sittläge

Madrassen är testad enligt standard SS 876 00 11 för att säkerställa komfort och funktion även vid höjt ryggläge. Den trelagers skumkonstruktionen är utformad för att ge stabilt stöd och bibehållen form, både vid liggande och sittande position.

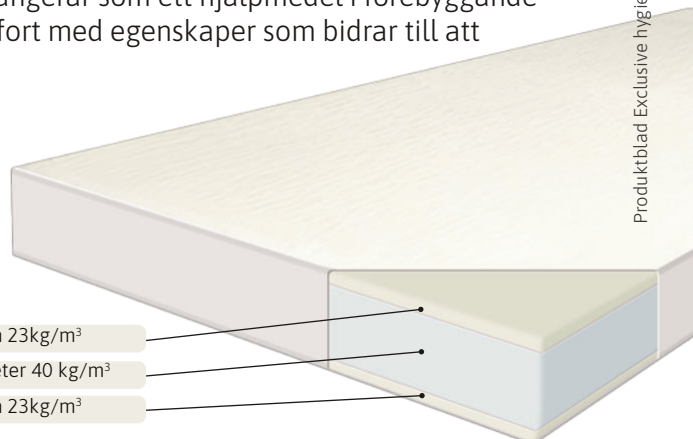

- 2 cm supersoft kallsaum 23kg/m³
- 9 cm tryckavlastande polyeter 40 kg/m³
- 2 cm supersoft kallsaum 23kg/m³



STANDARD FÖR OBJEKTIV UTVÄRDERING AV MADRASSERS TRYCKFÖRDELANDE EGENSKAPER.

För att få en objektiv bedömning av madrassers tryckfördelande egenskaper har RISE* utvecklat en mätmetod där man med intryckskroppar mäter det faktiska mottrycket en madrass ger. Mätmetoden är beskriven i Svensk standard SS 876 00 13.

Exclusive har testats av RISE* enligt mätmetod SS 876 00 13 och är tryckfördelande upp till och med sårkategori 2.


Belastning	Extra låg	Låg	Medel	Hög	**
Stor intryckskropp 300 N	< 30.0	30.0 - 34.9	35.0 - 39.9	40.0 - 44.9	
Stor intryckskropp 600 N	< 45.0	45.0 - 52.9	53.0 - 60.9	61.0 - 68.9	
Liten intryckskropp 40 N	< 45.0	45.0 - 52.9	53.0 - 60.9	61.0 - 68.9	

Testresultaten redovisas nedan.

Madrass	Stor intryckskropp 300 N	Stor intryckskropp 600 N	Liten intryckskropp 40 N
Exclusive	35	48	51


* Research Institutes of Sweden

** Klassificering enligt tidigare grundförslaget i standarden

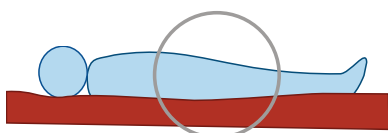


Stor intryckskropp, 300 N

Simulerar tryck från en brukare på cirka 80 kg som ligger på rygg i sängen.

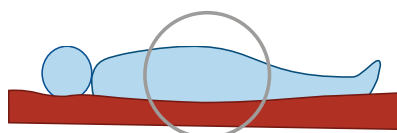

Stor intryckskropp, 600 N

Simulerar tryck från brukare ca 120 kg, eller brukare som sitter upp alt. ligger på sidan.

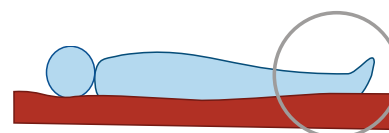

Liten intryckskropp, 40 N

Simulerar trycket från utstickande kroppsdelar som exempelvis hälar, armbågar eller axlar.

Produktspecifikationer

- Material** 2 cm supersoft kallsaum 23 kg/m³,
9 cm tryckavlastande polyeter 40 kg/m³
2 cm supersoft kallsaum 23 kg/m³.
Ytskiktet LENTEX är av polyuretan.
- Storlekar** 200/205/210 x 80/85/90/105/120 x 13 cm
(För andra storlekar kontakta Järven Health Care)
- Sårkategori** Upp till och med kategori 2.
- Hygien** SS-EN ISO 811.
- Madrassvävt** Godkänd av Sonosteam/Semistaal.

- Madrassvikt** 6-8 kg beroende på längd och bredd
- Max brukarvikt** 180 kg.
- Garanti** 3 år på utmattnings av madrasskärnans B-värde enligt SS 876 00 11.
5 år med åldersavskrivning på vidhäftningen av LENTEX.
- Brand** SS 87600 01, normalrisk. Testmetod EN 597-1 & 2.



Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN
Tel: +46 (0)660 - 22 28 50 | Fax: +46 (0) 660 824 10
www.jarven.se | healthcare@jarven.se