

# BRUKSANVISNING

SPECIALMADRASS BRAND  
& SPECIALKUDDE BRAND



## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.	Säkerhetsföreskrifter.....	3
2.	Kvalitet.....	4
2.1	CE-märkning.....	4
2.2	Kvalitetsarbete.....	4
3.	Bruksanvisningen gäller följande produkter.....	4
4.	Produktinformation.....	4
4.1	Mottagande och uppackning av produkten.....	4
4.2	Användningsområden.....	4
5.	Användning.....	5
5.1	Mottagande och uppackning av produkten.....	5
5.2	Användningsområden.....	5
5.3	Skötsel och rengöring av produkterna.....	5
5.4	Förvaring.....	6
5.5	Livslängd.....	6
5.6	Återvinning.....	6
6.	Övrigt.....	6
6.1	Produktansvar.....	6
6.2	Returer och reklamationer.....	6
6.3	Transportskador.....	6
7.	Märkning.....	7
7.1	Etiketter.....	7
7.2	Symboler.....	7

# SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

*Läs instruktionerna före ni använder våra madrasser och kuddar!*

- Järven Health Care madrasser och kuddar ska bara användas i enlighet med beskrivningen i denna bruksanvisning.
- Järven Health Care madrasser/kuddar ska inte kombineras, monteras eller repareras med andra delar, tillbehör eller reservdelar än de som beskrivs i denna bruksanvisning eller annan dokumentation från Järven Health Care.
- Madrassen/kudden ska användas så att den inte blir klämd eller skadad.
- Undvik att använda vassa föremål i närheten av madrasserna/kuddarna.
- Alla våra madrasser är brandtestade. Det är kundens ansvar att göra en riskbedömning utifrån risken för anlagd brand eller andra brandrisker och därefter välja rätt madrass. Kontakta oss gärna vid frågor.
- Försäkra er om att ni beställer rätt madrass till rätt ändamål.

## 2. KVALITET

### 2.1 CE-MÄRKNING

Produkterna som denna bruksanvisning avser är CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC, Medicintekniskt direktiv klass 1. CE-märkningen innebär att Järven Health Care har tillverkaransvaret och försäkrar att produkterna uppfyller de väsentliga kraven och att det finns teknisk dokumentation samt försäkran som ska bevaras i minst fem år. Försäkran om överensstämmelse mot väsentliga krav är lämnat till Läkemedelsverket.



### 2.2 KVALITETSARBETE

Vårt kvalitetsarbete och kundfokus förverkligas genom att vara lyhörd för våra kunders behov och förväntningar samt i alla avseenden verka för ett samarbete som bygger på långsiktighet och förtroende. Ständiga förbättringar av våra produkter och tjänster är grunden till vår förmåga att tillfredsställa kunderna i dag och i framtiden. I vårt grundläggande kvalitetsarbete ingår också att finna utvärderingsmetoder och standarder som erbjuder kunden en säkerställd kvalitet gällande komfort, funktion, hållbarhet och pris.

Järven Health Care fokuserar särskilt på att genom kompetenta och engagerade medarbetare kontinuerligt fortbilda och kompetensutveckla vårdens personal. Det är vår förhoppning att det ska leda till att de genom rätt produktval kan bedriva en högkvalitativ vård med inriktning på att förebygga trycksår, vårdrelaterade infektioner och minska bränder som uppkommer i vården.

## 3. BRUKSANVISNINGEN GÄLLER FÖLJANDE PRODUKTER

SPECIALMADRASS BRAND

SPECIALKUDDE BRAND

## 4. PRODUKTINFORMATION

### 4.1 SPECIALMADRASS BRAND/SPECIALKUDDE BRAND

Järvens Specialmadrass Brand och Specialkudde Brand är framtagna för extremt krävande och brandfarliga miljöer. Produkterna har en grundväv som består av armid, ett material som bland annat används till skottsäkra västar och som tål höga temperaturer. Överdraget av armidbaserat kompositmaterial är högfrekvenssvetsat vilket gör madrassen och kudden exceptionellt slitstarka och vätsketäta. De är också lätta att rengöra och desinficera.

Garanti: 1 år på tillverkningsfel (gäller ej i de fall där skada på madrass/kudde orsakats av mekanisk åverkan av exempelvis pennor eller andra vassa föremål).

### 4.2 BRANDSKYDD

Produkterna uppfyller alla av oss kända brandnormer i världen. Madrasskärnan 37 kg/m<sup>3</sup> är tillverkad av polyeter som uppfyller brandkrav NT-Fire 055. Innerkudden består av 100% Trevira CS, ett flammhärdat material som är brandklassad B1/M1. Överdraget motstår öppen gaslåga och glödande partiklar (900°).

Uppfyllda brandstandarder:

- SS 876 00 10 testmetod NT-Fire 055
- BS 6807:2006 Crib 7
- FAR 25.853

## 5. ANVÄNDNING

### 5.1 MOTTAGANDE OCH UPPACKNING AV PRODUKTEN

Börja med att kontrollera att produkten inte är skadad. Vid eventuell transportskada, se punkt 6.3. Ta bort förpackningen samt eventuellt skyddsmaterial. Användning av kniv bör undvikas vid hantering av förpackningen och produkten. Produkten kan användas direkt efter uppackning.

### 5.2 ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Järvens Specialmadrass Brand och Specialkudde Brand är framtagna för extremt krävande och brandfarliga miljöer. De lämpar sig väl för användning inom sektorer som polisarrester, fängelseceller, avvänjningskliniker, psykiatriska avdelningar med mera. De är extremt slitstarka, lätt att rengöra/desinficera samt helt vätsketäta.

### 5.3 SKÖTSEL OCH RENGÖRING AV PRODUKTERNA

Upprätta en inspektionsplan för revision av produkten. Kontrollera regelbundet madrassen/kudden för synliga tecken på skador eller slitage, exempelvis revor, sprickor, hål, fläckar eller färgning. Kontrollera madrassens alla sidor.

Madrassen och kudden kan rengöras med tvålbaserade rengöringsmedel. Se till att använda rätt spädningsförhållanden enligt rekommendationer för rengöringsmedlet. Använd aldrig koncentrat. Torka torrt med trasa.

Desinficering sker med alkoholbaserat rengöringsmedel med tensider. Spola därefter med vatten eller använd högtrycksspolning, max 10 Bar. Torka torrt med trasa.

Om madrasskärnan är kontaminerad (kroppsvätskor) skall madrassen omedelbart kasseras.



*Vid användning av rengöringsmedel eller andra kemikalier är det viktigt att beakta de instruktioner och säkerhetsföreskrifter som finns för respektive rengöringsmedel, se säkerhetsdatablad för de rengöringsmedel som används.*



Rengöring bör ske med tvålbaserade rengöringsmedel. Följ rengöringsmedlets bruksanvisning och rekommendationer angående säkerhet och personligt skydd o.s.v. Se till att använda rätt spädningsförhållande. Använd aldrig koncentrat.



Desinficering av madrass sker med alkoholbaserat eller liknande rengöringsmedel med tensider. OBS! Alkoholer har en uttorkande effekt och bör därför användas sparsamt. Dessa kan användas; Dax Ytdesinfektion Plus, Virkon, Perform och Dismozon Pur.



Undvik vassa föremål i närheten av madrassen.



#### 5.4 FÖRVARING

Förvara produkterna i torra, rumstempererade lokaler. Undvik direkt solljus.

#### 5.5 LIVSLÄNGD

Följ alltid våra skötselråd för produkterna för längsta möjliga livslängd med bibehållen funktion.

#### 5.6 ÅTERVINNING

Specialmadrass Brand och Specialkudde Brand är helt energiåtervinningsbara och skall sorteras som brännbart avfall. Ingen demontering är nödvändig.

## 6. ÖVRIGT

#### 6.1 PRODUKTANSVAR

Med produktansvar avses tillverkarens, importörens eller försäljarens lagstadgade skadeståndsansvar för eventuella skador som produkten orsakat. Produktansvarslagen (EU-direktiv 85/374/EEG, Svensk lag SFS 1992:18) fastställer tillverkarens, importörens eller försäljarens lagstadgade skadeståndsansvar för eventuella skador som produkten orsakat. Reglerna gäller för fysiska produkter i form av lösa föremål men även för produkter som kopplas ihop med andra lösa föremål eller fast egendom. Finns det ingen produkt som orsakat någon form av egendoms- eller personskada är produktansvarslagstiftningen inte relevant.

#### 6.2 RETURER OCH REKLAMATIONER

Reklamationer skall skriftligen anmälas till Järven Health Care. Retur av produkt skall efter godkänt reklamerationsärende ske enligt våra instruktioner. Returneras produkt innan reklamerationsärendet är godkänt räknas ärendet som avslutat och ersättning till kund betalas inte ut.

#### 6.3 TRANSPORTSKADOR

Transportskada skall noteras på fraktsedeln innan påskrift för att vara giltig. Därefter kontaktar ni kundtjänst på Järven Health Care (0660-22 28 50, [healthcare@jarven.se](mailto:healthcare@jarven.se)) och lämnar relevant information.

OBS! För snabbare behandling av ditt ärende ber vi dig fotografera transportskadan så utförligt som möjligt innan ni kontaktar kundtjänst.

## 7. MÄRKNING

### 7.1 ETIKETTER

Nedan följer exempel på produkternas märkning. Etiketternas utseende kan variera.

<b>SPECIALMADRASS BRAND</b>  <b>Järven Health Care</b> Örnsköldsvik • 0660-22 28 50 • jarven.se	<b>Artikelnr:</b>  <b>Tillverkad:</b>
<i>Uppfyller:</i> SS 876 00 10 FAP 915-1	

<b>FIRE PROOF MATTRESS</b>  <b>Järven Health Care</b> www.jarven.se - mailbox@jarven.se	<b>Art. no:</b>  <b>Manufactured:</b>
<i>Fulfills</i> - SS 876 00 10 - BS6807:2006 High Hazard	

### 7.2 SYMBOLER



Denna produkt är CE-märkt i enlighet med medicintekniskt direktiv. 93/42/EEC (Klass 1)



Denna produkt är testad och godkänd enligt BS7177:2008 High Hazard



1 års garanti på utmattning av madrasskärnans B-värde enligt SS 876 00 11



Denna produkt är vätskeavvisande



Ej autoklivering




Rengöring bör ske med tvålbaserade rengöringsmedel



Desinficering av produkten sker med alkoholbaserat eller liknande rengöringsmedel med tensider

Tillverkare:

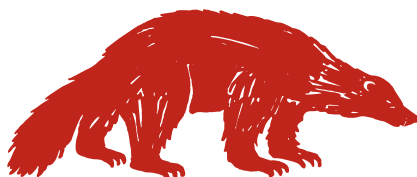

# Järven Health Care

Bromsvägen 3

SE-891 60 Örnsköldsvik

SWEDEN

Telefon: 0660-22 28 50

Telefax: 0660-824 10

E-post: [healthcare@jarven.se](mailto:healthcare@jarven.se)

**[www.jarven.se](http://www.jarven.se)**

Distributör: