

Bruksanvisning

Järven Räddningsmadrass



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Säkerhetsföreskrifter	4
2. Kvalitet	5
2.1 CE-märkning	5
2.2 Kvalitetsarbete	5
3. Bruksanvisningen gäller följande produkter	5
4. Produktinformation	6
4.1 Järven Räddningsmadrass	6
4.2 Brandskydd	6
4.3 Mottagande och uppackning av ditt nya räddningsmadrass	6
5. Avsedd användning	6
5.1 Evakuering med Järven Räddningsmadrass	7
5.2 Skötsel och rengöring av din räddningsmadrass	8
5.3 Förvaring	9
5.4 Livslängd	9
5.5 Återvinning	9
6. Övrigt	9
6.1 Produktansvar	9
6.2 Returer och reklamationer	9
6.3 Transportskador	9
7. Märkning	10
7.1 Etiketter	10
7.2 Symboler	10

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs instruktionerna före ni använder våra produkter!

- Produkten ska bara användas i enlighet med beskrivningen i denna bruksanvisning.
- Produkten ska inte kombineras, monteras eller repareras med andra delar, tillbehör eller reservdelar än de som beskrivs i denna bruksanvisning eller annan dokumentation från Järven Health Care.
- Produkten ska användas så att den inte blir klämd eller skadad.
- Undvik att använda vassa föremål i närheten av produkten.
- Järven Räddningsmadrass är brandtestad. Det är kundens ansvar att göra riskbedömning utifrån risken för anlagd brand eller andra brandrisker och därefter välja rätt produkt. Kontakta oss gärna vid frågor.
- För att undvika skador får inte produkten komma i kontakt med varma källor eller eld, till exempel glödande/brinnande cigaretter, varma lampor eller liknande.
- Försäkra er om att ni beställer rätt produkt till rätt ändamål.
- Personal som utför evakuering bör ha adekvat utbildning. På jarven.se finns en instruktionsfilm som även kan beställas kostnadsfritt.
- Efter evakuering måste madrassen kontrolleras noggrant för eventuella skador. Är du osäker? Kontakta Järven Health Care; 0660-22 28 50, healthcare@jarven.se
- **BÄR EJ BRUKAREN PÅ MADRASSEN!**

2. KVALITET

2.1 CE-MÄRKNING

Järvens Räddningsmadrass är CE-märkt enligt MDR 2017/745. Märkningen innebär att Järven Health Care har tillverkaransvaret och försäkrar att produkten uppfyller de väsentliga kraven samt att det finns teknisk dokumentation samt försäkran som ska bevaras i minst tio år.



2.2 KVALITETSARBETE

Vårt kvalitetsarbete och kundfokus förverkligas genom att vara lyhörd för våra kunders behov och förväntningar samt i alla avseenden verka för ett samarbete som bygger på långsiktighet och förtroende. Ständiga förbättringar av våra produkter och tjänster är grunden till vår förmåga att tillfredsställa kunderna i dag och i framtiden. I vårt grundläggande kvalitetsarbete ingår också att finna utvärderingsmetoder och standarder som erbjuder kunden en säkerställd kvalitet gällande komfort, funktion, hållbarhet och pris.

Järven Health Care fokuserar särskilt på att genom kompetenta och engagerade medarbetare kontinuerligt fortbilda och kompetensutveckla vårdens personal. Det är vår förhoppning att det ska leda till att de genom rätt produktval kan bedriva en högkvalitativ vård med inriktning på att förebygga trycksår, vårdrelaterade infektioner och minska bränder som uppkommer i vården.

3. BRUKSANVISNINGEN GÄLLER

- Järvens Räddningsmadrass

4. PRODUKTINFORMATION

4.1 JÄRVEN RÄDDNINGSMADRASS

Räddningsmadrassen kan användas för en snabb och säker evakuering av personer som inte själva kan ta sig ut vid brand eller annan fara. Med räddningsmadrassen kan en person med några enkla handgrepp själv evakuera en nödställd och ger en extra trygghet för dig som har en verksamhet där en evakuering kan innefatta skadade, funktions- och/eller rörelsehindrade.

Räddningsmadrassen är liksidigt utformad med en undersida som glider lika bra på vått som torrt. Den är röntgentransparent och försedd med kardborreband som ger en stadig fixering. Undersidan är värmereflekterande. Storlek 190x48x8 cm

4.2 BRANDSKYDD

Järven Räddningsmadrass är testad och uppfyller relevanta delar i SS 876 00 39:2012. SS 876 00 01, EN 597-1.

4.3 MOTTAGANDE OCH UPPACKNING AV DIN NYA RÄDDNINGSMADRASS

Börja med att kontrollera att produkten inte är skadad. Vid eventuell transportskada, se punkt 6.3. Ta bort plastförpackningen samt eventuellt skyddsmaterial. Användning av kniv bör undvikas vid hantering av förpackningen och produkten. Räddningsmadrassen kan därefter utplaceras och användas direkt.

5. AVSEDD ANVÄNDNING

Järvens Räddningsmadrass är avsedd att användas för evakuering av patient vid brand eller annan fara, när ingen annan evakueringsmöjlighet ges.


Kan användas i alla vårdmiljöer, men rekommenderas EJ till utåtagerande patienter eller patienter med självskadebeteende då madrassen har fixeringsband som kan användas för självskada. Vid självskadebeteende rekommenderar vi att räddningsmadrassen placeras så den endast är åtkomlig för personal.

Järvens Räddningsmadrass är avsedd för att dra brukaren efter golvet, ej för att lyfta.

5.1 EVAKUERING MED JÄRVEN RÄDDNINGSMADRASS

EVAKUERA FRÅN SÄNG

- 1 Informera brukaren om vad som händer.
- 2 Sänk sängen maximalt och lås den i läge för en säkrare evakuering.
- 3 Se till att du har vänt madrassen rätt. Madrassen är märkt med "DENNA SIDA UPP". Det spelar ingen roll hur du vänder madrassen i fot/huvud-led.
- 4 Använd det befintliga lakanet i sängen för att vända brukaren i position så att du kan lägga räddningsmadrassen under brukaren.
- 5 Dra sen lakanet med brukaren upp på räddningsmadrassen.
- 6 Använd spännbanden för att fixera madrassen runt brukaren.
- 7 Använd de yttre handtaget i fotändan för att dra madrassen ut från sängen och ner på golvet.

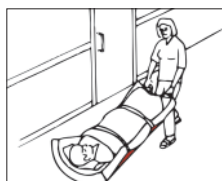

EVAKUERING PÅ PLANT UNDERLAG

- 1 Dra madrassen med handtagen i fotändan.
- 2 Luta kroppen lätt bakåt. Detta underlättar arbetet och avlastar armarna.
- 3 Gå i normal hastighet - spring inte!



EVAKUERING I TRAPPOR

- 1 Gå baklänges tills större delen av madrassen har glidit ner över det översta trappsteget.
- 2 Vänd dig helt om så att du har blicken i färdriktningen, utan att släppa taget om madrassen.
- 3 Håll en hand stadigt på ledstången och dra med den andra handen.
- 4 Följ trappen nedåt och låt madrassen stoppa mot dina ben vid behov.
- 5 Gå nedåt i normal hastighet - spring inte!



Personal som utför evakuering bör ha adekvat utbildning.

5.2 SKÖTSEL OCH RENGÖRING



**Efter evakuering måste alla sömmar kontrolleras noggrant.
Är du osäker? Kontakta Järven Health Care; 0660-22 28 50, healthcare@jarven.se**

Torka av madrassen med tvålbaserat rengöringsmedel och vatten. Se till att använda rätt spädningförhållanden enligt rekommendationer för rengöringsmedlet. Använd aldrig koncentrat.

Klorhaltiga preparat får ej användas!

Desinficering sker med alkoholbaserat rengöringsmedel med tensider.



Vid användning av rengöringsmedel eller andra kemikalier är det viktigt att beakta de instruktioner och säkerhetsföreskrifter som finns för respektive rengöringsmedel, se säkerhetsdatablad för de rengöringsmedel som används.



Rengöring bör ske med tvålbaserade rengöringsmedel. Följ rengöringsmedlets bruksanvisning och rekommendationer angående säkerhet och personligt skydd o.s.v. Se till att använda rätt spädningförhållande. Använd aldrig koncentrat.



Under inga omständigheter får klorhaltiga preparat användas!



Desinficering sker med alkoholbaserat eller liknande rengöringsmedel med tensider. OBS! Alkoholer har en uttorkande effekt och bör därför användas sparsamt. Dessa kan användas; Dax Ytdesinfektion Plus, Virkon, Perform och Dismozon Pur.



Undvik vassa föremål i närheten av räddningsmadrassen.



Autoklavering avrådes då det åldrar madrassen i förtid.



Skulle odör kvarstå efter det att madrassen rengjorts, ta lite citronessens på en fuktig trasa och torka av madrassen.

5.3 FÖRVARING

Förvara räddningsmadrassen i torra, rumstempererade lokaler. Undvik att utsätta madrassen för direkt solljus.

5.4 LIVSLÄNGD

Följ alltid våra skötselråd på räddningsmadrassen för längsta möjliga livslängd med bibehållen säkerhet och funktion. Uppskattad livslängd, om skötselråden följs, är 5 år.

5.5 ÅTERVINNING

Järven Räddningsmadrass är helt energiåtervinningsbart och skall sorteras som brännbart avfall. Ingen demontering är nödvändig.

6. ÖVRIGT

6.1 PRODUKTANSVAR

Med produktansvar avses tillverkarens, importörens eller försäljarens lagstadgade skadeståndsansvar för eventuella skador som produkten orsakat. Produktansvarslagen (EU-direktiv 85/374/EEG, Svensk lag SFS 1992:18) fastställer tillverkarens, importörens eller försäljarens lagstadgade skadeståndsansvar för eventuella skador som produkten orsakat. Reglerna gäller för fysiska produkter i form av lösa föremål men även för produkter som kopplas ihop med andra lösa föremål eller fast egendom. Finns det ingen produkt som orsakat någon form av egendoms- eller personskada är produktansvarslagstiftningen inte relevant.

6.2 RETURER OCH REKLAMATIONER

Reklamationer skall skriftligen anmälas till Järven Health Care. Retur av produkt skall efter godkänt reklamationsärende ske enligt våra instruktioner. Returneras produkt innan reklamationsärendet är godkänt räknas ärendet som avslutat och ersättning till kund betalas inte ut.

6.3 TRANSPORTSKADOR

Transportskada skall noteras på fraktsedeln innan påskrift för att vara giltig. Därefter kontaktar ni kundtjänst på Järven Health Care (0660-22 28 50, healthcare@jarven.se) och lämnar relevant information.

OBS! För snabbare behandling av ditt ärende ber vi dig fotografera transportskadan så utförligt som möjligt innan ni kontaktar kundtjänst.

7. MÄRKNING

Nedan följer ett exempel på hur räddningsmadrassen är märkt. Etikettens utseende kan variera. Räddningsmadrassen är märkt med instruktioner, skötselråd samt tillverkarens kontaktuppgifter.

7.1 ETIKETT



7.2 SYMBOLFÖRKLARING



Anger produktens artikelnummer



Batchnummer



Tillverkningsdatum



Läs bruksanvisningen för viktig varningsinformation



Detta är en Medicinteknisk produkt



Tillverkare



Rengöring bär ske med tvålbaseerade medel



Desinficering ske med alkoholbaseerade medel



Under inga omständigheter får klorhaltiga preparat användas!



Undvik vassa föremål



Denna produkt är CE-märkt enligt MDR 2017/745

7.3 TILLBEHÖR

11-020100-001 Räddningsmadrasskylt + fäste





Distributör:



Järven Health Care

Bromsvägen 3
SE-891 60 Örnsköldsvik
SWEDEN

Telefon: 0660-22 28 50
Telefax: 0660-824 10
E-post: healthcare@jarven.se

Räddningsmadrass Bruksanvisning. Alla varumärken tillhör respektive ägare.

Järven AB förbehåller sig rätten att uppdatera denna bruksanvisning vid behov och/eller påträffande av eventuella stav- eller faktafel.

**Ytterligare exemplar kan beställas från Järven Health Care.
Kopiering för internt bruk är tillåten.**