

# EXCLUSIVE



Trycksårspåbyggande madrass i 3 skikt



Ytskiktet  
Lentex för ökad  
komfort

Utan sömmar  
och dragkedjor  
för ökad hygien

Andas genom  
Active membrane  
teknik

Förebygger  
trycksår upp till  
sårkategori 2

# BESKRIVNING – EXCLUSIVE

Exclusive är en 3-skikts hygienmadrass med en fastare kärna omsluten av mjukare skum för att ge en högre komfort och bättre tryckavlastande egenskaper. Madrassen har goda hygieniska egenskaper och är även utrustad med vårt unika ytskikt Lentex®.

## Hygienmadrass


Madrassen har ett laminerat ytskikt av Lentex® och saknar därför helt sömmar och dragkedjor vilket ger ökade förutsättningar för god hygien. Det vita ytskiktet underlättar dessutom för personal att upptäcka föroreningar på madrassens yta som, vid kontaminering, snabbt kan rengöras genom avtorkning och desinficering. Ytskiktet är vätskeavvisande och tätt. Madrassens Active Membrane-teknologi gör att madrassen andas samtidigt som risken att vätska kan tränga in minskar.

## Tryckavlastande funktioner

Vårt unika ytskikt Lentex® är tillsammans med skumkärnan utvecklat för att minska trycket mot patienten samt ge en god komfort. Exclusive är tryckavlastande upp till och med särkategori 2.

För att få en objektiv bedömning har samtliga Lentexmadrasser testats av Swerea MF enligt mätmetod SS 876 00 13.

## Resultaten redovisas nedan.

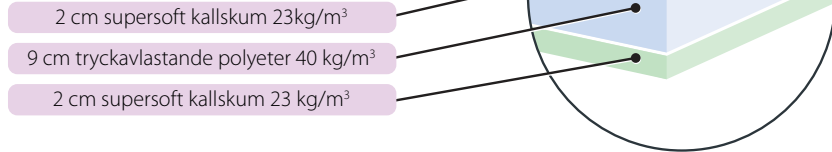

Madrass	Stor intryckskropp 300 N	Stor intryckskropp 600 N	Liten intryckskropp 40 N
Exclusive	35,9	53,0	59,2

## FAKTA TRYCKMÄTNING

För att komma ifrån individuell inverkan från olika människor har Swerea IVF utvecklat intryckskroppar, som simulerar formen hos valda delar av människokroppen. Genom att ge dessa intryckskroppar en belastning, som är representativ för en medeltung människokropp kan man med hjälp av tryckmattor på ett objektivt sätt värdera olika madrasser och sängar. Mätmetoden är beskriven i Svensk standard med beteckningen SS 876 00 13

## Klassificering av tryckresultat för madrasser i nyskick

Belastning	Extra låg	Låg	Medel	Hög
Stor intryckskropp 300 N	< 30,0	30,0 - 34,9	35,0 - 39,9	40,0 - 44,9
Stor intryckskropp 600 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9
Liten intryckskropp 40 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9

# PRODUKTSPECIFIKATIONER

<b>Material</b>	2 cm supersoft kallsaum 23 kg/m <sup>3</sup> . 9 cm tryckavlastande polyeter 40 kg/m <sup>3</sup> 2 cm supersoft kallsaum 23 kg/m <sup>3</sup> . Ytskiktet Lentex® är av polyuretan.
<b>Storlekar</b>	195/200/210 x 80/85/90 x 10 cm (Önskas andra storlekar vänligen kontakta Järven Health Care.)
<b>Särkategori</b>	Till och med kategori 2.
<b>Madrassvikt</b>	6 kg beroende på längd och bredd (standardstorlek)
<b>Hygien</b>	SS-EN 2081 1.

<b>Brukarvikt</b>	1 - 150 kg.
<b>Garanti</b>	3 år på utmattning av madrasskärnans B-värde enligt SS 876 00 11. 5 år på vidhäftningen av Lentex.
<b>Brandstandard</b>	SS 87600 01, testmetod NT-Fire 037 A+B.
<b>Återvinning</b>	Helt återvinningsbar. Sorteras som brännbart avfall. Demontering krävs ej.
<b>Märkning</b>	Tillverkningsår, månad, dag, EAN, skötselansvisningar, kontaktinformation, standarder & placering i säng.



certified for use with Sonosteam/Semi Staal



Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN  
Telefon: 0660 - 22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10  
www.jarven.se | healthcare@jarven.se