

MELISSA 12



Melissa 12 är en 12 cm tjock madrass utvecklad för att förebygga trycksår (sårkategori 1 och 2). Madrassens höglastiska kallskum (homogen kärna, volymvikt 50 kg/m³) erbjuder god komfort.

Det tvåstretchiga hygienöverdraget i kombination med den väl utvalda högkvalitativa kallskummen minskar risken för skjuv. Madrassens kärna ger avlastning åt utstickande kroppsdelar såsom axlar, hälar och armbågar. Melissa 12 är roter- och vändbar.

VÄLJ HYGIENÖVERDRAG TILL DIN MADRASS

RX-SERIEN

Våra RX hygienöverdrag är vätsketäta och förhindrar att urin, blod m.m. tränger igenom i till madrasskärnan. Hygienöverdragen är ånggenomsläppliga och tillverkade av en prasselfri, 2-stretchig poluretanväv med sydd dragkedja på 3 eller 4 sidor (RXI-5) för att underlätta av- och påtagning vid tvätt. RX-överdragen finns i tre varianter.

- RX-5 standardöverdrag
- RXH-5 med handtag.
- RXI-5 med handtag och inbyggd evakueringsfunktion.

Av hygienskäl har dragkedjorna på samtliga överdrag droppkant.



Produktspecifikationer

STANDARDSTORLEKAR 200/205/210x80/85/90/100/105/120x12 cm.
För andra storlekar vänligen kontakta Järven Health Care.

MADRASSVIKT ca 13 kg beroende på madrassens mått.

GARANTI - Madrasskärnan 4 år på utmattning av madrasskärnans B-värde enligt SS 876 00 11.

GARANTI - överdrag 3 år på tillverkningsfel.

Melissa 12 är trycktestat av det oberoende testinstitutet Swerea IF

för att ge en objektiv bedömning madrassens trycksår-förebyggande egenskaper. Se nedan för resultat.

BRUKARVIKT 1-150 kg.

SÅRKATEGORI 1 - 2

BRANDSTANDARD Madrasserna är testade och uppfyller SS 876 00 01, EN 597-1 & 2.

ÅTERVINNING Madrassen med överdrag är helt återvinningsbar och skall sorteras som brännbart avfall. Ingen demontering är nödvändig.

MÄRKNING tillverkningsår, månad, vecka, EAN, skötselansvisningar, uppfyllda standarder samt placering i säng.

Madras	Stor intryckskropp 300 N	Stor intryckskropp 600 N	Liten intryckskropp 40 N
Melissa 12	27	47	45

FAKTA TRYCKMÄTNING

För att komma ifrån individuell inverkan från olika människor har Swerea IVF utvecklat intryckskroppar, som simulerar formen hos valda delar av människokroppen. Genom att ge dessa intryckskroppar en belastning, som är representativ för en medeltung människokropp kan man med hjälp av tryckmattor på ett objektivt sätt värdera olika madrasser och sängar. Mätmetoden är beskriven i Svensk standard med beteckningen SS 876 00 13

Klassificering av tryckresultat för madrasser i nyskick

Belastning	Extra låg	Låg	Medel	Hög
Stor intryckskropp 300 N	< 30,0	30,0 - 34,9	35,0 - 39,9	40,0 - 44,9
Stor intryckskropp 600 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9
Liten intryckskropp 40 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9

MELISSA är Järven Health Cares produktserie tryckavlastande standardmadrasser med hygienöverdrag.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

