

WATERLILY

Vår madrass med lägst miljöpåverkan



Ytskiktet
Lentex för ökad
komfort

Utan sömmar
och dragkedjor
för ökad hygien

Andas genom
Active membrane
teknik

Förebygger
trycksår upp till
sårkategori 2

LENTEX är vår produktserie med hygienmadrasser och tillhörande produkter med vårt unika Lentex® Technology ytskikt.

BESKRIVNING – WATERLILY

Waterlily är en spänstig och flexibel madrass som lämpar sig väl för tyngre patienter. Madrassens kärna består av MDI-skum, ett högkvalitativt volymviktsskum med goda miljöegenskaper. Waterlily är den enda, av oss kända, madrassen som genomgått en livscykelanalys avseende miljöpåverkan. Kontakta oss för mer information om Waterlily och vår livscykelanalys.

Hygienmadrass

Waterlily har ett laminerat ytskikt av Lentex® och saknar därför helt sömmar och dragkedjor vilket ger ökade förutsättningar för god hygien. Det vita ytskiktet underlättar dessutom för personal att upptäcka föroreningar på madrassens yta som, vid kontaminering, snabbt kan rengöras genom avtorkning och desinficering. Ytskiktet är vätskeavvisande och tätt. Madrassens Active Membrane-teknologi gör att madrassen andas samtidigt som risken att vätska kan tränga in minskar.


Tryckavlastande funktioner

Vårt unika ytskikt Lentex® är tillsammans med skumkärnan utvecklat för att minska trycket mot patienten samt ge en god komfort. Waterlily är tryckavlastande upp till och med sårkategori 2.

För att få en objektiv bedömning har samtliga Lentexmadrasser testats av Swerea MF enligt mätmetod SS 876 00 13.

Resultaten redovisas nedan.

12 cm homogent MDI-skum 53kg/m³

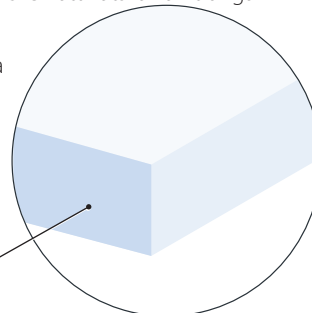

Madrass	Stor intryckskropp 300 N	Stor intryckskropp 600 N	Liten intryckskropp 40 N
Waterlily	30,1	55,9	56,4

FAKTA TRYCKMÄTNING

För att komma ifrån individuell inverkan från olika människor har Swerea IVF utvecklat intryckskroppar, som simulerar formen hos valda delar av människokroppen. Genom att ge dessa intryckskroppar en belastning, som är representativ för en medeltung människokropp kan man med hjälp av tryckmattor på ett objektivt sätt värdera olika madrasser och sängar. Mätmetoden är beskriven i Svensk standard med beteckningen SS 876 00 13

Klassificering av tryckresultat för madrasser i nyskick

Belastning	Extra låg	Låg	Medel	Hög
Stor intryckskropp 300 N	< 30,0	30,0 - 34,9	35,0 - 39,9	40,0 - 44,9
Stor intryckskropp 600 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9
Liten intryckskropp 40 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Material	Madrasskärnan är uppbyggd av 12 cm homogent MDI-skum, 53 kg/m ³ . Ytskiktet Lentex® är av polyuretan.
Storlekar	200 x 80/85/90 x 12 cm (Önskas andra storlekar vänligen kontakta Järven Health Care.)
Sårkategori	Till och med kategori 2.
Madrassvikt	10 kg beroende på längd och bredd. (standardstorlekar)
Hygien	Uppfyller standard SS-EN 20811.

Brukarvikt	1 - 150 kg.
Garanti	3 år på utmattning av madrasskärnans B-värde enligt SS 876 00 11. 5 år på vidhäftningen av Lentex.
Brandstandard	SS 87600 01, normalrisk. Testmetod EN 597-1 & 2.
Återvinning	Helt återvinningsbar. Sorteras som brännbart avfall. Demontering krävs ej.
Märkning	Tillverkningsår, månad, dag, EAN, skötselanvisningar, kontaktinformation, standarder & placering i säng.



Järven Health Care

Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN
Telefon: 0660 - 22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10
www.jarven.se | healthcare@jarven.se