




BRUKSANVISNING

PREVENTA HÖGLÄGESKUDDE

PREVENTA KILKUDDE

PREVENTA FLEXDYNA

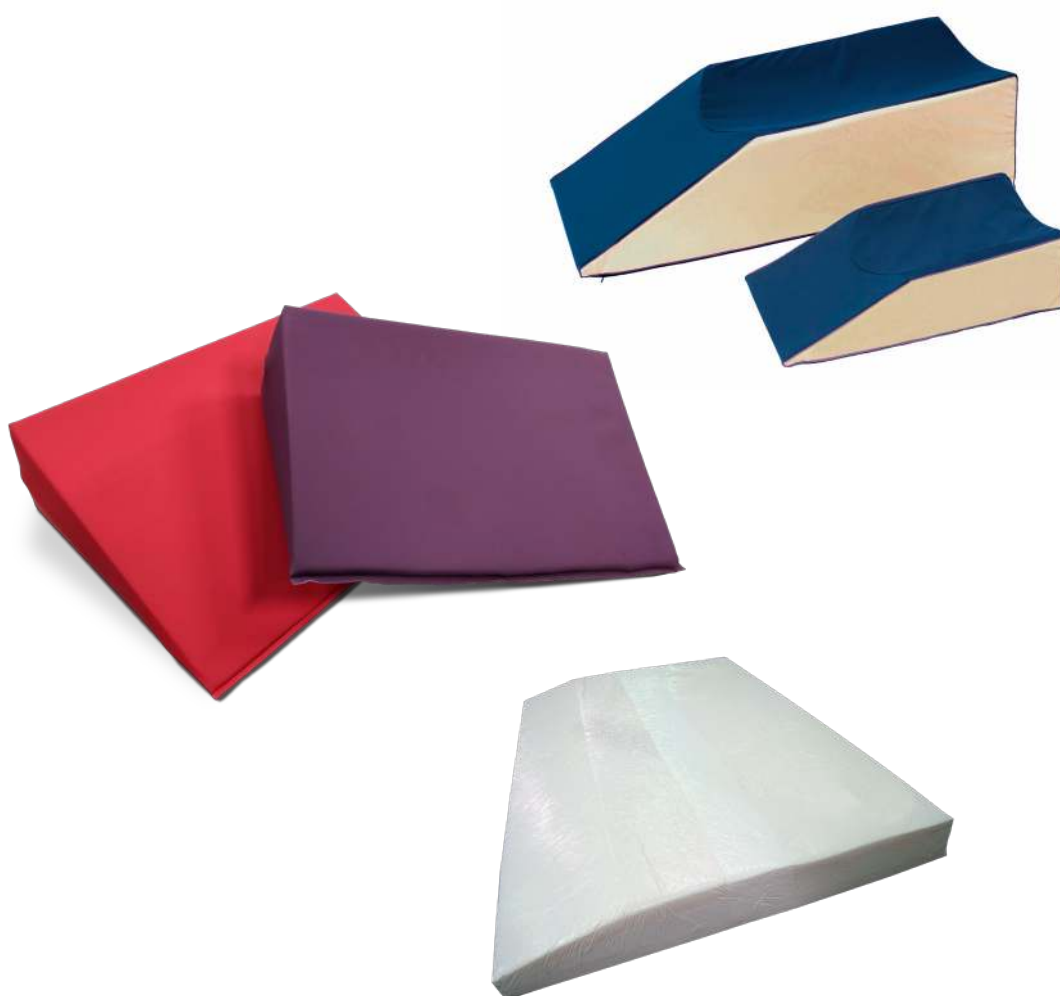

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.	Säkerhetsföreskrifter	3
2.	Kvalitet	4
2.1	CE-märkning	4
2.2	Kvalitetsarbete	4
3.	Bruksanvisningen gäller följande produkter	4
4.	Produktinformation	4
4.1	PREVENTA Höglägeskudde	4
4.2	PREVENTA Kilkudde	4
4.3	PREVENTA Flexdyna	4
5.	Avsedd användning.....	4
5.1	Mottagande och uppackning av produkten	5
5.2	Användningsområden	5
5.3	Skötsel och rengöring av produkten	5
5.4	Förvaring	6
5.5	Livslängd	6
5.6	Återvinning	6
6.	Övrigt	6
6.1	Produktansvar	6
6.2	Returer och reklamationer	6
6.3	Transportskador	6
7.	Märkning	7
7.1	Etiketter	7
7.2	Symboler	7

1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs instruktionerna före ni använder våra produkter!

- Produkten ska bara användas i enlighet med beskrivningen i denna bruksanvisning.
- Produkten ska inte kombineras, monteras eller repareras med andra delar, tillbehör eller reservdelar än de som beskrivs i denna bruksanvisning eller annan dokumentation från Järven Health Care.
- Undvik att använda vassa föremål i närheten av produkten.
- För att undvika skador får inte produkten komma i kontakt med varma källor eller eld, till exempel glödande/brinnande cigaretter, varma lampor eller liknande.
- Ingen annan plast får ligga i direkt kontakt med ytskiktet då risken för migrering är stor (Migrering=vandring av mjukgörare, färger m.m. mellan plaster). Detta kan leda till uttorkning av skiktets mjukgörare och därigenom orsaka sprickor.
- Försäkra er om att ni beställer rätt produkt till rätt ändamål.

2. KVALITET

2.1 CE-MÄRKNING

Järvens Health Cares madrasser och överdrag är CE-märkta enligt MDR 2017/745 Medicintekniskt direktiv klass 1. Märkningen innebär att JärvenHealth Care har tillverkaransvaret och försäkrar att produkten uppfyller de väsentliga kraven samt att det finns teknisk dokumentation samt försäkran som ska bevaras i minst tio år.



2.2 KVALITETSARBETE

Vårt kvalitetsarbete och kundfokus förverkligas genom att vara lyhörd för våra kunders behov och förväntningar samt i alla avseenden verka för ett samarbete som bygger på långsiktighet och förtroende. Ständiga förbättringar av våra produkter och tjänster är grunden till vår förmåga att tillfredsställa kunderna i dag och i framtiden. I vårt grundläggande kvalitetsarbete ingår också att finna utvärderingsmetoder och standarder som erbjuder kunden en säkerställd kvalitet gällande komfort, funktion, hållbarhet och pris.

Järven Health Care fokuserar särskilt på att genom kompetenta och engagerade medarbetare kontinuerligt fortbilda och kompetensutveckla vårdens personal. Det är vår förhoppning att det ska leda till att de genom rätt produktval kan bedriva en högkvalitativ vård med inriktning på att förebygga trycksår, vårdrelaterade infektioner och minska bränder som uppkommer i vården.

3. BRUKSANVISNINGEN GÄLLER FÖLJANDE PRODUKTER

- PREVENTA HÖGLÄGESKUDDE
- PREVENTA KILKUDDE
- PREVENTA FLEXDYNA

4. PRODUKTINFORMATION

4.1 PREVENTA HÖGLÄGESKUDDE

PREVENTA höglägeskuddar har ett överdrag av PU-material. Överdraget är mjukt och bekvämt samt lätt att rengöra. Överdraget är försett med dragkedja vilket gör det lättare att ta av och på. Mönsterskyddad nummer: 76948

4.2 PREVENTA KILKUDDE

PREVENTA Kilkuddar finns i olika storlekar och i två olika färger; lila och röd.

4.3 PREVENTA FLEXDYNA

PREVENTA Flexdyna är tillverkad i noga utvald trögsaum och finns i två storlekar. Den avfasade är till för tyngre brukare (ca. 85-130kg) och den andra för lättare brukare.

5. AVSEDD ANVÄNDNING

5.1 MOTTAGANDE OCH UPPACKNING AV PRODUKTEN

Börja med att kontrollera att produkten inte är skadad. Vid eventuell transportskada, se punkt 6.3. Ta bort förpackningen samt eventuellt skyddsmaterial. Användning av kniv bör undvikas vid hantering av förpackningen och produkten. Produkten kan användas direkt efter uppackning.

5.2 ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

PREVENTA Höglägeskudde är utvecklad som ett hjälpmedel för att försöka minska svullnader samt smärtor i underben och fot. Detta för att minska riskerna för compartment syndrom. Den används också vid behandling av fot-/underbensfrakturer. Den lilla modellen används på samma sätt samt vid avlastning/högläge för arm. PREVENTA Kilkuddar hjälper dig att positionera och avlasta din patient och kan minska risken för trycksår. PREVENTA kilkuddar kan användas som sidostöd eller för att förhöja huvud- eller fotända.

PREVENTA Flexdyna används i trycksårspåbyggande syfte och har många användningsområden. Dynan kompletterar den förebyggande madrassen när det behövs en extra trycksårspåbyggande åtgärd.

5.3 SKÖTSEL OCH RENGÖRING AV PRODUKTEN

Kontrollera regelbundet produkten för synliga tecken på skador eller slitage, exempelvis revor, sprickor, hål, fläckar eller färgning.

Ytskiktet rengöres med tvålbaseerade rengöringsmedel. Se till att använda rätt spädningsförhållanden enligt rekommendationer för rengöringsmedlet. Använd aldrig koncentrat.

Klorhaltiga preparat får ej användas!

Desinficering sker med alkoholbaserat rengöringsmedel med tensider.

Ingen annan plast får ligga i direkt kontakt med produkter då risken för migrering är stor.

Detta kan leda till uttorkning av skiktets mjukgörare och därigenom orsaka sprickor.

(Migrering=vandring av mjukgörare, färger m.m. mellan plaster).

Sköljmedel/mjukgörare förstör ytskiktets vätsketätthet och får EJ användas.

Vid användning av rengöringsmedel eller andra kemikalier är det viktigt att beakta de instruktioner och säkerhetsföreskrifter som finns för respektive rengöringsmedel, se säkerhetsdata blad för de rengöringsmedel som används.




Rengöring bör ske med tvålbaseerade rengöringsmedel. Följ rengöringsmedlets bruksanvisning och rekommendationer angående säkerhet och personligt skydd o.s.v. Se till att använda rätt spädningsförhållande. Använd aldrig koncentrat.



Desinficering sker med alkoholbaserat eller liknande rengöringsmedel med tensider. OBS! Alkohol har en uttorkande effekt och bör därför användas sparsamt. Dessa kan användas; Dax Ytinfektion Plus, Virkon, Perform och Dismozon Pur.




Under inga omständigheter får klorhaltiga preparat användas!

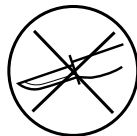

Undvik vassa föremål i närheten av produkterna.



Får ej strykas

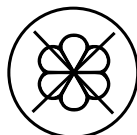

Ej sköljmedel

5.4 FÖRVARING

Förvara produkterna i torra, rumstempererade lokaler. Undvik direkt solljus.

5.5 FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD

Följ alltid våra skötselråd för produkterna för längsta möjliga livslängd med bibehållen funktion. Förväntad livslängd är 5 år.

5.6 ÅTERVINNING

PREVENTA höglägeskuddar-, kilkuddar- och flexdynor är helt energiåtervinningsbara och skall sorteras som brännbart avfall. Ingen demontering är nödvändig.

6. ÖVRIGT

6.1 PRODUKTANSVAR

Med produktansvar avses tillverkarens, importörens eller försäljarens lagstadgade skadestånds ansvar för eventuella skador som produkten orsakat. Produktansvarslagen (EU-direktiv 85/374/EEG, Svensk lag SFS 1992:18) fastställer tillverkarens, importörens eller försäljarens lagstadgade skadeståndsansvar för eventuella skador som produkten orsakat. Reglerna gäller för fysiska produkter i form av lösa föremål men även för produkter som kopplas ihop med andra lösa föremål eller fast egendom. Finns det ingen produkt som orsakat någon form av egendoms- eller personskada är produktansvarslagstiftningen inte relevant.

6.2 RETURER OCH REKLAMATIONER

Reklamationer skall skriftligen anmälas till Järven Health Care. Retur av produkt skall efter godkänt reklamationens ärende ske enligt våra instruktioner. Returneras produkt innan reklamationens ärende är godkänt räknas ärendet som avslutat och ersättning till kund betalas inte ut.

6.3 TRANSPORTSKADOR

Transportskada skall noteras på fraktsedeln innan påskrift för att vara giltig. Därefter kontaktar ni kundtjänst på Järven Health Care (0660-22 28 50, healthcare@jarven.se) och lämnar relevant information.

OBS! För snabbare behandling av ditt ärende ber vi dig fotografera transportskadan så utförligt som möjligt innan ni kontaktar kundtjänst.

7. MÄRKNING

7.1 ETIKETTER

Nedan följer exempel på produkternas märkning. Etikettens utseende kan variera.



7.2 SYMBOLER



Anger artikelnummer



Anger batchnummer




Produkten är en medicinteknisk produkt



Anger tillverkningsdatum



Anger tillverkare

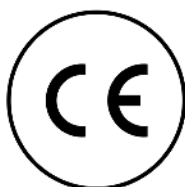

Denna produkt är CE-märkt enligt MDR 2017/745




Läs bruksanvisningen innan användning




Rengöring bör ske med tvålbaseerade rengöringsmedel




Desinficering av produkten sker med alkoholbaserat eller liknande rengöringsmedel med tensider

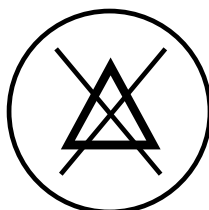


Under inga omständigheter får klorhaltiga preparat användas!

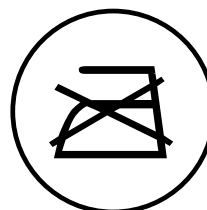

Ej strykning

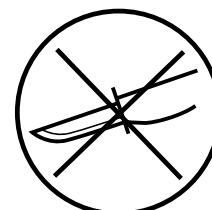

Undvik vassa föremål

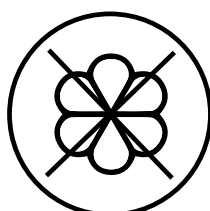

Ej sköljmedel

Distributör:



Järven Health Care



Järven Health Care
Bromsvägen 3
SE-891 60 Örnsköldsvik, SWEDEN

Telefon: 0660-22 28 50
Telefax: 0660-824 10
E-post: healthcare@jarven.se

www.jarven.se