

# BRUKSANVISNING

PREVENTA OMLÄGGNINGSKUDDE



## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.	Säkerhetsföreskrifter.....	3
2.	Kvalitet.....	4
2.1	CE-märkning.....	4
2.2	Kvalitetsarbete.....	4
3.	Bruksanvisningen gäller följande produkter.....	4
4.	Produktinformation.....	4
4.1	PREVENTA Omläggningsskudde.....	4
5.	Användning.....	5
5.1	Mottagande och uppackning av produkten.....	5
5.2	Användningsområden och avsedd användning.....	5
5.3	Skötsel och rengöring av produkten.....	5
5.4	Förvaring.....	6
5.5	Förväntad livslängd.....	6
5.6	Återvinning.....	6
6.	Övrigt.....	6
6.1	Produktansvar.....	6
6.2	Returer och reklamationer.....	7
6.3	Transportskador.....	7
7.	Märkning.....	7
7.1	Etiketter.....	7
7.2	Symboler.....	7

# SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

*Läs instruktionerna före ni använder våra produkter!*

- Produkten ska bara användas i enlighet med beskrivningen i denna bruksanvisning.
- Produkten skall optiskt bedömas innan och efter varje användning.
- Vid skada på ytskikt skall produkten kasseras för att minimera eventuell risk för smittspridning.
- Produkten ska inte kombineras, monteras eller repareras med andra delar, tillbehör eller reservdelar än de som beskrivs i denna bruksanvisning eller annan dokumentation från Järven Health Care.
- Undvik att använda vassa föremål i närheten av produkten.
- För att undvika skador får inte produkten komma i kontakt med varma källor eller eld, till exempel glödande/brinnande cigaretter, varma lampor eller liknande.
- Ingen annan plast får ligga i direkt kontakt med ytskiktet då risken för migrering är stor (Migrering=vandring av mjukgörare, färger m.m. mellan plaster). Detta kan leda till uttorkning av skiktets mjukgörare och därigenom orsaka sprickor.
- Vid hantering och kassering av produkten skall de lokala anvisningarna vid specifika smittor eller situationer beaktas.
- Försäkra er om att ni beställer rätt produkt till rätt ändamål.
- Vid eventuella olyckor och tillbud som inträffat i samband med våra produkter är vi tacksamma om ni kontaktar oss så snabbt som möjligt.

## 2. KVALITET

### 2.1 CE-MÄRKNING

Produkterna som denna bruksanvisning avser CE-märkta enligt MDR 2017/745 Medicintekniskt direktiv klass 1. Detta innebär att Järven HealthCare har tillverkaransvaret och försäkrar att produkten uppfyller de väsentliga kraven samt att det finns teknisk dokumentation och försäkran som bevaras i minst tio år.



### 2.2 KVALITETSARBETE

Vårt kvalitetsarbete och kundfokus förverkligas genom att vara lyhörd för våra kunders behov och förväntningar samt i alla avseenden verka för ett samarbete som bygger på långsiktighet och förtroende. Ständiga förbättringar av våra produkter och tjänster är grunden till vår förmåga att tillfredsställa kunderna i dag och i framtiden. I vårt grundläggande kvalitetsarbete ingår också att finna utvärderingsmetoder och standarder som erbjuder kunden en säkerställd kvalitet gällande komfort, funktion, hållbarhet och pris. Vi är därför tacksamma om eventuella olyckor och tillbud som rör våra produkter rapporteras in till oss.

Järven Health Care fokuserar särskilt på att genom kompetenta och engagerade medarbetare kontinuerligt fortbilda och kompetensutveckla vårdens personal. Det är vår förhoppning att det ska leda till att de genom rätt produktval kan bedriva en högkvalitativ vård med inriktning på att förebygga trycksår, vårdrelaterade infektioner och minska bränder som uppkommer i vården.

## 3. BRUKSANVISNINGEN GÄLLER FÖLJANDE PRODUKTER

PREVENTA OMLÄGGNINGSKUDDE

## 4. PRODUKTINFORMATION

### 4.1 PREVENTA OMLÄGGNINGSKUDDE

PREVENTA Omläggningsskudde har ett skyddande ytskikt av polyuretan (PU)-sprutad plast. Produkten är mönsterskyddad (Mönsterskydd: DM/083438)

## 5. ANVÄNDNING

### 5.1 MOTTAGANDE OCH UPPACKNING AV PRODUKTEN

Börja med att kontrollera att produkten inte är skadad. Vid eventuell transportskada, se punkt 6.3. Ta bort förpackningen samt eventuellt skyddsmaterial. Användning av kniv bör undvikas vid hantering av förpackningen och produkten. Produkten kan användas direkt efter uppackning.

### 5.2 ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN OCH AVSEDD ANVÄNDNING

PREVENTA Omläggingskudde är utvecklad som ett hjälpmedel för att för underlätta det dagliga vård- och omsorgsarbetet i alla typer av vårdmiljöer.

Vid omläggning/vård/av och påtagning av exempelvis strumpor läggs benet på kudden för att ge en ergonomisk arbetsituation.

Kudden kan med fördel rullas så att det underlättar vid tex lindning av fot/ben.

- Använd Preventa Omläggingskudde så att ingen översträckning sker eller att kontrakturer uppstår.

- Använd med fördel en kilkudde som extra stöd under låret så inte översträckning av knät uppstår när foten ligger på kudden eller understöd lätt under knät om så behövs.

-Omläggingskudden skall ej användas för att vila ben eller fot på. Vid vila av ben kan med fördel Järvens Höglägeskudde användas eller Flex häl och avlastningsdyna.

### 5.3 SKÖTSEL OCH RENGÖRING AV PRODUKTEN

Kontrollera regelbundet produkten för synliga tecken på skador eller slitage, exempelvis revor, sprickor, hål, fläckar eller färgning.

Ytskiktet rengöres med tvålbaseerade rengöringsmedel. Se till att använda rätt spädningsförhållanden enligt rekommendationer för rengöringsmedlet. Använd aldrig koncentrat.

Klorhaltiga preparat får ej användas!

Desinficering sker med alkoholbaserat rengöringsmedel med tensider.

Ingen annan plast får ligga i direkt kontakt med ytskiktet då risken för migrering är stor (Migrering=vandring av mjukgörare, färg m.m. mellan plaster).

Detta kan leda till uttorkning av skiktets mjukgörare och därigenom orsaka sprickor.



*Vid användning av rengöringsmedel eller andra kemikalier är det viktigt att beakta de instruktioner och säkerhetsföreskrifter som finns för respektive rengöringsmedel, se säkerhetsdata blad för de rengöringsmedel som används.*




Rengöring bör ske med tvålbaseade rengöringsmedel. Följ rengöringsmedlets bruksanvisning och rekommendationer angående säkerhet och personligt skydd o.s.v. Se till att använda rätt spädningförhållande. Använd aldrig koncentrat.



Under inga omständigheter får klorhaltiga preparat användas!



Desinficering sker med alkoholbaserat eller liknande rengöringsmedel med tensider. OBS! Alkohol har en uttorkande effekt och bör därför användas sparsamt. Dessa kan användas; Dax Ytdesinfektion Plus, Virkon, Perform och Dismozon Pur.

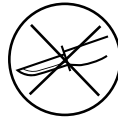

Undvik vassa föremål i närheten av produkterna.

#### 5.4 FÖRVARING

Förvara produkterna i torra, rumstempererade lokaler. Undvik direkt solljus.

#### 5.5 FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD

Följ alltid våra skötselråd för produkterna för längsta möjliga livslängd med bibehållen funktion. Under normala förhållanden är produktens förväntade livslängd 5 år.

#### 5.6 ÅTERVINNING

PREVENTA Omlägningskudde är helt energiåtervinningsbar och skall sorteras som brännbart avfall. Ingen demontering är nödvändig.

## 6. ÖVRIGT

### 6.1 PRODUKTANSVAR

Med produktansvar avses tillverkarens, importörens eller försäljarens lagstadgade skadeståndsansvar för eventuella skador som produkten orsakat. Produktansvarslagen (EU-direktiv 85/374/EEG, Svensk lag SFS 1992:18) fastställer tillverkarens, importörens eller försäljarens lagstadgade skadeståndsansvar för eventuella skador som produkten orsakat. Reglerna gäller för fysiska produkter i form av lösa föremål men även för produkter som kopplas ihop med andra lösa föremål eller fast egendom. Finns det ingen produkt som orsakat någon form av egendoms- eller personskada är produktansvarslagstiftningen inte relevant.

## 6.2 RETURER OCH REKLAMATIONER

Reklamationer skall skriftligen anmälas till Järven Health Care. Retur av produkt skall efter godkänt reklimationsärende ske enligt våra instruktioner. Returneras produkt innan reklimationsärendet är godkänt räknas ärendet som avslutat och ersättning till kund betalas inte ut.

## 6.3 TRANSPORTSKADOR

Transportskada skall noteras på fraktsedeln innan påskrift för att vara giltig. Därefter kontaktar ni kundtjänst på Järven Health Care (0660-22 28 50, [healthcare@jarven.se](mailto:healthcare@jarven.se)) och lämnar relevant information.

OBS! För snabbare behandling av ditt ärende ber vi dig fotografera transportskadan så utförligt som möjligt innan ni kontaktar kundtjänst.

# 7. MÄRKNING

## 7.1 ETIKETTER

Nedan följer exempel på produktens märkning. Etikettens utseende kan variera.



## 7.2 SYMBOLER



Rengöring bör ske med tvålbaseerade rengöringsmedel




Desinficering av produkten sker med alkoholbaserat eller liknande rengöringsmedel med tensider




Under inga omständigheter får klorhaltiga preparat användas!




Produktens ytskikt är vätskeavvisande

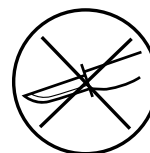

Undvik vassa föremål

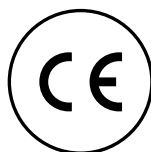

Denna produkt är CE-märkt enligt MDR 2017/745 Medicintekniskt direktiv klass 1.

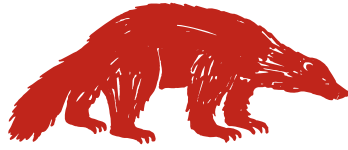

# Järven Health Care



Järven Health Care

Bromsvägen 3

SE-891 60 Örnsköldsvik

SWEDEN

Telefon: 0660-22 28 50

Telefax: 0660-824 10

E-post: [healthcare@jarven.se](mailto:healthcare@jarven.se)

**[www.jarven.se](http://www.jarven.se)**

Distributör: