

BRUKSANVISNING SCHAMPIKUDDEN



PREVENTA
POSITIONING BY JÄRVEN HEALTH CARE

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	Säkerhetsföreskrifter	4
2	Kvalitet	5
2.1	CE-märkning	5
2.2	Kvalitetsarbete	5
3	Bruksanvisningen gäller följande produkter	4
4	Produktinformation	4
5	Användning	6
5.1	Mottagande och uppackning av Schampikudden	6
5.2	Avsedd användning	6
5.3	Exempel på positionering	6
5.4	Skötsel och rengöring av Schampikudden	7
5.5	Förvaring	7
5.6	Livslängd	7
5.7	Återvinning	7
6	Övrigt	8
6.1	Produktansvar	8
6.2	Returer och reklamationer	8
6.3	Transportskador	8
7	Märkning	9
7.1	Etiketter	9
7.2	Symboler	9

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs instruktionerna före ni använder våra produkter!

- Produkten ska bara användas i enlighet med beskrivningen i denna bruksanvisning.
- Produkten ska inte kombineras, monteras eller repareras med andra delar, tillbehör eller reservdelar än de som beskrivs i denna bruksanvisning eller annan dokumentation från Järven Health Care.
- Undvik att använda vassa föremål i närheten av produkten.
- För att undvika skador får inte produkten komma i kontakt med varma källor eller eld, till exempel glödande/brinnande cigaretter, varma lampor eller liknande.
- Ingen annan plast får ligga i direkt kontakt med ytskiktet då risken för migrering är stor (Migrering=vandring av mjukgörare, färger m.m. mellan plaster). Detta kan leda till uttorkning av skiktets mjukgörare och därigenom orsaka sprickor.
- Försäkra er om att ni beställer rätt produkt till rätt ändamål.
- Schampikudden får endast användas på sängar med sänggrind.

2. KVALITET

2.1 CE-MÄRKNING

Schampikudden är CE-märkt enligt MDR 2017/745. Detta innebär att Järven Health Care har tillverkaransvaret och försäkrar att produkten uppfyller de väsentliga kraven samt att det finns teknisk dokumentation och försäkran som bevaras i minst tio år.

2.2 KVALITETSARBETE

Vårt kvalitetsarbete och kundfokus förverkligas genom att vara lyhörd för våra kunders behov och förväntningar samt i alla avseenden verka för ett samarbete som bygger på långsiktighet och förtroende. Ständiga förbättringar av våra produkter och tjänster är grunden till vår förmåga att tillfredsställa kunderna i dag och i framtiden. I vårt grundläggande kvalitetsarbete ingår också att finna utvärderingsmetoder och standarder som erbjuder kunden en säkerställd kvalitet gällande komfort, funktion, hållbarhet och pris.

Järven Health Care fokuserar särskilt på att genom kompetenta och engagerade medarbetare kontinuerligt fortbilda och kompetensutveckla vårdens personal. Det är vår förhoppning att det ska leda till att de genom rätt produktval kan bedriva en högkvalitativ vård med inriktning på att förebygga trycksår, vårdrelaterade infektioner och minska bränder som uppkommer i vården.

3. BRUKSANVISNINGEN GÄLLER FÖLJANDE PRODUKTER

SCHAMPIKUDDEN

SCHAMPIKUDDEN small

4. PRODUKTINFORMATION

SCHAMPIKUDDEN

Inom bl.a. äldrevården är det vanligt att brukaren vill men inte kan sitta på sängkanten. Schampikudden är framtagen för att lösa detta. Kudden placeras bakom ryggen på brukaren sedan man hjälpt honom/henne upp i sittande ställning. Kudden hindras att glida bakåt genom att sänggrinden fälls upp bakom ryggen på brukaren. Den ger en stadig och bekväm positionering tack vare det skålade ryggstödet. Kudden levereras med ett överdrag av polyuretan (PU)-material. Överdraget är mjukt och bekvämt samt lätt att rengöra.

Art nr	Storlek (LxBxH)	Beskrivning	Färg
13-000100-001	85x70x40 cm	Låg rygg med armstöd, PU-överdrag	blå/beige
13-000100-002	85x58x53 cm	Smalare variant med hög rygg, PU-överdrag	blå/beige
13-000000-001	38x50x40cm	Låg rygg utan armstöd, PU-överdrag	blå/beige

* Djupmåtten inkluderar armstödet. Armstöden är 20 cm höga.

5. ANVÄNDNING

5.1 MOTTAGANDE OCH UPPACKNING AV SCHAMPIKUDDEN

Börja med att kontrollera att produkten inte är skadad. Vid eventuell transportskada, se punkt 6.3. Ta bort förpackningen samt eventuellt skyddsmaterial. Användning av kniv bör undvikas vid hantering av förpackningen och produkten. Schampikudden kan användas direkt efter upppackning.

5.2 AVSEDD ANVÄNDNING

Inom bl.a. äldreården är det vanligt att brukaren vill men inte kan sitta på sängkanten. Schampikudden är framtagen för att lösa detta.

Schampikudden är avsedd för användning på alla typer av sjukhus, äldreboenden, servicelägenheter, särskilda boenden, palliativa enheter och enheter inriktade på rehabilitering (exempelvis för brukare med andnings- och cirkulationssvårigheter).

Den kan även användas inom områdena handikappomsorg, funktionshindrade, gruppboenden, hemsjukvård samt BB/förlösning.

5.3 EXEMPEL PÅ POSITIONERING



5.4 SKÖTSEL OCH RENGÖRING AV SCHAMPIKUDDEN

- Kontrollera regelbundet kudden (med överdrag) för synliga tecken på skador eller slitage, exempelvis revor, sprickor, hål, fläckar eller färgning.
- Ytskiktet rengöres med tvålbaseerade rengöringsmedel. Se till att använda rätt spädningsförhållan den enligt rekommendationer för rengöringsmedlet. Använd aldrig koncentrat.
- Klorhaltiga preparat får ej användas!
- Desinficering sker med alkoholbaserat rengöringsmedel med tensider.
- Ingen annan plast får ligga i direkt kontakt med ytskiktet och/eller polyuretanöverdraget då risken för migrering är stor (Migrering=vandring av mjukgörare, färger m.m. mellan plaster). Detta kan leda till uttorkning av skiktets mjukgörare och därigenom orsaka sprickor.
- Sköljmedel/mjukgörare förstör ytskiktets/överdragets vätsketäthet och får EJ användas.



Vid användning av rengöringsmedel eller andra kemikalier är det viktigt att beakta de instruktioner och säkerhetsföreskrifter som finns för respektive rengöringsmedel, se säkerhetsdata blad för de rengöringsmedel som används.

5.5 FÖRVARING

Förvara Schampikudden i torra, rumstempererade lokaler. Undvik direkt solljus.

5.6 FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD

Följ alltid våra skötselråd för Schampikudden för längsta möjliga livslängd med bibehållen funktion. Förväntad livslängd är 5 år.

5.7 ÅTERVINNING

Schampikudden är helt energiåtervinningsbara och skall sorteras som brännbart avfall. Ingen demontering är nödvändig.

6. ÖVRIGT

6.1 PRODUKTANSVAR

Med produktansvar avses tillverkarens, importörens eller försäljarens lagstadgade skadeståndsansvar för eventuella skador som produkten orsakat. Produktansvarslagen (EU-direktiv 85/374/EEG, Svensk lag SFS 1992:18) fastställer tillverkarens, importörens eller försäljarens lagstadgade skadeståndsansvar för eventuella skador som produkten orsakat. Reglerna gäller för fysiska produkter i form av lösa föremål men även för produkter som kopplas ihop med andra lösa föremål eller fast egendom. Finns det ingen produkt som orsakat någon form av egendoms- eller personskada är produktansvarslagstiftningen inte relevant.

6.2 RETURER OCH REKLAMATIONER

Reklamationer skall skriftligen anmälas till Järven Health Care. Retur av produkt skall efter godkänt reklimationsärendet ske enligt våra instruktioner. Returneras produkt innan reklimationsärendet är godkänt räknas ärendet som avslutat och ersättning till kund betalas inte ut.

6.3 TRANSPORTSKADOR

Transportskada skall noteras på fraktsedeln innan påskrift för att vara giltig. Därefter kontaktar ni kundtjänst på Järven Health Care (0660-22 28 50, healthcare@jarven.se) och lämnar relevant information.

OBS! För snabbare behandling av ditt ärende ber vi dig fotografera transportskadan så utförligt som möjligt innan ni kontaktar kundtjänst.

7. MÄRKNING

7.1 ETIKETTER

Nedan följer exempel på produktens märkning. Etikettens utseende kan variera.



7.2 SYMBOLER



Anger artikelnummer



Anger serienummer



Anger batchnummer



Produkten är en medicinteknisk produkt




Läs bruksanvisningen innan användning



Anger tillverkningsdatum



Anger tillverkare

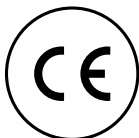

Denna produkt är CE-märkt i enlighet med medicintekniskt direktiv 93/42/EEC (Klass 1)



Vätskeavvisande



Rengöring bör ske med tvålbaseerade rengöringsmedel




Desinficering sker med alkoholbaserat eller liknande rengöringsmedel med tensider



Under inga omständigheter får klorhaltiga preparat användas!



Ej strykning

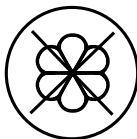

Ej sköljmedel

ANTECKNINGAR



Schampikudden bruksanvisning. Alla varumärken tillhör respektive ägare. Järven AB förbehåller sig rätten att uppdatera denna bruksanvisning vid behov och/eller påträffande av eventuella stav- eller faktafel.

**Ytterligare exemplar kan beställas från Järven Health Care.
Kopiering för internt bruk är tillåten**



Järven AB, Bromsvägen 3
SE-891 60 Örnsköldsvik
SWEDEN

Telefon: 0660-22 28 50
Telefax: 0660-824 10
E-post: healthcare@jarven.se

www.jarven.se