

Järven Health Care

GEBRUIKSAANWIJZING JÄRVEN RESCUE MATRAS



ALGEMENE INFORMATIE

PRODUCTLABEL

Als bewijs dat u het originele product in huis hebt gehaald, zijn de Järven Rescue Matrassen standaard voorzien van een product label. Op dit label staat aangegeven de productie datum, artikelnummer, afmeting, was instructies en de EAN-Bar code, CE markering en onze bedrijfsgegevens.

Controleer tijdens het uitpakken of er beschadigingen aan het product zijn geconstateerd. Mocht dit het geval zijn neem dan contact op met uw leverancier.

CE MARKERING MEDISCH HULPMIDDEL

De Järven Rescue Matrassen zijn geregistreerd als medisch hulpmiddel en voldoen aan de EU Richtlijn 93/42/EEG omvattende medische hulpmiddelen in algemene zin. Een medisch hulpmiddel is elk instrument, toestel, apparaat, stof of ander artikel dat door de fabrikant is bestemd om bij de mens te worden gebruikt.

De algemene eisen, waaronder een doelmatigheidseis, gaan over de technische veiligheid, steriliteit en de recyclebaarheid van het betreffende product.

DUIDELIJK ZICHTBARE AANWEZIGHEID MAAKT DE JARVEN RESCUE MATRASSEN SNEL INZETBAAR



De Järven Rescue Matrassen dienen duidelijk zichtbaar aan een muur of wand gemonteerd te worden, gebruik hiervoor de optioneel verkrijgbare muurbevestigingssteun.

Het Järven Rescue Matras kan worden ingezet voor een snelle en veilige evacuatie van mensen die niet in staat zijn om zichzelf te verplaatsen in geval van een brand of een andere calamiteit.

Gebruikmakend van het Järven Rescue Matras kan één persoon met een paar simpele handelingen de betrokken partij snel evacueren naar een veilige plek ook al dient men wellicht gebruik te maken van een trappenhuis.

PRODUCT SPECIFICATIES

- Järven Rescue Matrassen zijn gemaakt van een versterkt röntgentransparant, polymeer composietmateriaal. Dit is een materiaal dat is opgebouwd uit verschillende vezel versterkte kunststoffen. De vezels zorgen voor het overbrengen van trekkrachten en de matrix houdt de vezels samen en zorgt voor het overbrengen van drukkrachten en schuifspanningen.
- De Jarven Rescue Matrassen zijn aan het hoofd en voeteneinde voorzien van een grote rode en zeer sterke handgreep zodat men de evacuatie met een rechte rug kan uitvoeren waardoor de fysieke belasting verminderd. Aan beide lange zijden van 6 gestanste handgrepen om het rescuematras zo verplaatsbaar mogelijk te maken.
- Te gebruiken als direct toegankelijk evacuatiehulpmiddel in geval van een calamiteit voor een snelle evacuatie in openbare gebouwen, op bouwplaatsen, evenementen, beurzen, ziekenhuizen, zorginstellingen, scholen, kantoren, fitnesscentra en zwembaden.
- Järven Rescue Matrassen voldoen aan de kwaliteits- en veiligheids-standaard de Swedish Standard SS 876 00 39. Dit betekent in de praktijk dat een evacuatiehulpmiddel welke voldoet aan deze standard de garantie biedt dat het product veilig, sterk, duurzaam en gebruikt kan worden voor evacuatie op zowel droge als natte ondergrond.
- De Järven Rescue Matrassen worden in eigen beheer geproduceerd door:



Järven Health Care
Bromsvägen 3
891 60 Örnsköldsvik
Tel + 46 (0)660 222850
Fax + 46(0)660 82410
Email: info@jarven.nl
Website: www.jarven.nl

ONDERHOUD


Het is belangrijk om de instructies op het label te volgen. Bij twijfel raadpleeg de verantwoordelijke in uw instelling voor de hygiëne in en rond het bed of neem anders contact op met uw leverancier.

GARANTIE


Op de Järven Rescue Matrassen is een garantietermijn van 1 jaar op fabricagefouten van toepassing. Mocht u hier aanspraak op willen maken neem dan contact op met uw leverancier.

BELANGRIJKE INFORMATIE

HOE SNEL EN EFFECTIEF TE HANDELEN MET HET JARVEN RESCUE MATRAS TIJDENS EEN EVACUATIE VAN EEN IMMOBIELE PERSOON BIJ BRAND OF ANDERE CALAMITEIT

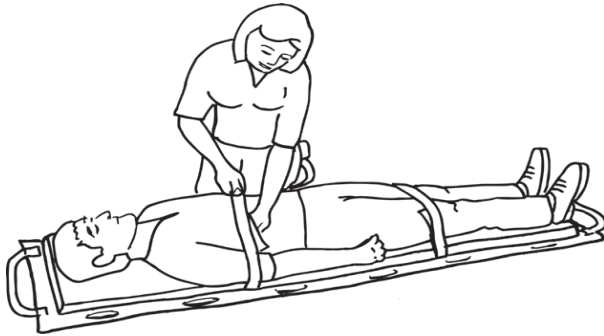

STEL EERST DE PERSOON GERUST, LEG HEM OF HAAR VERVOLGENS VOORZICHTIG OP HET RESCUEMATRAS EN ZORG ERVOOR DAT DE ARMEN VAN DE PATIENT GESTREKT LANGS HET LICHAAM LIGDEN EN FIXEER DE PERSOON DOOR DE KLITTENBANDEN OP ELKAAR TE BEVESTIGEN

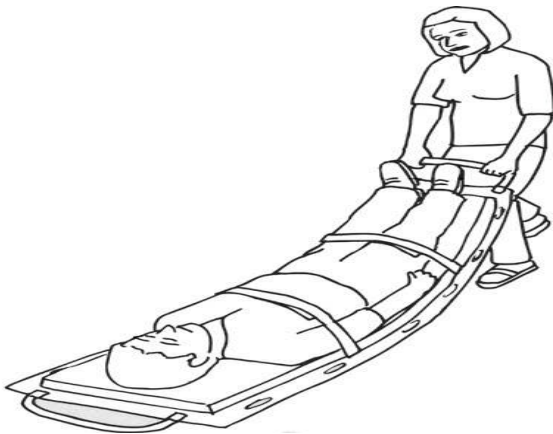

DE PERSOON KAN NU SNEL GEËVACUEERD WORDEN NAAR EEN VEILIGE PLEK VOOR EVENTUEEL VERDER TRANSPORT. TIJDENS DE EVACUATIE DIEN U ZOVEEL MOGELIJK (OOG) CONTACT MET DE PERSOON TE HOUDEN, DAT STELT GERUST.



SOMS MOET U, OMDAT ER GEEN LIFTEN AANWEZIG ZIJN OF DE LIFTEN NIET GEBRUIKT MOGEN WORDEN, TIJDENS DE EVACUATIE GEBRUIK MAKEN VAN EEN TRAPPENHUIS.

HOUDT DE HANDGREEP VAN HET RESCUE MATRAS MET ÉÉN HAND STEVIG VAST EN LOOP VERVOLGENS RUSTIG VAN DE TRAP AF.

EVACUATIEPLAN

Een goed evacuatie/ calamiteitenplan is echt van wezenlijk belang en blus- en evacuatiehulpmiddelen moeten daar deel van uitmaken, want wij zijn toch op zijn minst verantwoordelijk voor het wel en wee van onze bezoekers in geval van een calamiteit.

De bedrijfshulpverleners dienen goed opgeleid te zijn exact te weten wat er van hen verwacht wordt in geval van brand, ongevallen of technische storingen. Er is een gedegen calamiteitenplan, een goed uitgewerkt evacuatieplan en een plan Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen. Jaarlijkse bijscholing van de bedrijfshulpverleners is van groot belang.

Bovendien is het van belang dat er diverse voorzieningen zijn die helpen in geval van calamiteiten, zoals automatische rookmelders, goed aangegeven vluchtroutes, brandtrappen en evacuatiehulpmiddelen.

Oefen het calamiteiten/ evacuatieplan periodiek, signaleer tekortkomingen en verbeter het plan. Zorg ervoor dat alle medewerkers exact weten hoe te handelen bij een calamiteit. In geval van een brand of een calamiteit is er vaak geen tijd om na te gaan hoe te handelen. Er mag nooit twijfel zijn waardoor kostbare tijd verloren gaat.

Zorg ervoor dat vluchtwegen goed begaanbaar zijn voor bedden, rolstoelen en rollators. Controleer regelmatig of vluchtwegen en nooddeuren vrij zijn. Controleer ook of brandwerende deuren altijd gesloten zijn of – als ze zelfsluitend zijn – dat ze goed werken. Laat liefst overal zelfsluitende deuren plaatsen.