

OPTICELL 4 NX^{v2}



True Alternating system upp till sårkategori 4

Alternerande lågtrycks-system

Anpassar sig automatiskt efter brukarens vikt

OptiTex™ Överdrag med goda egenskaper

Vår mest avancerade trycksårsmadrass med hygienöverdrag, automatisk pump och utbytbara celler.

OPTICELL 4 NX^{V2}

OptiCell 4 NX V2, är alternerande och tryckavlastande luftmadrass som placeras direkt på sängbotten. Madrassen är utvecklad som ett förebyggande och behandlande hjälpmedel vid behandling av trycksår upp till och med kategori 4. OptiCell 4 NX V2 levereras med ett slitåligt OptiTex™ överdrag och CPR-ventil för akuta lägen.

Madrassen har celler och överdrag som tillsammans ger en Low Air loss-funktion samtidigt som överdraget är helt vattentätt.

Den medföljande pumpen, som både kan ge statiskt och alternerande tryck är enkel att använda och ställer automatiskt in sig efter brukarens vikt, längd, läge, rörelser och position i sängen. Pumpen har 4 förprogrammerade växlingsintervall 10,15, 20 och 25 minuter.

EGENSKAPER – Pump och celler

KOMFORTFUNKTION med fyra olika komfortlägen.

OMVÅRDNADSLÄGE med återställningsautomatik – Pumpen ger maximalt lufttryck under 30 minuter för att sedan återgå till aktuell inställning (statisk eller alternerande).

TRANSPORTLÄGE – Madrassen kan ställas i transportläge och behåller maximalt lufttryck i minst 12 timmar.

CPR VENTIL – Vid akutläge där HLR behöver påbörjas öppnas CPR-ventilen för att ge en snabb lufttömning.

ALARMFUNKTION – Luftpumpen har en alarmfunktion som med både ljus- och ljudalarm som varnar för lågt tryck i madrassen eller för strömavbrott.

HÅLAVLASTNING – Madrassen är utrustad med SweCells™ och ett avlastningssystem som möjliggör enkel urkoppling av cellerna med hjälp av ett integrerat luftlås.

SITTFUNKTION – som omgående ökar lufttrycket för att ge bättre stöd.

KNAPPLÅS – för att minimera risken att madrassens funktion förändras.

EXTRA LÅNG ELKABEL – Avståndet till närmaste eluttag kan variera och därför levereras madrassen med en 6 meter lång kabel.

EGENSKAPER – OptiTex™ överdrag

INTEGRERAD KABELHÅLLARE för att minska risken för bakteriespridning, Samtidigt som elsladden hålls ur vägen och skyddar luftslangarna.

GOD HYGIEN, överdraget kan rengöras med desinfektionsmedel och även maskintvättas i 95°C. Celler och slangar plockas enkelt ur överdraget och sköljas rena med varmt vatten (max 70°C) eller med desinfektionsmedel.

LOW AIR LOSS FUNKTION tillåter luft att komma ut från cellerna samtidigt som det är vattentätt. Detta för att minska risken för hudmaceration och andra komplikationer för brukaren.

DROPPSKYDDAT VATTENTÄTT BLIXTLÅS på fyra sidor. Svetsade sömmar.

UNDERSIDA MED ANTIGLID-FUNKTION OCH FYRA FÅSTBAND.

FYRA STYCKEN HANDTAG för att underlätta vid förflyttning

Madrass	Tjocklek	Madrassvikt	Maxbelast.
Opticell 4 NX v2 R6	16 cm	8,8 kg	210 kg
Opticell 4 NX v2 R7	18 cm	9,5 kg	230 kg
Opticell 4 NX v2 R8	20 cm	10,2 kg	250 kg

Produktspecifikationer

STANDARDSTORLEKAR 200/210/220x80/85/90/105/120 cm.

Höjd se nedan.

För andra storlekar vänligen kontakta Järven Health Care.

TRYCKSÅRSKATEGORI 1–4*

CELLER Våra unika utbytbara SweCells™ är tillverkade av TPU (Termoplastisk Polyuretan) och är mjukare än traditionella PU-celler. Det formar sig efter kroppen samtidigt som de presslar mindre.

ÖVERDRAG OptiTex™ bi-elastisk double-coated textil med mjuk elastisk PU.

PUMP OC40 2.0 är en avancerad pump med digital display och sensorer som anpassar sig efter brukarens vikt.

GARANTI 2 år på fabrikationsfel.

BRANDSTANDARD SS 876 00 01, EN 597-1 & 2.

BRUKARVIKT Upp till 250 kg.

ÅTERVINNING Se bruksanvisning

MÄRKNING tillverkningsår, månad, vecka, EAN, skötselanvisningar, uppfyllda standarder samt placering i säng.



* Trycksårskategorier definierade enligt International Pressure Ulcer Classification system.

Riktlinjer framtagna av European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) och Natioanl Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), tillsammans med Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA).

