

# OPTICELL 4 PRO<sup>v2</sup>

Behandlande  
upp till och med  
sårkategori 4

True  
Alternating  
system

Automatisk  
anpassning av  
lufttryck

OptiTex™  
överdrag med  
goda egenskaper

*Ett dynamisk, alternerande madrasssystem med hygien-  
överdrag, automatisk pump och utbytbara celler.*

# OPTICELL 4 PRO V2

**OptiCell 4 PRO v2**, är en alternerande och tryckavlastande luftmadrass som placeras direkt på sängbotten. Madrassen är utvecklad som ett förebyggande och behandlande hjälpmedel vid behandling av trycksår upp till och med kategori 4. OptiCell 4 PRO levereras med ett slitåligt OptiTex™ överdrag och CPR-ventil för akuta lägen.

Den 20 cm tjocka madrassen har celler och överdrag som tillsammans ger en Low Air Loss-funktion samtidigt som överdraget är helt vattentätt.

Den medföljande pumpen, som både kan ge statiskt och alternerande tryck är enkel att använda och ställer automatiskt in sig efter brukarens vikt, längd, läge, rörelser och position i sängen. Pumpen har 4 förprogrammerade växlingsintervall – 10,15, 20 och 30 minuter.

## EGENSKAPER – Pump och celler

**KOMFORTFUNKTION** med sex olika komfortlägen.

Omvårdnadsläge med återställningsautomatik – Pumpen ger maximalt lufttryck under 30 minuter för att sedan återgå till aktuell inställning (statisk eller alternerande).

**TRANSPORTLÄGE** – Madrassen kan ställas i transportläge och behåller maximalt lufttryck i minst 12 timmar.

**CPR VENTIL** – Vid akutläge där HLR behöver påbörjas öppnas CPR-ventilen för att ge en snabb lufttömning.

**ALARMFUNKTION** – Luftpumpen har en alarmfunktion som med både ljus- och ljudalarm som varnar för lågt tryck i madrassen eller för strömavbrott.

**HÅLAVLASTNING** – Madrassen är utrustad med SweCells™ och ett avlastningssystem som möjliggör enkel urkoppling av cellerna i hälregionen med hjälp av ett integrerat luftflås.

**KNAPPLÅS** – Displayen låser sig automatiskt för att inte någon oavsiktligt ska kunna ändra pumpens inställningar.

## EGENSKAPER – OptiTex™ överdrag

**INTEGRERAD KABELHÅLLARE** – OptiTex™ överdraget har integrerad, vattentät kabelhållare vilket förhindrar bakteriespridning, håller elsladden ur vägen och skyddar luftslangarna.

**GOD HYGIEN** – OptiTex™ överdraget kan rengöras med desinfektionsmedel och kan även maskintvättas i 95° C.

Celler och slangar plockas enkelt ur överdraget och sköljas rena med varmt vatten (max 70° C) eller med desinfektionsmedel.

**LOW AIR LOSS FUNKTION** – OptiTex™-överdraget tillåter luft att komma ut från cellerna samtidigt som det är vattentätt. Detta minskar risken för hudmaceration och andra komplikationer för brukaren.

**DROPPSKYDDAT VATTENTÄTT BLIXTLÅS PÅ FYRA SIDOR.** Alla sömmar är svetsade.

**UNDERSIDA MED ANTIGLID-FUNKTION MED FYRA FÄSTBAND.**

**ÖVERDRAGET ÄR UTRUSTAT MED** fyra stycken handtag för förflyttning.

Madras	Tjocklek	Madrasvikt	Maxbelast.
Opticell 4 PRO v2 R6	16 cm	8,8 kg	210 kg
Opticell 4 PRO v2 R7	18 cm	9,5 kg	230 kg
Opticell 4 PRO v2 R8	20 cm	10,2 kg	250 kg

## Produktspecifikationer

**STANDARDSTORLEKAR** 200/210/220 x 80/85/90/105/120 cm. OptiCell 4 PRO V2 finns i tre varianter med olika madrasshöjd och maxbelastning.

Se tabell nedan med data för respektive modell.

För andra storlekar vänligen kontakta Järven Health Care.

**TRYCKSÅRSKATEGORI** 1- 4\*

**CELLER** Våra unika utbytbara SweCells™ är tillverkade av TPU (Termoplastisk Polyuretan) och är mjukare än traditionella PU-celler. Det betyder att lättare de formar sig efter kroppen samtidigt som de presslar mindre.

**ÖVERDRAG** av bi-elastisk double-coated textil med mjuk elastisk PU.

**TRUE ALTERNATING** – se separat blad

**PUMP** OC-30 (2.0) är en avancerad pump med sensorer som anpassar sig efter brukarens vikt. Ljudnivå: 21 db. 230 V / 50 Hz. En Ready-lampa visar när pumpen och madrassen är klara att användas. Om lampan inte lyser är det en indikation på att något är fel.

**GARANTI** 2 år på fabriksfelsfel.

**BRANDSTANDARD** SS 876 00 01, EN 597-1 & 2.

**BRUKARVIKT** OptiCell 4 PRO V2 finns i tre varianter med olika madrasshöjd och maxbelastning. Se tabell nedan med data för respektive modell.

**ÅTERTVINNING** Se bruksanvisning

**VIKT** Madras 7 kg (200 x 105 cm), Pump 3,4 kg

**MÄRKNING** tillverkningsår, månad, vecka, EAN, skötselanvisningar, uppfyllda standarder samt placering i säng.



\* Trycksårskategorier definierade enligt International Pressure Ulcer Classification system.

Riktlinjer framtagna av European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) och National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), tillsammans med Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA).

