


OPTICELL SOFT PRO

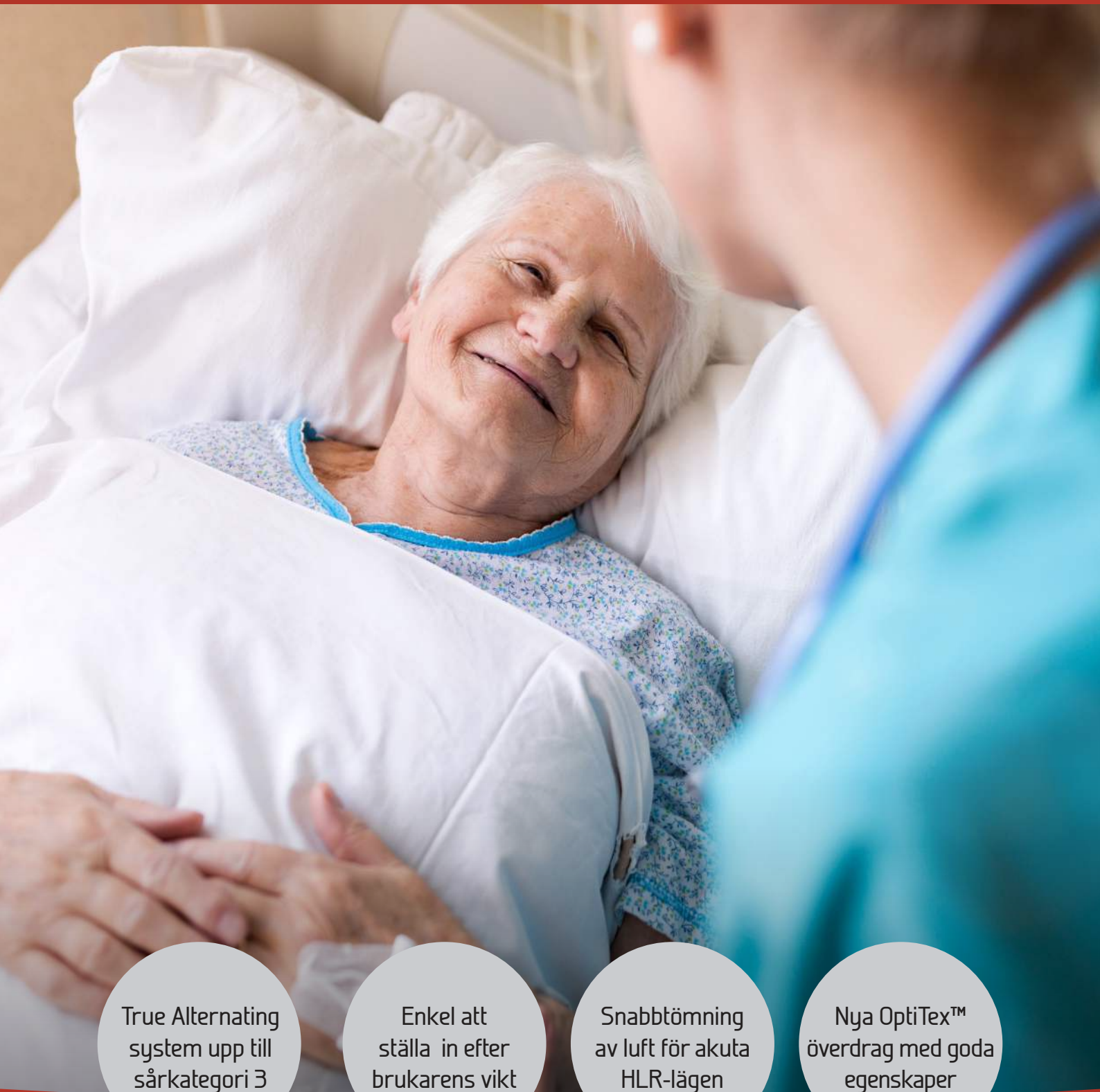

True Alternating
system upp till
sårkategori 3

Enkel att
ställa in efter
brukarens vikt

Snabbtömning
av luft för akuta
HLR-lägen

Nya OptiTex™
överdrag med goda
egenskaper

*En statisk lufttrycksmadrass med
hygienöverdrag, smidig pump och utbytbara celler.*

OPTICELL SOFT PRO

OptiCell SOFT PRO, är en statisk tryckavlastande luftmadrass utvecklad som ett förebyggande och behandlande hjälpmedel vid behandling av trycksår upp till och med kategori 3.

OptiCell Soft PRO är av typen ersättningsmadrass med integrerad skumkärna och placeras direkt ovanpå sängbotten. OptiCell Soft PRO levereras med ett slitålligt OptiTex™ överdrag och CPR-ventil för akuta lägen.

Den 16 cm tjocka madrassen har celler och överdrag som tillsammans ger en Low Air Loss-funktion samtidigt som överdraget är helt vattentätt.

OptiCell Soft PRO levereras med en energisnål, tystgående pump, OC-15, som är lätt att använda. Att fylla madrassen, som placeras direkt på sängbotten, tar normalt ca 15 minuter att fylla.

EGENSKAPER – Pump och celler

INDIVIDUELL ANPASSNING utefter patientens vikt, 30-250 kg.

CPR VENTIL – Vid akutläge där HLR behövs påbörjas öppnas CPR-ventilen för att ge en snabb lufttömning.

ALARMFUNKTION – Luftpumpen har en alarmfunktion som med både ljus- och ljudalarm som varnar för lågt tryck i madrassen.

HÅLAVLASTNING – Madrassen är utrustad med ett avlastningssystem som möjliggör enkel urkoppling av cellerna med hjälp av ett integrerat luftlås.

EGENSKAPER – OPTITEX™ ÖVERDRAG

INTEGRERAD KABELHÅLLARE – OptiTex™ överdraget har integrerad, vattentät kabelhållare vilket förhindrar bakteriespridning, håller elsladden ur vägen och skyddar luftslangarna.

GOD HYGIEN – OptiTex™ överdraget kan rengöras med desinfektionsmedel och kan även maskintvättas i 95° C.

Celler och slangar plockas enkelt ur överdraget och sköljas rena med varmt vatten (max 70° C) eller med desinfektionsmedel.

LOW AIR LOSS FUNKTION – OptiTex™-överdraget tillåter luft att komma ut från cellerna samtidigt som det är vattentätt. Detta minskar risken för skjuv och andra komplikationer för brukaren.

DROPPSKYDDAT VATTENTÄTT BLIXTLÅS PÅ FYRA SIDOR. Alla sömmar är svetsade.

FYRA STYCKEN HANDTAG för att underlätta förflyttning.

Produktspecifikationer

STANDARDSTORLEKAR 200/210/220x80/85/90/105/120 cm.

För andra storlekar vänligen kontakta Järven Health Care.

TRYCKSÅRSKATEGORI 1-3*

CELLER 17 utbytbara celler tillverkade i mjuk nylon/TPU (polyuretan) med Low Air Loss funktion.

ÖVERDRAG OptiTex™ bi-elastisk double-coated textil med mjuk elastisk PU.

PUMP OC-15. Ljudnivå: 21 db. 230 V / 50 Hz. En Ready-lampa visar när pumpen och madrassen är klar att använda. Om lampan inte lyser är det en indikation på att något är fel.

GARANTI 2 år på fabriktionsfel.

BRANDSTANDARD SS 876 00 01, EN 597-1 & 2.

BRUKARVIKT Upp till 30-250 kg.

ÅTERVINNING Se bruksanvisning

VIKT Madrass 6 kg (200 x 90 cm), pump 2 kg

MÄRKNING tillverkningsår, månad, vecka, EAN, skötselansvisningar, uppfyllda standarder samt placering i säng.

Madrassen med celler och slangar är PVC-fri



* Trycksårskategorier definierade enligt International Pressure Ulcer Classification system.
Riktlinjer framtagna av European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) och National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), tillsammans med Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA).



OptiTex™ – hygienöverdrag med goda egenskaper



ÖVERDRAGETS
VATTENTÄLIGHET
ISO 811-1981



LUFTGENOM-
SLÄPPLIGHET
ISO 11092



ÖVERDRAGETS
BRANDSTANDARD
BS EN 597-1 & 2



ÖVERDRAGETS
STRÄCKTÄLIGHET
EN ISO 13934-1 1999



HYDROSTATISK
FÖRMÅGA
ISO 811-1981