


OPTICELL SOFT Plus

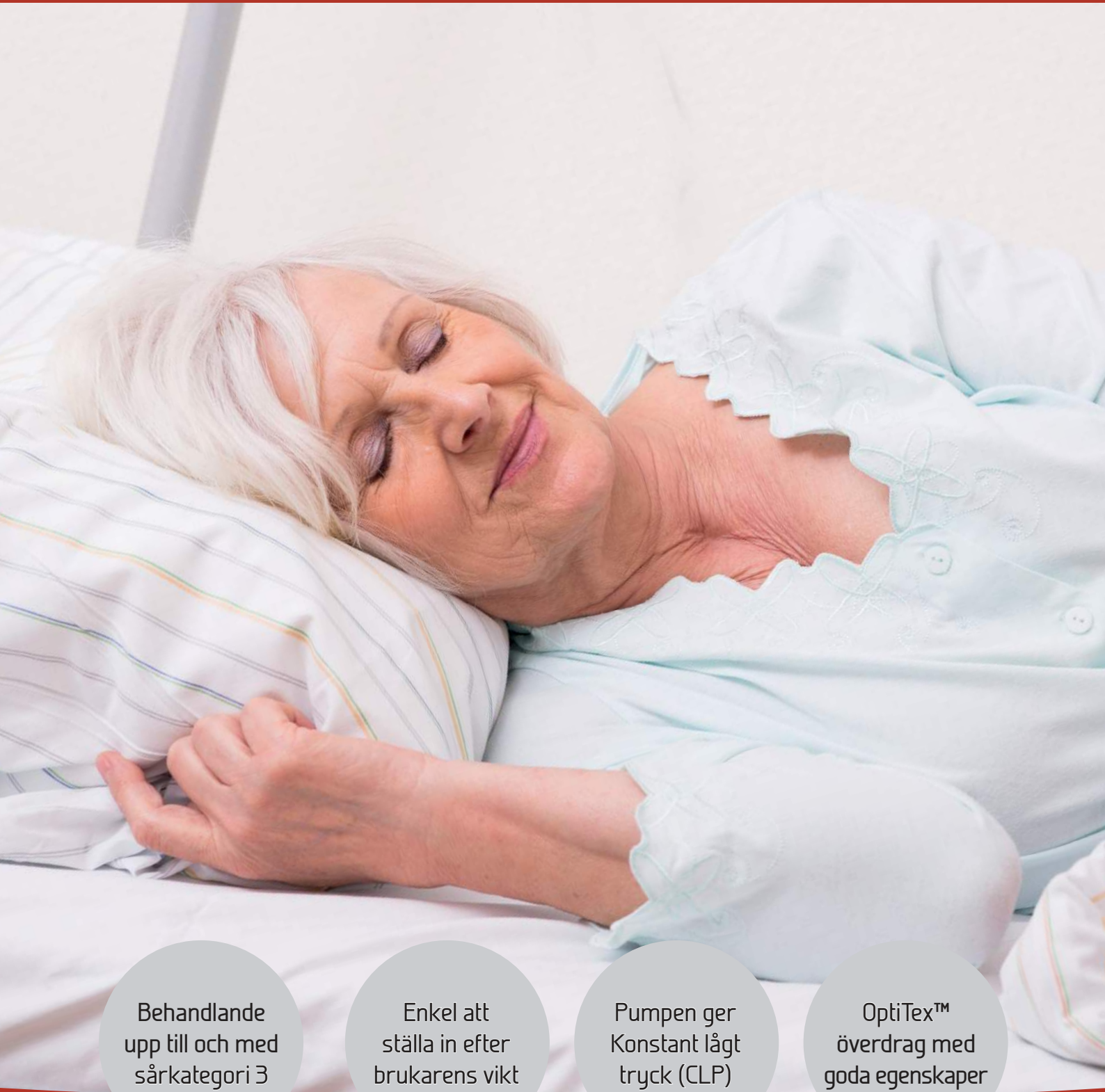

Behandlande
upp till och med
sårkategori 3

Enkel att
ställa in efter
brukarens vikt

Pumpen ger
Konstant lågt
tryck (CLP)

OptiTex™
överdrag med
goda egenskaper

*En statisk tryckavlastande luftbäddmadrass med
hygienöverdrag, manuell pump och utbytbara celler*

OPTICELL SOFT PLUS

OptiCell SOFT PLUS, är en statisk tryckavlastande luftmadrass utvecklad som ett förebyggande och behandlande hjälpmedel vid behandling av trycksår upp till och med kategori 3.

OptiCell Soft Plus är av typen bäddmadrass och placeras ovanpå en skum-madrass (ex.vis någon av Järvens standardmadrasser). OptiCell Soft Plus leve-rereras med ett slitåligt OptiTex™ överdrag och CPR-ventil för akuta lägen.

Den 13 cm tjocka madrassen har celler och överdrag som tillsammans ger en Low Air Loss-funktion samtidigt som överdraget är helt vattentätt.

OptiCell Soft Plus levereras med en energisnål, tystgående pump, OC-15, som är lätt att använda. Att fylla madrassen, som tar normalt ca 15 minuter.

EGENSKAPER – Pump och celler

Individuell anpassning utefter patientens vikt, 30–250 kg.

Omvårdnadsläge med automatisk återgång till tidigare läge efter 30 minuter.

CPR ventil – Vid akutläge där HLR behöver påbörjas öppnas CPR-ventilen för att ge en snabb lufttömning.

Alarmlfunktion – Luftpumpen har en alarmlfunktion som med både ljus- och ljudalarm som varnar för lågt tryck i madrassen.

Hälavlastning – Madrassen är utrustad med ett avlastningssystem som möjliggör enkel urkoppling av cellerna med hjälp av ett integrerat luftlås.

EGENSKAPER – OPTITEX™ ÖVERDRAG

Integrerad kabelhållare – OptiTex™ överdraget har integrerad, vattentät kabelhållare vilket förhindrar bakteriespridning, håller elsladden ur vägen och skyddar luftslangarna.

God hygien – OptiTex™ överdraget kan rengöras med desinfektionsmedel och kan även maskintvättas i 95o C.

Celler och slangar plockas enkelt ur överdraget och sköljas rena med varmt vatten (max 70o C) eller med desinfektionsmedel.

Low Air Loss funktion – OptiTex™-överdraget tillåter luft att komma ut från cellerna samtidigt som det är vattentätt. Detta minskar risken för skjuv och andra komplikationer för brukaren.

Droppskyddat vattentätt blixtlås på fyra sidor. Alla sömmar är svetsade.

Undersida med fyra resårband.

Produktspecifikationer

STANDARDSTORLEKAR 190/200/210/220x80/85/90/105/120x13 cm.
För andra storlekar vänligen kontakta Järven Health Care.

TRYCKSÅRSKATEGORI 1–3*

CELLER Utbytbara celler tillverkade i mjuk nylon/TPU (polyuretan) med Low Air Loss funktion.

ÖVERDRAG OptiTex™ bi-elastisk double-coated textil med mjuk elastisk PU.

PUMP OC-15. Ljudnivå: 21 db. 230 V / 50 Hz. En Ready-lampa visar när pumpen och madrassen är klar att använda. Om lampan inte lyser är det en indikation på att något är fel.

GARANTI 2 år på fabrikationsfel.

BRANDSTANDARD SS 876 00 01, EN 597-1 & 2.

BRUKARVIKT Intervallet 30–250 kg.

ÅTERVINNING Se bruksanvisning

VIKT Madrass 6 kg (200 x 90 cm), pump 2,0 kg

MÄRKNING tillverkningsår, månad, vecka, EAN, skötselansvisningar, uppfyllda standarder samt placering i säng.



* Trycksårskategorier definierade enligt International Pressure Ulcer Classification system.

Riktlinjer framtagna av European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) och National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), tillsammans med Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA).

