

JASMIN SÄNGGRINDSSKYDD



Bruksanvisning

Tack till ditt val av Jasmin Sänggrindsskydd. Vårt mål är att du ska bli nöjd med produkten både vad gäller funktion och livslängd. Vi ber dig därför att ägna några minuter till att läsa igenom denna bruksanvisning för att på bästa sätt hantera ditt sänggrindsskydd.

Har du några frågor som inte berörs i denna bruksanvisning ber vi dig att ta kontakt med oss på Järven Health Care. Du hittar våra kontaktuppgifter på baksidan av denna bruksanvisning.

Denna bruksanvisning innehåller information om användning, underhåll och säkerhet. Det är därför viktigt att du läst och förstått informationen för ett tryggt användande med bästa möjliga funktion.

Ett korrekt handhavande förlänger även produktens livslängd.

Vårdgivare ska ha fått relevant utbildning (antingen från Järven Health Care eller internt) samt ges tillgång till denna **bruksanvisning**.

Under inga omständigheter får sänggrindsskyddet modifieras utan skriftligt tillstånd från Järven Health Care.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning	3
Varnings- och informationsrutor	4
Viktiga säkerhetsföreskrifter	4
Innan användning	5
Innan användning	5
Avsedd användning	6
Kontraindikationer	6
Försiktighetsåtgärder	6
Förväntad livslängd	6
Vid vård i hemmet	7
Montering av sänggrindsskydd	8
Skötsel och rengöring	10
Förvaring	10
Övrigt	11
Produktansvar	11
Returer och reklamationer	11
Transportskador	11
Återvinning	11
Kvalitet	12
Märkning	12
Bruksanvisningen gäller följande produkter	12
Produktinformation	12
Etikett	13



VARNINGS- OCH INFORMATIONSRUTOR

Denna bruksanvisning innehåller information om användning, underhåll och säkerhet för Jasmin Sänggrindsskydd. Det är därför viktigt att du läst och förstått informationen för ett tryggt användande. Ett korrekt handhavande förlänger även produktens livslängd.

Vårdgivare ska ha fått relevant utbildning (antingen från Järven Health Care eller internt) samt ges tillgång till denna bruksanvisning. Vidare skall information ges om de risker som kan uppstå vid användning av elektrisk utrustning.

Under inga omständigheter får utrustningen modifieras utan skriftligt tillstånd från Järven Health Care.

Genomgående i denna bruksanvisning används rutor för att lyfta information av säkerhetskaraktär eller som är viktiga för överdragets funktion och prestanda.

Nedan exemplifieras dessa.



Varningsruta som informerar om en viktig säkerhetsaspekt eller fara. Om du inte förstår eller följer informationen kan du skada dig själv eller andra!

Informationsruta med anvisningar som, om de inte följs, kan skada produkten och/eller försämra systemets funktion och prestanda.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Produkten ska bara användas i enlighet med beskrivningen i denna bruksanvisning.
- Produkten ska inte kombineras, monteras eller repareras..
- Undvik att använda vassa föremål i närheten av produkten.
- För att undvika skador får inte produkten komma i kontakt med varma källor eller eld, till exempel glödande/brinnande cigaretter, varma lampor eller liknande.
- Ingen annan plast får ligga i direkt kontakt med ytskiktet då risken för migrering är stor (migrering=vandring av mjukgörare, färger m.m. mellan plaster). Detta kan leda till uttorkning av skiktets mjukgörare och därigenom orsaka sprickor.
- Försäkra er om att ni beställt rätt produkt till rätt ändamål.

INNAN ANVÄNDNING

Mottagande och uppackning

Jasmin Sänggringsskydd levereras hoprullad i kartong. Kniv eller vassa föremål får inte användas vid uppackning och hantering på grund av risk för skador på produkten.

Börja med att kontrollera att förpackningen inte har skadats.

Kontrollera sedan förpackningens innehåll.

Läs igenom denna bruksanvisning. Bruksanvisningen skall förvaras lättillgängligt på en plats alla som skall jobba med systemet känner till.

Vi uppmuntrar att emballaget källsorteras för minskad miljöpåverkan.



Om Jasmin Sänggrindsskydd används med andra medicintekniska produkter är det vårdgivarens ansvar att säkerhets- och överensstämmelsekrav uppfylls.



Du måste ha läst och förstått denna bruksanvisning innan du använder produkten. Detta gäller även vid vård i hemmet.

Vid allvarliga tillbud som inträffar i samband med produkten ska detta omgående rapporteras till Järven Health Care och behörig myndighet.

Undvik att knivar, nyckelknipor eller andra föremål med punkterande eller skärande egenskaper kommer i kontakt med sänggrindsskyddet för att undvika skada på produkten.

AVSEDD ANVÄNDNING

Jasmin sänggrindsskydd är avsett att användas tillsammans med en sänggrind för att skapa en tryggare vårdplats. Sänggrindsskyddet utgör en viktig del av en vårdsängen och minskar risken för slag, skrap och klämskador.

Det kan även användas inom områdena handikappomsorg, funktionshindrade, gruppboenden, hemsjukvård samt BB/förlossning.

Jasmin Sänggrindsskydd kan användas i följande miljöer, definierade i standard IEC 60601-2-52

- Användningsmiljö 1 (akutvård).
- Användningsmiljö 2 (korttidsvård på sjukhus eller andra sjukvårdsinrättningar).
- Användningsmiljö 3 (långtidsvård på sjukvårdsinrättningar).
- Användningsmiljö 4 (vård i hemmiljö).
- Användningsmiljö 5 (poliklinikpatienter eller öppenvård).

Kontraindikationer

Jasmin Sänggrindsskydd får inte användas:

- om produkten är kontaminerad eller bristfälligt rengjord.
- om produkten inte har mått anpassade för aktuell säng.
- i kombination med annat än godkänd sänggrind.

Försiktighetsåtgärder

Om patienten är dement, orolig eller riskerar att fastna med huvud, armar och fötter under sänggrindsskyddet rekommenderas sänggrindsskydd med kappa.

Förväntad livslängd

följ alltid våra skötselråd för längsta möjliga livslängd med bibehållen funktion.

Förväntad livslängd är 5 år.

VID VÅRD I HEMMET

Innan Jasmin Sänggrindsskydd placeras ut och används i hemmiljö måste den personal eller anhörig som skall sänggrindsskyddet läst och förstått bruksanvisningen samt fått relevant utbildning av kunnig personal eller Järven Health Care.

Tänk också på att husdjur inte får komma i kontakt med sänggrindsskyddet för att minska risken för skador på materialet.

Övriga säkerhetsaspekter som denna bruksanvisning tar upp gäller även vid hemvård.



För att sänggrindsskyddet ska fungera på ett korrekt sätt är det viktigt att sängen är anpassad för detta samt har ett godkänt sänggrindsskydd. Det är vårdgivarens ansvar att rätt säng används.

Att tänka på vid installation av madrass i hemmiljö

I samband med placering av sänggrindsskyddet i hemmet måste särskild hänsyn tas till:

- Att sängen har en godkänt sänggrind.
- Att inga obehöriga hanterar sänggrindsskyddet.
- Att inga husdjur kan komma i kontakt med produkten.
- Att bruksanvisning finns tillgänglig.



MONTERING AV SÄNGGRINDSSKYDD

Innan du monterar Jasmin Sänggrindsskydd säkerställ att sänggrindsskyddets mått är anpassade till sängmodellen.

Jasmin sänggrindsskydd finns i två modeller

- **Integrerad** med tryckknappar på kortsidorna
- **Tehuvemodell** med svetsade kortsidor

Dessa båda modeller kan levereras med eller utan kappan. Kappan är avsedd att förhindra att patienten får hand eller fingrar under sänggrindsskyddet.

Beroende på modell skiljer sig montering åt även om grundförfarandet är detsamma.

Om madrass och sängkläder redan är placerade på sängbotten dras dessa åt sidan för att underlätta monteringen av sänggrindsskydd.

JASMIN SÄNGGRINDSSKYDD, INTEGRERAD

- 1 Sänggrindsskyddet hängs över sänggrinden så att tryckknapparna möts (*se bild 1, nästa sida*)
- 2 Alla tryckknappar knäpps samman. (*se bild 2, nästa sida*)
- 3 Om sänggrindsskyddet har kappan läggs denna på sängbotten innan madrassen placeras ovanpå kappan (*se bild 3, nästa sida*)
- 4 Kontrollera att sänggrindsskyddet sitter fast på ett bra och säkert sätt.

JASMIN SÄNGGRINDSSKYDD, TEHUVEMODELL

- 1 Sänggrindsskyddet träs över sänggrinden
- 2 Om har sänggrindsskyddet kappan läggs denna på sängbotten innan madrassen placeras ovanpå kappan (*se bild 3, nästa sida*)
- 3 Kontrollera att sänggrindsskyddet sitter fast på ett bra och säkert sätt.



För att sänggrindsskyddet ska fungera på ett korrekt sätt är det viktigt att produktens mått är anpassade för den aktuella sänggrinden.



Bild 1



Bild 2



Bild 3

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

- Kontrollera regelbundet sänggrindsskyddet för synliga tecken på skador eller slitage, exempelvis revor, sprickor, hål, fläckar eller färgning.
- Ytskiktet rengöres med tvålbaserade rengöringsmedel. Se till att använda rekommenderade spädningsförhållanden för rengöringsmedlet. Använd aldrig koncentrat.
- Klorhaltiga preparat får ej användas!
- Desinficering sker med alkoholbaserat rengöringsmedel med tensider.
- Ingen annan plast får ligga i direkt kontakt med ytskiktet och/eller polyuretanöverdraget då risken för migrering är stor. Detta kan leda till uttorkning av skiktets mjukgörare och därigenom orsaka sprickor.
- Sköljmedel/mjukgörare förstör ytskiktets/överdragets vätsketäthet och får EJ användas.



Vid användning av rengöringsmedel eller andra kemikalier är det viktigt att beakta de instruktioner och säkerhetsföreskrifter som finns för respektive rengöringsmedel.

Se säkerhetsdata blad för de rengöringsmedel som används.

FÖRVARING

Förvara Jasmin Sänggrindsskydd i torra, rumstempererade lokaler. Undvik direkt solljus.

ÖVRIGT

PRODUKTANSVAR

Med produktansvar avses tillverkarens, importörens eller försäljarens lagstadgade skadeståndsansvar för eventuella skador som produkten orsakat. Produktansvarslagen (EU-direktiv 85/374/EEG, Svensk lag SFS 1992:18) fastställer tillverkarens, importörens eller försäljarens lagstadgade skadeståndsansvar för eventuella skador som produkten orsakat. Reglerna gäller för fysiska produkter i form av lösa föremål men även för produkter som kopplas ihop med andra lösa föremål eller fast egendom. Finns det ingen produkt som orsakat någon form av egendoms- eller personskada är produktansvarslagstiftningen inte relevant.

RETURER OCH REKLAMATIONER

Reklamationer skall skriftligen anmälas till Järven Health Care. Retur av produkt skall efter godkänt reklamationsärende ske enligt våra instruktioner. Returneras produkt innan reklamationsärendet är godkänt räknas ärendet som avslutat och ersättning till kund betalas inte ut.

TRANSPORTSKADOR

Transportskada skall noteras på fraktsedeln innan påskrift för att vara giltig. Därefter kontaktar ni kundtjänst på Järven Health Care (0660-22 28 50, healthcare@jarven.se) och lämnar relevant information.

OBS! För snabbare behandling av ditt ärende ber vi dig fotografera transportskadan så utförligt som möjligt innan ni kontaktar kundtjänst.

ÅTERVINNING

Jasmin Sänggrindsskydd är helt energiåtervinningsbart och skall sorteras som brännbart avfall. Ingen demontering är nödvändig.

KVALITET

CE-MÄRKNING

Jasmin Sänggrindsskydd är CE-märkt enligt MDR 2017/745. Detta innebär att Järven Health Care har tillverkaransvaret och försäkrar att produkten uppfyller de väsentliga kraven samt att det finns teknisk dokumentation och försäkran som bevaras i minst tio år.

KVALITETSARBETE

Vårt kvalitetsarbete och kundfokus förverkligas genom att vara lyhörd för våra kunders behov och förväntningar samt i alla avseenden verka för ett samarbete som bygger på långsiktighet och förtroende. Ständiga förbättringar av våra produkter och tjänster är grunden till vår förmåga att tillfredsställa kunderna i dag och i framtiden. I vårt grundläggande kvalitetsarbete ingår också att finna utvärderingsmetoder och standarder som erbjuder kunden en säkerställd kvalitet gällande komfort, funktion, hållbarhet och pris.

Järven Health Care fokuserar särskilt på att genom kompetenta och engagerade medarbetare kontinuerligt fortbilda och kompetensutveckla vårdens personal. Det är vår förhoppning att det ska leda till att de genom rätt produktval kan bedriva en högkvalitativ vård med inriktning på att förebygga trycksår, vårdrelaterade infektioner och minska bränder som uppkommer i vården.

BRUKSANVISNINGEN GÄLLER FÖLJANDE PRODUKTER

Jasmin Sänggrindsskydd

PRODUKTINFORMATION

Jasmin Sänggrindsskydd


Jasmin sänggrindsskydd placeras enkelt på sänggrinden för att skapa en tryggare vårdplats. Sänggrindsskyddet utgör en viktig del av en vårdsängen och minskar risken för slag, skrap och klämskador.

Sänggrindsskyddet, som är polstrat, finns i olika modeller beroende på sängmodell och patientens behov. För patienter som riskerar att fastna med händerna under sänggrinden rekommenderas en modell med kappa som stoppas in under madrassen.


MÄRKNING

ETIKETT

Nedan följer exempel på produktens märkning. Etikettens utseende kan variera.

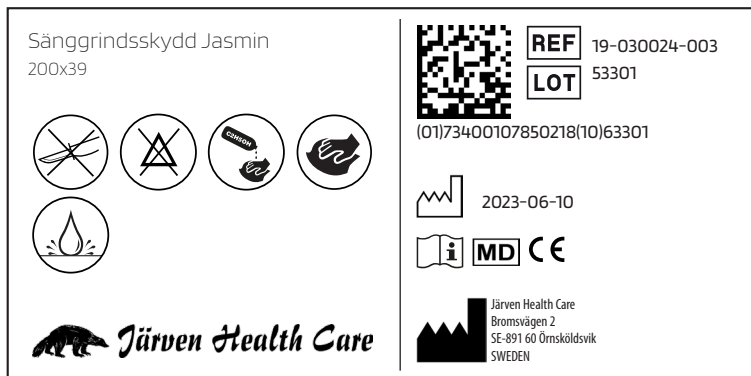

7.2 SYMBOLER

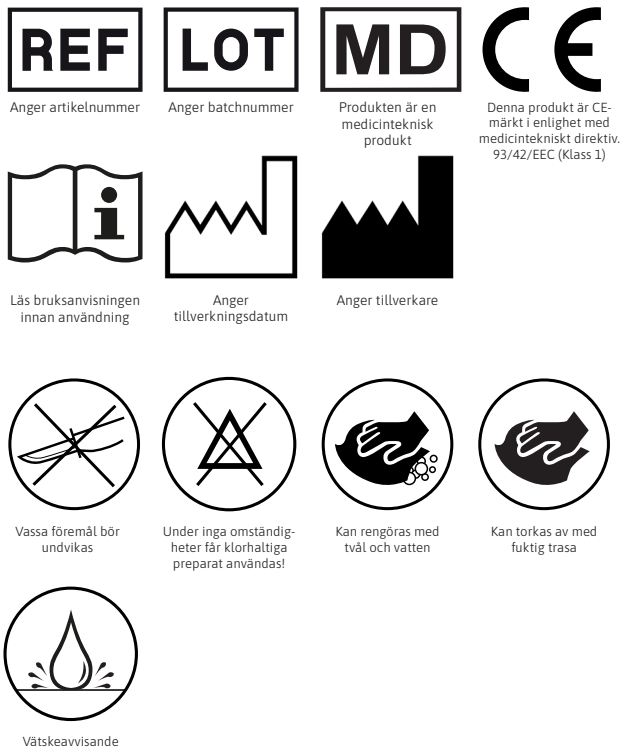

**Bruksanvisning för Jasmin Sänggrindsskydd.**

Alla varumärken tillhör respektive ägare. Järven AB förbehåller sig rätten att uppdatera denna bruksanvisning vid behov och/eller påträffande av eventuella stav- eller faktafel.

Ytterligare exemplar kan beställas från Järven Health Care.

Kopiering för internt bruk är tillåten



Järven AB, Bromsvägen 3
SE-891 60 Örnsköldsvik
SWEDEN

Telefon: 0660-22 28 50
Telefax: 0660-824 10
E-post: healthcare@jarven.se

www.jarven.se