



# MELISSA BASIC - *Bäddmadrass*

En prisvärd bäddmadrass med tryckavlastande egenskaper

Med Melissa Basic bäddmadrass får du en prisvärd bäddmadrass utvecklad för att minska risken för uppkomst av trycksår, kategori 1. Med en tjocklek på 6 cm och tryckavlastande egenskaper är den ett bra komplementet till din befintliga sjukvårdsmadrass.

- **HÖGELASTISKT KALLSKUM.** Melissa Basic bäddmadrass har ett höglastiskt kallsaum som ger en hållbar och stabil bäddmadrass.
- **VÄTSKETÄTT ÖVERDRAG MED ELLER UTAN RESÅR.** Bäddmadrassen levereras med ett prasselfritt RX-överdrag. Överdraget kan levereras med resårband i hörnen för att hålla bäddmadrassen på plats.
- **VÄNDBAR SKUMKÄRNA.** Bäddmadrassens skumkärna kan både vändas och roteras utan att dess egenskaper förändras. Genom att utnyttja detta förlängs livslängden på din Melissa Basic bäddmadrass




# MELISSA BASIC - *Bäddmadrass*

## ETT UTMÄRKT KOMPLIMENT TILL DIN SJUKVÅRDSMADRASS.

Melissa Basic bäddmadrass är framtagen för att ge tryckavlastning och komfort och kan även användas som underläggs- och distansmadrass. Det tvåstretchiga hygienöverdraget är även designat för att minska risken för skjuv.

### Vätsketätt överdrag med goda egenskaper

Melissa Basic bäddmadrass levereras med RX-överdrag. Ett hygienöverdrag tillverkat av ånggenomsläpplig och prasselfri 2-stretchig poluretanväv. Kan även levereras med resår i hörnen (RX-Resår) för att hålla bäddmadrassen på plats. Överdraget har dragkedja med droppkant på 3 sidor för att underlätta den dagliga skötseln av madrassen.

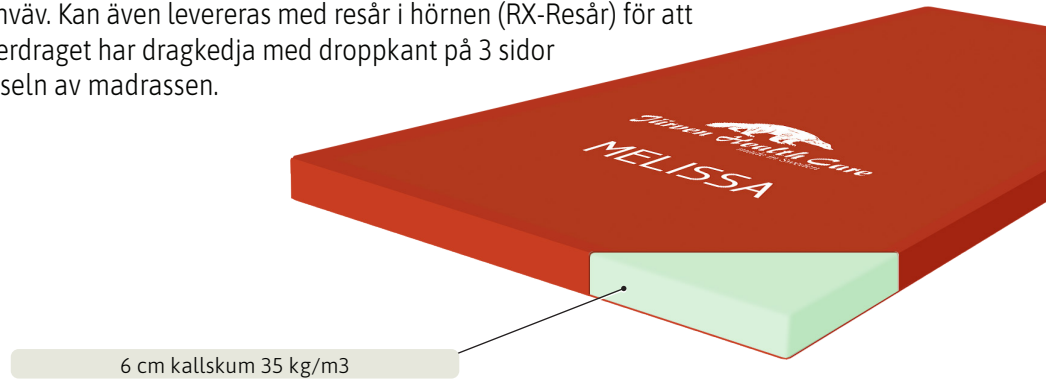

## STANDARD FÖR OBJEKTIV UTVÄRDERING AV MADRASSERS TRYCKAVLASTANDE EGENSKAPER.

För att få en objektiv bedömning av madrassers tryckavlastande egenskaper har RISE utvecklat en standard där man med intryckskroppar mäter det faktiska mottrycket en madrass ger. Mätmetoden är beskriven i Svensk standard SS 876 00 13. Bäddmadrassen har testats på en 12 cm sjukvårdsmadrass.

Melissa Basic bäddmadrass har testats av RISE enligt mätmetod SS 876 00 13 och är tryckavlastande till och med sårkategori 1.

### Testresultatet redovisas nedan.

| Belastning               | Extra låg | Låg         | Medel       | Hög         |
|--------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Stor intryckskropp 300 N | < 30,0    | 30,0 - 34,9 | 35,0 - 39,9 | 40,0 - 44,9 |
| Stor intryckskropp 600 N | < 45,0    | 45,0 - 52,9 | 53,0 - 60,9 | 61,0 - 68,9 |
| Liten intryckskropp 40 N | < 45,0    | 45,0 - 52,9 | 53,0 - 60,9 | 61,0 - 68,9 |

| Madrass                    | Stor intryckskropp 300 N | Stor intryckskropp 600 N | Liten intryckskropp 40 N |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Melissa Basic, bäddmadrass | 34                       | 52                       | 60                       |

## PRODUKTSPECIFIKATIONER



|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Material</b>    | 6 cm kallsaum 35 kg/m <sup>3</sup>  |
| <b>Storlekar</b>   | 200/205/210 x 80/85/90/105/120 x 6 cm<br>(För andra storlekar kontakta Järven Health Care.) |
| <b>Sårkategori</b> | Till och med kategori 1   |
| <b>Madrassvikt</b> | ca 4 kg beroende på längd och bredd   |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Brukarvikt</b>  | Upp till och med 180 kg.   |
| <b>Brand</b>       | SS 87600 01, normalrisk (testmetod EN 597-1 & 2)   |
| <b>Återvinning</b> | Madrass med överdrag är helt återvinningsbar. Sorteras som brännbart avfall. Demontering krävs ej.                     |
| <b>Märkning</b>    | Tillverkningsår, månad, dag, EAN, skötselansvisningar, kontaktinformation, uppfyllda standarder samt placering i säng. |



Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN  
 Telefon: 0660 - 22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10  
[www.jarven.se](http://www.jarven.se) | [healthcare@jarven.se](mailto:healthcare@jarven.se)