



# MELISSA HEAVY

**Stabil sjukvårdsmadrass med extra lågt tryck oavsett brukarvikt.**

Melissa Heavy är en 18 cm hög sjukvårdsmadrass i Melissa-serien som är godkänd för 250 kg brukarvikt som samtidigt passar patienter med normalvikt. Madrassen som är stabil och stadig ger extra lågt mottryck och är utvecklad för att minska risken för trycksår upp till och med kategori 3.

- **GODKÄND FÖR 250 KG BRUKARVIKT.** Melissa Heavy har en stadig och stabil konstruktion som möjliggör brukarvikter på upp till 250 kg.
- **UPP TILL OCH MED SÅRKATEGORI 3.** Det omsorgsfulla valet av skumkvaliteter ger madrassen ett extra lågt mottryck och används som ett behandlande hjälpmedel till och med sårkategori 3
- **TRE VALBARA VÄTSKETÄTA ÖVERDRAG.** Våra prasselfria RX-överdrag är vätsketäta för att förhindra blod och andra kroppsvätskor att tränga in till madrassens skumkärna.
  - RX-5 Basöverdrag
  - RXH-5 Med handtag för förflyttning av madrass
  - RXI-5 Med handtag och evakueringsfunktion



# MELISSA HEAVY

UTVECKLAD FÖR ATT GE GOD TRYCKAVLASTNING ÄVEN FÖR TYNGRE BRUKARE.

## Melissa Heavy är en stabil och trygg sjukvårdsmadrass

Skumkärnans sammansättning är omsorgsfullt utformad för att kunna hantera brukarvikter upp till 250 kg. Ett 12 cm höglastiskt skum (50 kg/m<sup>3</sup>) kombinerat med ett 6 cm viskoelastiskt skum (50 kg/m<sup>3</sup>) ger en stabil och bekväm sjukvårdsmadrass med mycket goda tryckavlastande egenskaper.


Madrassen är utvecklad som ett hjälpmedel vid behandling av patienter med trycksår upp till kategori 3.

## Vätsketätt överdrag med goda egenskaper

Melissa Heavy levereras med ett överdrag ur RX-serien. En serie överdrag tillverkade av ånggenomsläpplig och prasselfri 2-stretchig poluretanyl. Överdraget har dragkedja på 3 eller 4 sidor (RXI-5) för att underlätta den dagliga skötseln av madrassen. Samtliga dragkedjor har droppkant.

## Melissa Heavy erbjuder slutfunktion

Madrassen har genomgått utmattningstest enligt standard SS 876 00 11 med goda resultat. Madrassen erbjuder därigenom slutfunktion med höjt rygggläge i säng samt vid sängkant.

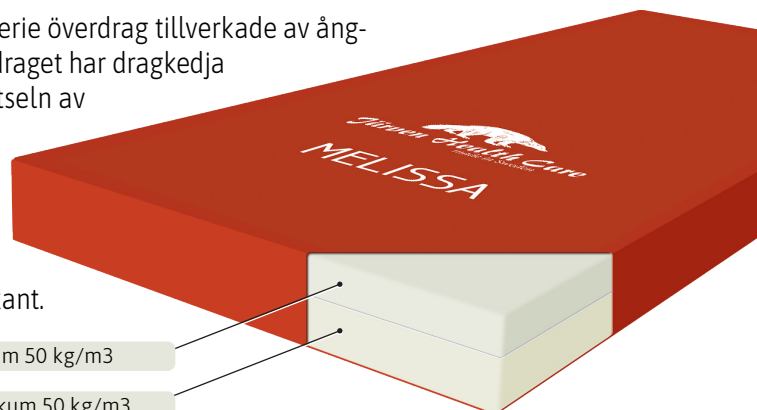

6 cm viskoelastiskt skum 50 kg/m<sup>3</sup>

12 cm höglastiskt kallsaum 50 kg/m<sup>3</sup>

## STANDARD FÖR OBJEKTIV UTVÄRDERING AV MADRASSERS TRYCKAVLASTANDE EGENSKAPER.

För att få en objektiv bedömning av madrassers tryckavlastande egenskaper har RISE utvecklat en standard där man med intryckskroppar mäter det faktiska mottrycket i en madrass. Mätmetoden är beskriven i Svensk standard SS 876 00 13.

Melissa Heavy har testats av RISE enligt mätmetod SS 876 00 13 och är tryckavlastande till och med sårkategori 3.

## Testresultatet redovisas nedan.

| Belastning               | Extra låg | Låg         | Medel       | Hög         |
|--------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Stor intryckskropp 300 N | < 30,0    | 30,0 - 34,9 | 35,0 - 39,9 | 40,0 - 44,9 |
| Stor intryckskropp 600 N | < 45,0    | 45,0 - 52,9 | 53,0 - 60,9 | 61,0 - 68,9 |
| Liten intryckskropp 40 N | < 45,0    | 45,0 - 52,9 | 53,0 - 60,9 | 61,0 - 68,9 |

| Madrass              | Stor intryckskropp 300 N | Stor intryckskropp 600 N | Liten intryckskropp 40 N |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Melissa Heavy, 18 cm | 26                       | 41                       | 43                       |

## PRODUKTSPECIFIKATIONER



|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Material</b>    | 6 cm viskoelastiskt skum 50kg/m <sup>3</sup><br>12 höglastiskt kallsaum 50kg/m <sup>3</sup> , |
| <b>Storlekar</b>   | 200/205 x 80/85/90/105/120 x 18 cm<br>(För andra storlekar kontakta Järven Health Care.)      |
| <b>Sårkategori</b> | Till och med kategori 3   |
| <b>Madrassvikt</b> | ca 16 kg beroende på längd och bredd  |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Brukarvikt</b>  | Upp till och med 250 kg.  |
| <b>Brand</b>       | SS 87600 01, normalrisk (testmetod EN 597-1 & 2)  |
| <b>Återvinning</b> | Madrass med överdrag är helt återvinningsbar. Sorteras som brännbart avfall (demontering krävs ej)                    |
| <b>Märkning</b>    | Tillverkningsår, månad, dag, EAN, skötselanvisningar, kontaktinformation, uppfyllda standarder samt placering i säng. |



Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN  
Telefon: 0660 - 22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10  
www.jarven.se | healthcare@jarven.se