

OPTICELL 2 PRO^{V2}



TRUE ALTERNATING
FÖR EN MER BEKVÄM
UPPLEVELSE



LÅGT TRYCK
OBEROENDE AV
ANVÄNDARENS VIKT



ALTERNERANDE
ELLER STATISKT
LÅGT LUFTRYCK



MULTI ZONE-
FÖR ENKEL BORT-
KOPPLING AV CELLER



INFEKTIONSKONTROLL
MED OPTITEX 4-VÄGS
HYGIEN-SKYDD



KABELHÅLLARE
FÖR KABLAR OCH
LUFTSLANGAR

*Ett helautomatiskt växlande luftmadrasssystem med
vårt unika OptiTexTM-hygienöverdrag.*

OPTICELL 2 PRO V2

OptiCell 2 PRO V2 är en helautomatisk tryckavlastande madrass med växeltryck, som används direkt på sängbotten. Den är uppbyggd av luftceller, Cell-on-Cell (N6 och N8) eller en kombination av luft och skum (N7 och Evac), och används tillsammans med en medföljande pump. OptiCell 2 PRO V2 är utvecklad som ett hjälpmedel vid förebyggande och behandling av trycksår upp till och med kategori 4.

Madrasen levereras med ett slitåligt OptiTex™ överdrag och CPR-ventil för akuta lägen.

Den medföljande pumpen, som både kan ge statiskt och alternerande tryck är enkel att använda och ställer automatiskt in sig efter brukarens vikt, längd, läge, rörelser och position i sängen.

MADRASSMODELL	MADRASSHÖJD	MAX BRUKARVIKT	MATERIAL LUFTCELLER	MADRASSTYP	SÅRKATEGORI
N6	16 cm	230 kg	Nylon/TPU	Cell-on-Cell	4
N7	18 cm	230 kg	Nylon/TPU	Luft/Skum	4
N8	20 cm	250 kg	Nylon/TPU	Cell-on-Cell	4
Evac	20 cm	230 kg	Nylon/TPU	Luft/Skum	4

Funktioner - Pump

KOMFORTFUNKTION med sex olika komfortlägen.

OMVÅRDNADSLÄGE med automatisk återgång efter 30 minuter.

TRANSPORTLÄGE madrasen kan ställas i transportläge och behåller maximalt lufttryck i minst 12 timmar.

KNAPPLÅS för att minska risken att pumpens funktion förändras.

CPR VENTIL – Vid akutläge där HLR behöver påbörjas öppnas CPR-ventilen för att ge en snabb lufttömning.

EXTRA LÅNG ELKABEL Levereras med en 6 meter lång kabel.

Funktioner - OptiTex™ överdrag

INTEGRERAD KABELHÅLLARE minskar risken för bakteriespridning och skyddar luftslangar och elkablar.

GOD HYGIEN, hela överdraget kan maskintvättas i 95°C. Celler och slangar kan enkelt tas bort från överdraget och sköljas rena med varmt vatten eller med desinfektionsmedel.

HALSKYDDANDE BAS MED FYRA FÄSTREMMAR.

DROPPTÄT, VATTENTÄT DRAGKEDJA på fyra sidor med svetsade sömmar.


FYRA HANDTAG för enkel förflyttning av madrasen.



PUMP MED GENOMTÄNKT KONSTRUKTION
Pumpens panel är lättanvänd och kan enkelt rengöras för minskad risk för smittspridning.



TOTAL AVLASTNING
Alla cellerna kan enkelt, utan verktyg, frigöras för total avlastning.

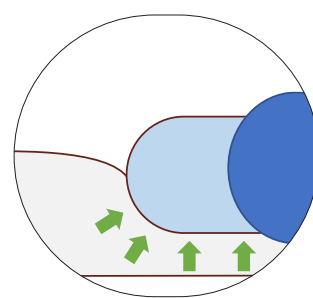

NEDSÄNKNING & OMSLUTNING
detvåviktigastebiomekaniskaegenskaperna för att minska risken för trycksår

OPTICELL 2 PRO^{V2} EVAC med integrerad evakueringsfunktion

OptiCell 2 PRO^{Evac} har utformats för att tillgodose sjukvårdens behov av att på ett säkert sätt kunna evakuera patienter på luftmadrasssystem, patienter som ofta är de som har svårast att fly från brand och andra akuta risker på egen hand.

Med patienten på madrasen kan evakueringen ske på ett säkert sätt tack vare den genomtänkta designen. Testad och uppfyller SS876 00 39:2022.

STANDARDSTORLEKAR 200/210/220 X 80/85/90/105/120 x 16/18/20 cm. ■ **CELLER** Madrasen har utbytbara celler tillverkade i mjuk nylon/TPU
HYGIENÖVERDRAG OptiTex™ 4-vägs hygienöverdrag i mjuk, elastisk PU. ■ **PUMP** OC20, en avancerad pump som anpassar sig efter brukarens vikt.
LJUDNIVÅ 21 db. ■ **BRANDSTANDARD** SS 876 00 01, EN 597-1 and 2. ■ **VIKT** Madrass (200 x 90 cm) 9 kg, pump 3,4 kg.