



BRUKSANVISNING

Järven Hjärtbräda



Järven Health Care

Tack till ditt val av Järven Hjärtbräda. Vårt mål är att du ska bli nöjd med produkten både vad gäller funktion och livslängd. Vi ber dig därför att ägna några minuter till att läsa igenom denna bruksanvisning för att på bästa sätt hantera din produkt. Har du några frågor som inte berörs i denna bruksanvisning ber vi dig att ta kontakt med oss på Järven Health Care. Du hittar våra kontaktuppgifter på baksidan av denna bruksanvisning.

Varnings- och informationsrutor



Varningsruta som informerar om en viktig säkerhetsaspekt eller fara. Om du inte förstår eller följer informationen kan du skada dig själv eller andra!

Informationsruta med anvisningar som, om de inte följs, kan skada och/eller försämra produkten.

CE-Märkning

Järvens Health Cares madrasser och överdrag är CE-märkta enligt MDR 2017/745. Märkningen innebär att Järven Health Care har tillverkaransvaret och försäkrar att produkten uppfyller de väsentliga kraven samt att det finns teknisk dokumentation samt försäkran som ska bevaras i minst tio år.



Kvalitetsarbete

Vårt kvalitetsarbete och kundfokus förverkligas genom att vara lyhörd för kunders behov och förväntningar samt att i alla avseenden verka för ett samarbete som bygger på långsiktighet och förtroende.

Ständiga förbättringar av våra produkter och tjänster är grunden till vår förmåga att tillfredsställa våra nuvarande och framtida kunder. I vårt grundläggande kvalitetsarbete ingår också att finna utvärderingsmetoder och standarder som erbjuder kunden en säkerställd kvalitét gällande komfort, funktion, hållbarhet och pris.

Järven Health Care fokuserar särskilt på att, genom kompetenta och engagerade medarbetare, kontinuerligt fortbilda och kompetensutveckla vårdpersonal. Vår förhoppning är att det ska leda till en högkvalitativ vård med inriktning på att förebygga trycksår och vårdrelaterade infektioner samt minska antalet bränder som uppkommer i vården.

Innehållsförteckning

Inledning	2
Varnings- och informationsrutor	2
CE-märkning	2
Kvalitetsarbete	2
Innehållsförteckning	3
Säkerhetsföreskrifter	4
Produktinformation	5
Järven Hjärtbräda	5
Avsedd användning	5
Kontraindikationer	5
Vid vård i hemmet	5
Handhavande	6
Mottagande och uppackning	6
Instruktioner vid användning	6
Skötsel och rengöring	7
Förvaring	7
Förväntad livslängd	7
Märkning	8
Produkten är märkt med	8
Symbolförklaring	9
Övrigt	10
Produktansvar	10
Returer och reklamationer	10
Transportskador	10
Miljö och återvinning	10
Kontaktinformation	12

Säkerhetsföreskrifter

Läs följande information innan ni använder er Hjärtbräda!

Bruksanvisningen skall förvaras lättillgänglig, på en plats där alla som skall jobba med produkten, känner till.

- **Produkten ska bara användas i enlighet med denna bruksanvisning.**
- Produkten ska inte kombineras, monteras eller repareras.
- Undvik att använda vassa föremål i närheten av produkten.
- För att undvika skador får inte produkten komma i kontakt med varma källor eller eld, till exempel glödande/brinnande cigaretter, varma lampor eller liknande.
- Vid eventuella olyckor och tillbud som har inträffat i samband med våra produkter skall Järven Health Care kontaktas.

Produktinformation

Järven Hjärtbräda

Järven Hjärtbräda är en slagtålig och hygienisk hjärtbräda tillverkad i hårdplast och utvecklad i nära samarbete med erfaren HLR (Hjärt-Lung-Räddnings)-personal.

Avsedd användning

Hjärtbrädan skall användas vid HLR-situation, för patienter liggande i ryggläge. Hjärtbrädan placeras mellan patient och madrass för att skapa ett hårt underlag vid HLR (hjärt- och lungräddning).

Kontraindikationer

Järven Hjärtbräda får inte:

- användas om personalen inte är utbildad i HLR.
- placeras permanent under patient då sjukvårdsmadrassens tryckavlastande egenskaper omintetgörs.



Om Järven Hjärtbräda används med andra medicintekniska produkter är det vårdgivarens ansvar att säkerhets- och överensstämmelsekrav uppfylls.

Vid vård i hemmet

Innan Järven Hjärtbräda placeras i hemmiljö måste den personal eller anhörig som skall hantera Hjärtbrädan, läst och förstått bruksanvisningen samt fått relevant utbildning av utbildad personal.

Övriga säkerhetsaspekter som denna bruksanvisning tar upp gäller även vid hemvård.

Att tänka på vid vård i hemmiljö

I samband med placering av Hjärtbrädan i hemmet måste särskild hänsyn tas till:

- Att inga obehöriga hanterar Hjärtbrädan.
- Att bruksanvisning finns tillgänglig.

Handhavande

Mottagande och uppackning

Järven Hjärtbräda levereras inplastad i återvinningsbar plast. Börja med att kontrollera att varan inte är skadad. Vid eventuell transportskada, se *sid 10*.

Ta bort plastförpackningen. **Användning av kniv bör undvikas vid uppackning och hantering på grund av risk för skador på Hjärtbrädan.**

Vi uppmanar till att källsortera emballaget för minskad miljöpåverkan.

Instruktioner vid användning

Vid en HLR-situation där Hjärtbrädan ska användas, följ dessa steg:



Påbörja HLR omedelbart och be någon hämta Hjärtbrädan.

1. **Förbered för placering av brädan:**
 - Om möjligt, lyft patientens överkropp med hjälp av en annan person.
(Alternativt, rulla försiktigt patienten åt sidan och skjut in brädan så att den hamnar i höjd med bröstkorgen.)
2. **Placera Hjärtbrädan** under patientens rygg, direkt under bröstkorgen.
3. **Säkerställ rätt position:**
 - Patienten ska ligga på rygg.
 - Huvudet ska vara plant eller lätt bakåtböjt för att hålla luftvägarna fria.
4. **Fortsätt sedan HLR enligt gällande riktlinjer.**

Förvaring

Förvara Järven Hjärtbräda i torra, rumstempererade lokaler. **Undvik direkt solljus.**

Hjärtbrädan bör förvaras upphängd på plan yta, alternativt ställd på högkant eller på sidan. Förvaras **ej** nära heta källor, som exempelvis element eller maskiner som avger värme.

Förväntad livslängd

Följ alltid våra skötselråd för längsta möjliga livslängd med bibehållen funktion.

Förväntad livslängd är 5 år.

Skötsel och rengöring

Kontrollera regelbundet hjärtbrädan för synliga tecken på skador eller slitage, exempelvis sprickor, eller andra skador.

Efter användning: Rengör och desinficera Hjärtbrädan enligt instruktionerna nedan.

- Kontrollera så att Hjärtbrädan är i gott skick för framtida användning.
- Rengöring sker med tvålbaserade rengöringsmedel. Se till att använda rekommenderade spädningsförhållanden för rengöringsmedlet. **Använd aldrig koncentrat.**
- Klorhaltiga preparat får **ej** användas!
- Desinficering sker med alkoholbaserat rengöringsmedel med tensider.



Vid användning av rengöringsmedel eller andra kemikalier är det viktigt att beakta de instruktioner och säkerhetsföreskrifter som finns för respektive rengöringsmedel. Se säkerhetsdata blad för de rengöringsmedel som används

Märkning

Produkten är märkt med:

Produktnamn, Storlek

Artikelnummer

Ordernummer

Tillverkningsdatum (år-månad- dag)

Produktspecifik information (såsom tvättinstruktioner etc.)

CE-märkning, MD-märkning samt Information om att läsa bruksanvisning

Tillverkare

EAN eller QR-kod

Nedan följer exempel på märkning. Notera dock att märkningen kan variera



Järven Health Care

Hjärtbräda

70x50x1 cm

REF 19-000000-001

LOT 12345



2023-03-29



7340010708026



MD

CE



Järven Health Care
Bromsvägen 2
SE-891 60 Örnsköldsvik
SWEDEN



Järven Health Care
HJÄRTBRÄDA

**PLACERAS OVANPÅ MADRASSEN
UNDER PATIENTEN!**

RENGÖRING: Avtorkas med milda
rengöringsmedel. Desinficeras med
alkohol innehållande tensider.

CE



Järven Health Care
Bromsvägen 2
891 60 ÖRNSKÖLDSVIK
0660-22 28 50 | healthcare@jarven.se
www.jarven.se
Scanra koden för mer produktinfo!



7 340010 708026 >

Symbolförklaring



Anger artikelnummer



Anger batchnummer



Produkten är en
medicinteknisk
produkt



Läs bruksanvisningen
innan användning




Anger
tillverkningsdatum



Anger tillverkare




Denna produkt är CE-
märkt i enlighet
med MDR 2017/745
(Klass 1)

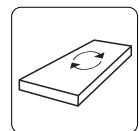

Får vändas och roteras



Vätskeavvisande

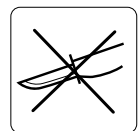

Vassa föremål bör
undvikas



Kan desinficeras med
alkoholbaserade
tensider



Kan torkas av med
fuktig trasa

Övrigt

Produktansvar

Med produktansvar avses tillverkarens, importörens eller försäljarens lagstadgade skadeståndsansvar för eventuella skador som produkten orsakat. Produktansvarslagen fastställer tillverkarens, importörens eller försäljarens lagstadgade skadeståndsansvar för eventuella skador som produkten orsakat. Reglerna gäller för fysiska produkter i form av lösa föremål men även för produkter som kopplas ihop med andra lösa föremål eller fast egendom. Finns det ingen produkt som orsakat någon form av egendoms- eller personskada är produktansvarslagstiftningen inte relevant.

Returer och reklamationer

Reklamationer skall skriftligen anmälas till Järven Health Care. Retur av produkt skall efter godkänt reklimationsärende ske enligt våra instruktioner. Returneras produkt innan reklimationsärendet är godkänt räknas ärendet som avslutat och ersättning till kund betalas inte ut.

Transportskador

Transportskada skall noteras på fraktsedeln innan påskrift för att vara giltig. Därefter kontaktar ni kundtjänst på Järven Health Care (0660-22 28 50, healthcare@jarven.se) och lämnar relevant information.

För snabbare behandling av ditt ärende ber vi dig fotografera transportskadan så utförligt som möjligt innan ni kontaktar kundtjänst.

Miljö och återvinning


Järven Hjärtbräda är helt energiåtervinningsbar och skall sorteras som brännbart avfall. Ingen demontering är nödvändig.

Järven Health Care tar miljöansvar på allvar.

Järven Health Care jobbar kontinuerligt med att utveckla sitt miljöarbete. Vi eftersträvar att alltid använda material och produkter med minsta möjlig miljöavtryck. Järven Health Care är ansluten till Näringslivet Producentansvar, www.npa.se, och uppfyller därigenom sitt producentansvar.

För mer information om vårt miljöarbete kontakta Järven Health Care.



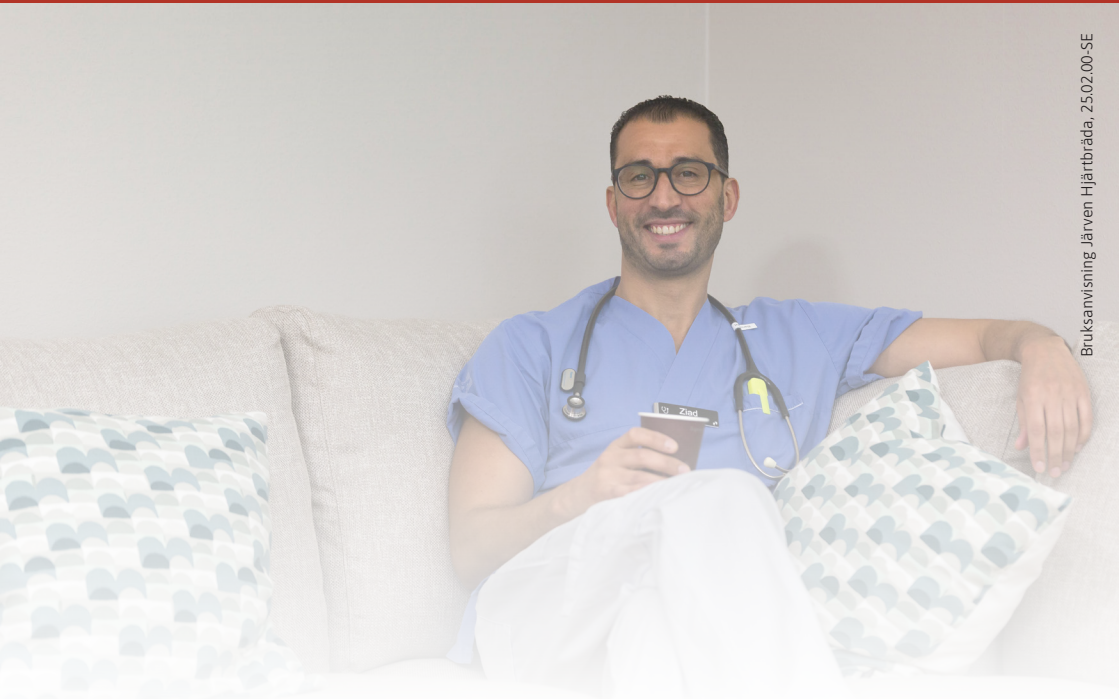

Bruksanvisning Järven Hjärtbräda. Alla varumärken tillhör respektive ägare.
Järven AB förbehåller sig rätten att uppdatera denna bruksanvisning
vid behov och/eller påträffande av eventuella stav- eller faktafel.

**Ytterligare exemplar kan beställas från Järven Health Care.
Kopiering för internt bruk är tillåten**



Järven AB, Bromsvägen 3
SE-891 60 Örnsköldsvik
SWEDEN

Telefon: 0660-22 28 50
Telefax: 0660-824 10
E-post: healthcare@jarven.se

www.jarven.se