



BRUKSANVISNING

Melissa Vårdmadrasser

Melissa 12
Melissa Basic
Melissa Flex
Melissa Parad
Melissa Heavy

Melissa 12 bäddmadrass
Melissa Basic bäddmadrass
Melissa Flex bäddmadrass
Melissa Parad bäddmadrass
Serie RX-5 madrassöverdrag



Järven Health Care

Tack till ditt val av Melissa vårdmadrass. Vårt mål är att du ska bli nöjd med madrassen både vad gäller funktion och livslängd. Vi ber dig därför att ägna några minuter till att läsa igenom bruksanvisningen för att på bästa sätt hantera din madrass.

Har du några frågor som inte berörs i denna bruksanvisning ber vi dig att ta kontakt med oss på Järven Health Care. Du hittar våra kontaktuppgifter på baksidan av denna bruksanvisning.

Varnings- och informationsrutor



Varningsruta som informerar om en viktig säkerhetsaspekt eller fara. Om du inte förstår eller följer informationen kan du skada dig själv eller andra!

Informationsruta med anvisningar som, om de inte följs, kan skada produkten och/eller försämra systemets funktion och prestanda.

CE-Märkning

Järven Health Cares madrasser och överdrag är CE-märkta enligt MDR 2017/745. Märkningen innebär att Järven Health Care har tillverkaransvaret och försäkrar att produkten uppfyller de väsentliga kraven samt att det finns teknisk dokumentation samt försäkran som ska bevaras i minst tio år.



Järvens kvalitetsarbete

Vårt kvalitetsarbete och kundfokus förverkligas genom att vara lyhörd för kunders behov och förväntningar samt att i alla avseenden verka för ett samarbete som bygger på långsiktighet och förtroende.

Ständiga förbättringar av våra produkter och tjänster är grunden till vår förmåga att tillfredsställa våra nuvarande och framtida kunder. I vårt grundläggande kvalitetsarbete ingår också att finna utvärderingsmetoder och standarder som erbjuder kunden en säkerställd kvalitet gällande komfort, funktion, hållbarhet och pris.

Järven Health Care fokuserar särskilt på att, genom kompetenta och engagerade medarbetare, kontinuerligt fortbilda och kompetensutveckla vårdpersonal. Vår förhoppning är att det ska leda till en högkvalitativ vård med inriktning på att förebygga trycksår och vårdrelaterade infektioner samt minska antalet brandtillbud inom vården.

För att ge ett opartiskt råd vid val av madrass trycktestas alla Järven Health Cares madrasser enligt SS 8760013 hos RISE (Swerea IVF). Resultaten av tryckmätningstesten ligger till grund för klassificeringen av madrassernas tryckavlastande egenskaper. För resultat och mer information om trycktestet kontakta Järven Health Care.

Sammanställning av varningsrutor



Madrassöverdraget måste alltid ligga med rätt sida upp för att droppkanten ska fungera som ett skyddande tak över dragkedjan. Om madrassen vänds utan att överdraget först tas av hamnar droppkanten upp och ner och tappar därmed sin funktion.



Melissa bäddmadrasser får ej användas utan en madrass av god kvalité som bottenmadrass.



Om överdraget är skadat på ett sätt som gör att kroppsvätskor riskerar att tränga igenom till skumkärnan bör det omgående bytas ut.



Vid konstaterad kontamination skall madrassen kasseras och ersättas för att upprätthålla en säker vårdmiljö.



Trots att en evakuering är en stressig situation, gå i normal hastighet. Spring inte, då ökar risken att du skadar dig själv och/eller brukaren!

Innehållsförteckning

Inledning	2
Varnings- och informationsrutor	2
CE-märkning	2
Järvens kvalitetsarbete	2
Sammanställning av varningsrutor	3
Innehållsförteckning	4
Säkerhetsföreskrifter	6
Produktinformation	7
RXI-överdraget	7
Brandstandard	7
Avsedd användning	8
Melissa ersättningsmadrasser	8
Melissa bäddmadrasser	8
Guide - Melissamodeller	9



Handhavande	10
Mottagande och uppackning	10
Inspektion av din hygienmadrass.....	10
Vänd och rotera madrassen.....	10
Förväntad livslängd	10
Trycksårsförebyggande arbete	11
Obligatoriska omvårdnadsåtgärder (Vårdhandboken)	11
Lägesändringar för tryckavlastning	11
Skötsel av överdrag	12
Rengöring av överdraget.....	12
Skötsel av madrassens skum	13
Madrassrevision för patientens skull.....	13
Madrassrevision för personalens skull.....	13
Madrassrevision för ekonomins skull.....	13
Evakuering med RXI överdrag	14
Övrig information	15
Produktansvar	15
Returer och reklamationer.....	15
Transportskador.....	15
Miljö och återvinning	15
Märkning	16
Symbolförklaring	17
Tillbehör och tillhörande produkter	18

**Är det något du inte finner svar på i denna bruksanvisning?
KONTAKTA OSS SÅ HJÄLPER VI DIG. VI FINNS TILL FÖR DIG!**

Järven Health Care
Bromsvägen 3
SE-891 60 Örnsköldsvik, SWEDEN

Tel: +46 660-22 28 50
Email: healthcare@jarven.se
Web: www.jarven.se

Säkerhetsföreskrifter

Läs följande information innan ni använder er vårdmadrass!

- **Produkten ska bara användas i enlighet med denna bruksanvisning.**
- Produkten skall optiskt bedömas innan och efter varje användning.
Läs mer om inspektion av din madrass på sidorna 12 och 13.
- Produkten ska inte kombineras, monteras eller repareras med andra delar, tillbehör eller reservdelar än de som beskrivs i denna bruksanvisning eller annan dokumentation från Järven Health Care.
- Säkerställ att madrassen inte blir klämd eller skadad vid förvaring.
- Undvik vassa föremål i närheten av madrasserna och överdragen.
- Alla våra Melissa vårdmadrasser är brandtestade. Det är kundens ansvar att göra en riskbedömning utifrån faran för anlagd brand eller andra brandrisker och därefter använda rätt produkt. Kontakta oss gärna vid frågor.
- För att undvika skador får produkterna inte komma i kontakt med varma källor eller eld, till exempel glödande cigaretter, varma lampor eller liknande.
- Försäkra er om att ni använder rätt madrassstorlek till avsedd säng samt rätt modell till aktuell brukare.
- Positionera brukaren så att andningsvägarna hålls fria.
- Vid hantering eller kassering av madrass, beakta de lokala anvisningarna vid specifika smittor eller situationer.
- Säkerställ att överdraget är intakt! Ett skadat överdrag är inte längre hygieniskt då kroppsvätskor riskerar tränga in till skumkärnan. Kontrollera därför noggrant att inga skador finns på madrassöverdraget.
Om ytskiktet skadats kan det ersättas så länge ingen kroppsvätska trängt ner till madrasskärnan. Vid osäkerhet rekommenderas att hela madrassen byts.
- Vid användning av överdrag RXI-5 måste madrassens höjd vara minst 10 cm för att underlätta vid evakuering.
- Använd EJ RXI-överdrag tillsammans med kontinentalsäng.
- Använd EJ RXI-överdrag hos högriskpatienter, dementa eller inom psykiatri.
- Evakueringsbanden på RXI-5 långsidorna ska alltid ligga i fickorna när de inte används.


Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter är tillverkaren skyldig att rapportera olyckor och tillbud som kan kopplas tillverkarens produkt. **Därför skall eventuella tillbud eller olyckor som kopplas till våra produkter omgående rapporteras till oss.**

Produktinformation

Melissa-sortimentet består av bäddmadrasser som placeras ovanpå befintlig vårdmadrass samt ersättningsmadrasser som placeras direkt på sängbotten. Madrasserna är utvecklade för att användas förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår. Madrasserna passar alla vårdmiljöer och har olika nivåer av tryckavlastning.

Järven Health Care rekommenderar att patienten lägesförändras regelbundet. Ansvarig vårdgivare ansvarar för detta utifrån aktuell vårdpraxis.

Samtliga Melissa-madrasser har tryckavlastande skum som formar sig efter kroppens kontur för att fördela trycket över hela kroppsytan genom omslutning och nedsänkning, de två viktigaste biokemiska egenskaperna för att minska risken för trycksår^[1] (se sid 16).

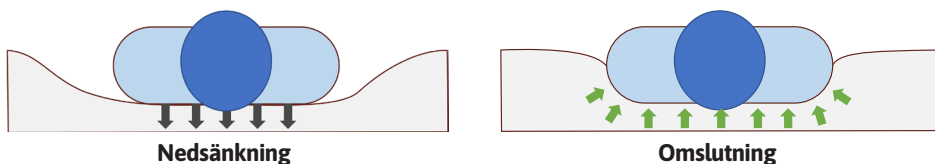

RX-överdragen

Madrasser i Melissa-serien levereras med vätsketäta madrassöverdrag som förhindrar urin, blod och andra kroppsvätskor från att tränga igenom till skummet. Överdragen, som finns i tre varianter, är ånggenomsläppliga och tillverkade av en prasselfri och 2-stretchig polyuretanväv.

- **RX-5** basversion
- **RXH-5** med handtag för transport av madrass utan brukare.
- **RXI-5** med handtag och inbyggd evakueringsfunktion.

Till Melissa bäddmadrasser finns även överdrag RX-5-resår med resårband i hörnen för att fixera bäddmadrassen vid underliggande madrass.

För att underlätta av- och påtagning vid tvätt har RX-5 och RXH-5 dragkedjor med droppkant på tre sidor. RXI-5 har dragkedjor med droppkant på alla fyra sidor.



Madrassöverdraget måste alltid ligga med rätt sida upp för att droppkanten ska fungera som ett skyddande tak över dragkedjan. Om madrassen vänds utan att överdraget först tas av hamnar droppkanten upp och ner och tappar därmed sin funktion.

Brandstandard

Melissa-madrassernas madrasskärnor och överdrag uppfyller SS 876 00 01, testmetod EN 597 1+2. Överdragen uppfyller dessutom SS 876 00 01, testmetod 12952-1+2.

Avsedd användning

Madrassmodellerna har olika användningsområden. Se nedan och nästa sida *Guide - Melissamodeller* för information om de olika modellerna.

Melissa ersättningsmadrasser

Melissa ersättningsmadrasser är utvecklade för att användas förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår. Madrasserna passar alla vårdmiljöer med olika nivåer av tryckavlastning.

Madrasserna används som basmadrasser inom vården och kan levereras med valfritt RX-Överdrag.

MELISSA 12

Melissa 12 kan levereras i två olika höjder; 12 och 14 cm. Valet av höjd baseras på de tilltänkta brukarnas maxvikt.

Madrassen är både vänd och roterbar för ökad livslängd.

MELISSA BASIC

En madrass för patienter den som har en lägre risk att utveckla trycksår.

Madrassen är både vänd och roterbar för ökad livslängd.

MELISSA FLEX

Madrassen har två separat skum med tryckavlastning upp till sårkategori 2 och ger god komfort.

Madrassen är roterbar.

MELISSA PARAD

Vår mest efterfrågade Melissamadrass med god tryckavlastning upp till sårkategori 3 och utmärkt komfort.

Madrassen är roterbar.

MELISSA HEAVY

En stabil madrass utvecklad för brukare upp till 300 kg. Melissa Heavy uppvisar fina tryckavlastande värden och ger tryckavlastning upp till sårkategori 3.

Madrassen är roterbar.

Melissa bäddmadrasser

Melissa-seriens bäddmadrasser har 6 cm noga utvalda skum för att ge stabilitet och främja tryckavlastning. Bäddmadrasserna måste användas i samarbete med en stabil bottenmadrass.

Samtliga bäddmadrasser är vänd- och roterbara för ökad livslängd.

Guide - Melissamodeller

Nedan presenteras en snabbguide med information om de olika Melissamodellerna. Har du frågor som inte besvaras i denna guide eller på annan plats i bruksanvisningen, kontakta Järven Health Care. Kontaktinformation på sista sidan.

ERSÄTTNINGS-MADRASS	Vändbar	Roterbar	Max Brukarvikt	Sårkategori	Hypersoft skum	35 kg kallsaum	50 kg kallsaum	Viskoelastiskt
Basic	●	●	180 kg	1	-	●	-	-
12 (12 cm)	●	●	180 kg	1-2	-	-	●	-
12 (14 cm)	●	●	220 kg	1-2	-	-	●	-
Parad	-	●	180 kg	1-3	●	-	●	-
Flex	-	●	180 kg	1-2	-	-	●	●
Heavy	-	●	300 kg	1-3	-	-	●	●

BÄDDMADRASS	Vändbar	Roterbar	Max Brukarvikt	Sårkategori	Hypersoft skum	35 kg kallsaum	50 kg kallsaum	Viskoelastiskt
Basic bäddmadrass	●	●	180 kg	1	-	●	-	-
Flex bäddmadrass	●	●	180 kg	1-2	-	-	-	●
Parad bäddmadrass	●	●	180 kg	1-3	●	-	-	-
12 bäddmadrass	●	●	180 kg	1-2	-	-	●	-



Melissa bäddmadrasser får ej användas utan en madrass av god kvalité som bottenmadrass.

Handhavande

Mottagande och uppackning

Våra Melissa-madrasser levereras plan- eller rullpackade (vacuumpackade) i återvinningsbar plast. Vid leverans kontrollera att emballaget och madrassen inte är skadade. *Vid eventuell transportskada, se sid 15.*

Ta bort plastförpackningen samt eventuellt skyddsmaterial. **Användning av kniv bör undvikas vid hantering p.g.a. risk för skador på madrassen och/eller överdraget.** Madrassen kan placeras och användas direkt.

Inspektion av din Melissamadrass

En inspektionsplan för revision av madrasser bör upprättas för att minska risken för vårdrelaterade infektioner (VRI) samt för att madrassen ska hålla och fungera så länge som möjligt. Kontakta gärna oss på Järven Health Care så hjälper vi er med detta. Kontaktuppgifter hittar du på bruksanvisningens sista sida.

Kontrollera regelbundet överdraget för synliga tecken på skador eller slitage, exempelvis revor, sprickor, hål, fläckar eller färgning. Kontrollera madrassens alla sidor (även undersida). Om överdraget har skador måste en noggrann kontroll av madrassens skum genomföras och överdraget omgående bytas ut.

Säkerställ att madrasskärnan inte blivit kontaminerad. Öppna upp överdraget och genomför en noggrann kontroll av madrassens skum för att säkerställa att madrasskärnan är ren. Vid händelse av kontaminerat skum skall aktuell madrass omedelbart avlägsnas och kasseras för att minska risken för smittspridning.

För ytterligare information om rengöring och skötsel se sidorna 12 och 13.

Vänd och rotera madrassen

För att förlänga madrassens livstid rekommenderar vi att den roteras och vänds. Använd gärna vändschema för madrassen.

Rotation kan ske med madrassöverdraget på. Vid vändning måste skummet plockas ut ur överdraget och vändas innan överdraget åter sätts på. Om madrassen har dubbla skumkärnor är det viktigt att säkerställa att toppskummet fortfarande ligger överst efter vändning.

Information om vilka madrasser som är vänd- och/eller roterbara hittar du på sida 9, Guide - Melissamodeller.

Förväntad livslängd

Följ alltid våra skötselråd för längsta möjliga livslängd med bibehållen funktion. Förväntad livslängd vid normal användning är 5 år.

Trycksårsförebyggande arbete

Obligatoriska omvårdnadsåtgärder (Vårdhandboken)

Vårdhandboken anger följande obligatoriska omvårdnadsåtgärder för att minska risk för trycksår i samband med vård:

- Genomför en visuell hudbedömning.
- Genomför en strukturerad riskbedömning vilket innefattar en klinisk bedömning tillsammans med ett riskbedömningsinstrument.
- Minska tryck, skjuv och friktion, exempelvis genom lägesändring och tryckavlastning.
- Håll huden torr, mjuk och smidig genom förebyggande hudvård.
- Tillgodose och följ upp närings- och vätskebehov.
- Involvera patient och/eller närstående i trycksårspreventionen.
- Kommunicera riskfaktorer och förebyggande åtgärder till nästa vårdenhets. För mer information om utskrivning se avsnittet om vårdssamverkan.
- Dokumentera, följ regelbundet upp och utvärdera alla åtgärder i en individuell vårdplan.

Lägesändringar för tryckavlastning

Lägesändringar minskar tryck på känsliga områden och främjar komfort, hygien och rörelseförmåga. Patienter bör uppmuntras till aktivitet eftersom rörelse är kroppens naturliga försvar mot trycksår. De som saknar förmåga att spontant ändra position behöver regelbunden hjälp enligt ett individuellt vändschema.

Vid varje lägesändring ska huden inspekteras för att identifiera tryckrodnader. Om personen inte svarar som förväntat bör frekvensen eller underlaget justeras. Undvik att positionera personen på ett befintligt trycksår eller hudrådnad.

Positionering i sängläge:

Sidoläge: 30 graders vinkel med stöd av kuddar.

Ryggläge: Kilkuddar för att minska tryck, huvudändan max 30 grader förutom vid måltid.

Hälar: Avlasta med kuddar eller hälavlastare för att undvika skador.

Även små lägesförändringar har betydelse och bör inkluderas i vårdplanen.

Se sid. 19 för positioneringshjälpmedel

För mer information konsultera Vårdhandboken.

Skötsel av överdrag

Rengöring av överdraget

Rengöring bör ske med tvålbaserade rengöringsmedel. Se till att använda rätt spädningsförhållande. Vid användning av klorhaltiga preparat använd inblandning 1 000 PPM. Läs alltid noga igenom säkerhetsdatabladet som gäller för rengöringsmedlet och följ säkerhetsföreskrifterna.

Desinficering av madrassöverdraget sker med alkoholbaserat rengöringsmedel med tensider (eller motsvarande). Dessa rekommenderas; Dax Ytdesinfektion Plus, Virkon, Perform och Dismozon Pur.

Skulle odör kvarstå efter det att madrassen rengjorts ta lite citronessens på en fuktig trasa och torka av madrassen.

Rengöringsmedel innehållande klor och fenoler kan påverka ytskiktet negativt och bör därför undvikas.

- Autoklivering av madrasskärnan avrådes då det gör att madrassen åldras i förtid.
- Överdraget tvättas i 70° C (max 95° C).
- Överdraget kan torktumlas. Max 130° C.
- Sköljmedel förstör överdragets vätsketäthet och får EJ användas.
- Madrassen/överdraget får ej strykas.

Undvik vassa föremål i närheten av madrassen och överdraget.

Vid rengöring av madrass **läs alltid noga igenom säkerhetsdatabladet** som gäller för rengöringsmedlet och följ säkerhetsföreskrifterna.



Om överdraget är skadat på ett sätt som gör att kroppsvätskor riskerar att tränga igenom till skumkärnan bör det omgående bytas ut.

Skötsel av madrassens skum

Regelbunden inspektion och rengöring av överdraget räcker inte, eftersom vätskor kan tränga igenom osynliga skador eller otäta sömmar. Därför bör madrasser med skumkärna kontrolleras systematiskt, särskilt om ytskiktet visar tecken på slitage eller om det finns misstanke om läckage.

Genom att regelbundet kontrollera och byta ut kontaminerade madrasser kan vården förbättra arbetsmiljön och minska risken för smittspridning, vilket gynnar både personal och patienter.

Tag regelbundet av madrassöverdraget och kontrollera skumkärnan. Leta efter våta fläckar, missfärgningar, tecken på skador och slitage eller om madrassen luktar illa p.g.a kroppsvätskor. **Kassera omedelbart madrasser som är kontaminerade för att minska risken för smittspridning!**

Madrassrevision för patientens skull

Att kontrollera skummet i en sjukvårdsmadrass för kontamination är avgörande för att säkerställa patientsäkerhet och hygien. Skummet kan absorbera vätskor, såsom blod, urin och sårsvätska, vilket skapar en miljö där bakterier och svamp kan växa. Om madrassen är kontaminerad finns en risk för smittspridning och försämrad sårhäkning hos patienter.

Madrassrevision för personalens skull

En kontaminerad madrass kan försämma arbetsmiljön och öka arbetsbelastningen för vårdpersonalen:

- Risken ökar för smittspridning om personal utsätts för bakterier och svamp som kan finnas i den kontaminerade madrassen. Detta kan öka risken för egen sjukdom.
- Eventuell stress över att arbeta med potentiellt smittsamma ytor kan påverka den psykosociala arbetsmiljön.
- Dålig lukt och (o)synliga föroreningar kan skapa en obehaglig arbetsmiljö.
- Extra vårdarbete när en vårdrelaterad infektion uppstår.
- Den fysiska belastningen ökar för personalen om en patient behöver flyttas oftare på grund av en kontaminerad madrass eller om madrasser akut måste bytas ut.

Madrassrevision för ekonomins skull

Regelbundna madrasskontroller kan minska risken för vårdrelaterade infektioner (VRI), vilket i sin tur kan leda till kortare vårdtider och lägre kostnader för antibiotika och intensivvård. Den initiala kostnaden för inspektioner och madrassbyten vägs upp av besparingar från färre infektioner och komplikationer om antalet patienter som får vårdrelaterade infektioner minskar som en följd av madrassrevisionen.




Vid konstaterad kontamination skall madrassen kasseras och ersättas för att upprätthålla en säker vårdmiljö.


Evakuering med RXI-5

Evakuering från säng:


1. Informera brukaren om vad som händer.
2. Sänk sängen maximalt och lås den i läge för en säkrare evakuering.
3. Dra ut banden på långsidan av madrassöverdraget och fixera banden runt brukaren.
4. Använd de yttre handtagen i fotändan för att dra madrassen ner på golvet.
Drag från fotsidan, särskilt viktigt inför evakuering via trappa.

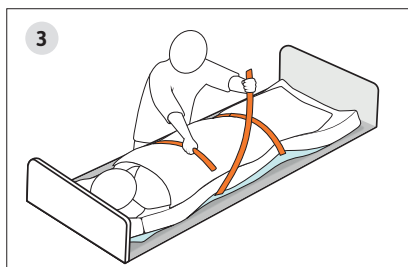

Fixera de båda banden.

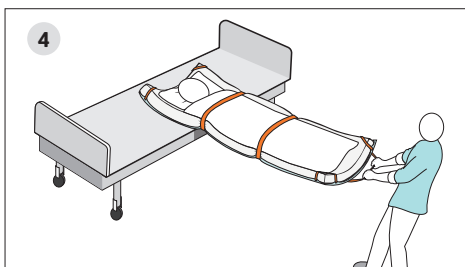

Drag från fotsidan.

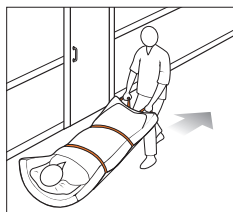

Evakuering över plana ytor

- Gå baklänges när evakuering sker på plan yta.
- Håll ett stadigt grepp i evakueringsbanden och luta dig lätt bakåt (din egen kroppsvikt hjälper till att dra).

Var uppmärksam så att du inte snubblar över något eller går över en trappkant utan att vara medveten om det.



Evakuering i trappor

- Gå baklänges tills större delen av madrassen har glidit ner över det översta trappsteget.
- Vänd dig helt om så att du har blicken i färdriktningen, utan att släppa taget om madrassen.
- Håll en hand stadigt på ledstången och dra med den andra handen.
- Följ trappen nedåt och låt madrassen stoppa mot dina ben vid behov.



Trots att en evakuering är en stressig situation, gå i normal hastighet. Spring inte, då ökar risken att du skadar dig själv och/eller brukaren!

Övrig information

Produktansvar

Med produktansvar avses tillverkarens, importörens eller försäljarens lagstadgade skadeståndsansvar för eventuella skador som produkten orsakat. Produktansvarslagen fastställer tillverkarens, importörens eller försäljarens lagstadgade skadeståndsansvar för eventuella skador som produkten orsakat.

Reglerna gäller för fysiska produkter i form av lösa föremål men även för produkter som kopplas ihop med andra lösa föremål eller fast egendom. Finns det ingen produkt som orsakat någon form av egendoms- eller personskada är produktansvarslagstiftningen inte relevant.

Returer och reklamationer

Reklamationer skall skriftligen anmälas till Järven Health Care. Retur av produkt skall efter godkänt reklimationsärende ske enligt våra instruktioner. Returneras produkt innan reklimationsärendet är godkänt räknas ärendet som avslutat och ersättning till kund betalas inte ut.

Transportskador

Transportskada skall noteras på fraktsedeln innan påskrift för att vara giltig. Därefter kontaktar ni kundtjänst på Järven Health Care (0660-22 28 50, healthcare@jarven.se) och lämnar relevant information.

För snabbare behandling av ditt ärende ber vi dig fotografera eventuella transportskador så utförligt som möjligt innan ni kontaktar kundtjänst.

Miljö och återvinning

Madrassen kan energiåtervinnas. Ingen demontering krävs. Vid kontaminerad madrass beakta lokala anvisningar och regler för kassering.

Järven Health Care jobbar kontinuerligt med att utveckla sitt miljöarbete. Vi eftersträvar att alltid använda material och produkter med minsta möjliga miljöavtryck. Järven Health Care är ansluten till Näringslivet Producentansvar, www.npa.se, och uppfyller därigenom sitt producentansvar.

För mer information om vårt miljöarbete kontakta Järven Health Care.

Melissas produktsortiment är helt fritt från PVC.

Märkning

Produkten är märkt med:

Produktnamn, Storlek

Artikelnummer

Ordernummer

Tillverkningsdatum (år-månad- dag)


Produktspecifik information (såsom, max brukarvikt, trycksårsgard etc.)

CE-märkning, MD-märkning, Information om att läsa bruksanvisning

Tillverkare

EAN eller QR-kod

Nedan följer några exempel på märkning. Notera dock att märkningen kan variera.

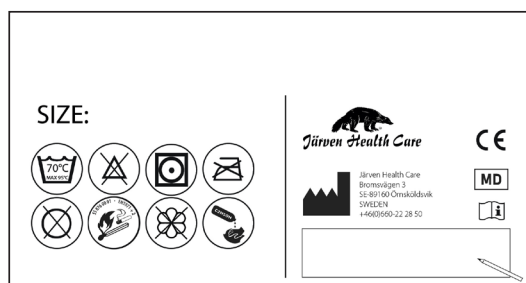

[1] Wounds International 2020 | Vol 11 utgåva 4 |, Gefen A and Soppi E, sid 39

“De två viktigaste biomekaniska egenskaperna som avgör hur effektivt en stödyta minskar risken för trycksår hos patienter med nedsatt rörlighet eller sensoriska funktioner är nedsänkning och omslutning.

- **Nedsänkning** är det djup som en patients kropp tränger igenom när den placeras på en stödyta.
- **Omslutning** är stödytans förmåga att forma sig runt patientens kropp.”

Symbolförklaring



Anger
artikelnummer



Anger
batch-nummer



Produkten är en
medicinteknisk
produkt




Produktens
tillverkningsdatum




Tillverkare av
produkten




Konsultera
bruksanvisning

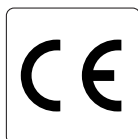

Denna produkt är
CE-märkt enligt
MDR 2017/745

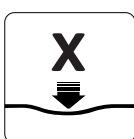

Den trycksårskategori
madrassens är anpassad för

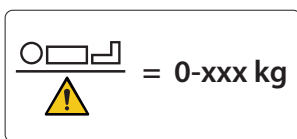


Anger max brukarvikt



Torktumlning
Hett/hög värme




Får ej strykas

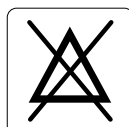


Klorhaltiga
preparat får
EJ användas!



Tvätt 70° C
Max 95° C (överdrag)

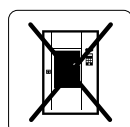


Får EJ
autoklaveras.
(madrasskärna)

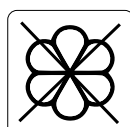


Sköljmedel får
EJ användas.



Produkten är
vätskeavstötande

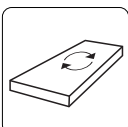

Madrassen kan
roteras.

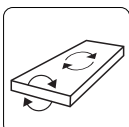

Madrassen kan
vändas och roteras.



Rengöring bör ske
med tvålbaserade
rengöringsmedel



Desinficeras med alkohol-
baserat eller rengörings-
medel med tensider



Testad och godkänd
enligt SS 876 00 01
testmetod
EN ISO 12952-1 &
EN ISO 12952-2



Testad och godkänd
enligt SS 876 00 01,
testmetod
EN 597-1 &
EN 597-2



Testad och godkänd
enligt SS 876 00 10,
testmetod
NT-Fire 055



Testad och god-
känd enligt
BS7177:2008
Medium Hazard



Testad och
godkänd enligt
BS7177:2008
High Hazard

Tillbehör



HYGIENÖVERDRAG

RX-5, basversion.

RXH-5 med transporthandtag för att bära madrass utan brukare.

RXI-5 med handtag och inbyggd evakueringsfunktion.



TRANSPORTVÄSKA

En praktisk väska för användning vid transport samt förvaring. Väskan är tillverkad i slitåligt material och är tvättbar.

Tillhörande produkter

Utöver de produktspecifika tillbehören har vi ett urval av produkter som med fördel kan kombineras med våra Melissa-madrasser.



RÄDDNINGSLAKAN

Om Melissa-madrassen inte har överdraget RXI-5 med evakueringshandtag rekommenderar vi JÄRVEN RÄDDNINGSLAKAN för att underlätta evakuering av patient vid fara (brand, gasläcka, etc.)



KUDDE ZUZZA

En mjuk, skön och luftgenomsläpplig kudde som är tillverkad för att ge god komfort och lång livslängd. Hela kudden är kokbar för att möjliggöra effektiv rengöring.



RXP KUDDÖVERDRAG

Ett avtorkningsbart kuddöverdrag i samma material som Melissas hygienöverdrag, PU.



BRANDSÄKRA TEXTILIER TCS

Vi har ett urval av brandsäkra textilier i materialet Trevira som har ett inbyggt brandskydd. Textilierna omfattar bl.a. filt, kuddöverdrag och lakan. Kontakta Järven Health Care för mer information.

Tillhörande produkter, forts.



FLEX HÅLDYNA

Erbjuder effektiv tryckavlastning för patienter med tryckkänsliga områden från underben till fot/hälar. Håldynan har ett laminat av LENTEX för extra hygienkontroll.




SCHAMPIKUDDEN

Erbjuder en trygg sittställning för den som inte orkar att sitta upp utan stöd. Järven Health Care har, i samarbete med vårdpersonal, tagit fram Schampikudden som enkelt placeras bakom brukarens rygg.



JÄRVEN KILKUDDE

Järven kilkudde hjälper till att positionera och avlasta brukaren för att minska risken för trycksår. Den kan användas som sidostöd eller för att höja huvud- eller fotändan.

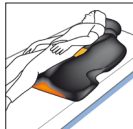

30° POSITIONERINGSKIL - SYST'AM P910L

Ett stadigt hjälpmedel för vårdpersonal som utför kontinuerliga lägesändringar för patienter. Kilen hjälper till att förebygga trycksår och andra komplikationer som ofta uppstår vid långvarigt sängläge.



STÖVEL FÖR HÄLSTÖD - SYST'AM P903T

Ett komfortabelt hälstöd särskilt utformat för patienter med normal eller något begränsad rörlighet. Det minskar trycket på fotens mest utsatta områden och minskar risken för trycksår.

Kontakta Järven Health Care för information om vårt kompletta utbud av positioneringshjälpmedel och beställning.



Melissa Bruksanvisning. Alla varumärken tillhör respektive ägare.
Järven AB förbehåller sig rätten att uppdatera denna bruksanvisning
vid behov och/eller påträffande av eventuella stav- eller faktafel.

**Ytterligare exemplar kan beställas från Järven Health Care.
Kopiering för internt bruk är tillåten**



Järven AB
Bromsvägen 3
SE-891 60 Örnsköldsvik
SWEDEN

Telefon: 0660-22 28 50
Telefax: 0660-824 10
E-post: healthcare@jarven.se

www.jarven.se