

LENTEX AIRO

Tryckavlastning i världsklass tack vare LENTEX[®] hygienöverdrag och sex lager noga utvalt skum

Lentex Air0 är vår mest påkostade skummadrass med laminerat LENTEX-hygienöverdrag. Valet av skum har gjorts för att ge hög komfort och bra tryckavlastning vilket oberoende tester har verifierat med resultatet extra lågt tryck. Välj Air0 för en riktigt bra madrass där tryckavlastning, hygien och patient står i fokus.

- **MÖJLIGGÖR IMMERSION AND ENVELOPMENT** med vårt extremt flexibla laminat. De två viktigaste faktorerna för god tryckavlastning.*
- **LÅNG LIVSLÄNGD.** LENTEX-madrassen har vare sig blixtlås eller sömmar vilket minskar risken för att vätskor ska nå skumkärnan genom överdraget.
- **UNDERLÄTTA UPPTÄCKTEN AV KONTAMINATION** tack vare LENTEX semi-transparenta laminat
- **UNDERLÄTTA UPPTÄCKT AV SMUTS PÅ MADRASSENS YTA.** Det ljusa ytskiktet underlättar för personal att upptäcka föroreningar på madrassens yta.
- **ETT LAMINAT ANPASSAD FÖR GOD HYGIEN.** Tack vare ytskiktets unika struktur har utomstående studier visat att överdraget håller kvar upp till 73% mer decinfektionsmedel** vid rengöring.

* Wounds International 2020 | Vol 11 Issue 4 | Gefen A och Soppi E, s. 39

** Studie, Tyskland 1999



LENTEX AIRO

DELUXE-MADRASS MED HÖG KOMFORT OCH EXTRA LÅGT TRYCKT.

Godkänd för säng- och madrasstvätt

Då det blir allt vanligare med automatiserade säng- och madrasstvättar är det viktigt med produkter som klarar av den hanteringen utan att fyllas med vatten eller blåsas upp. Våra Lentexmadrasser har testats och godkänts för användning med säng- och madrasstvätt (Sonosteam/Semi Staal).


Avlastning för utstickande kroppsdelar

Madrassen har ett dokumenterat lågt tryck (42 mm/Hg) för utstickande kroppsdelar, såsom hälar och skuldror varför ingen separat hälzon krävs.

Hållbarhet och sittfunktion

Madrassen har genomgått utmattningstest enligt standard SS 876 00 11 med goda resultat. Madrassen erbjuder därigenom sittfunktion med höjt ryggläge i säng.

2 cm supersoft kallskum 23kg/m ³	
4 cm tryckavlastande Flexskum 55 kg/m ³	
2x4 cm Waterlilyskum 53 kg/m ³	
4 cm tryckavlastande Flexskum 55 kg/m ³	
2 cm supersoft kallskum 23kg/m ³	

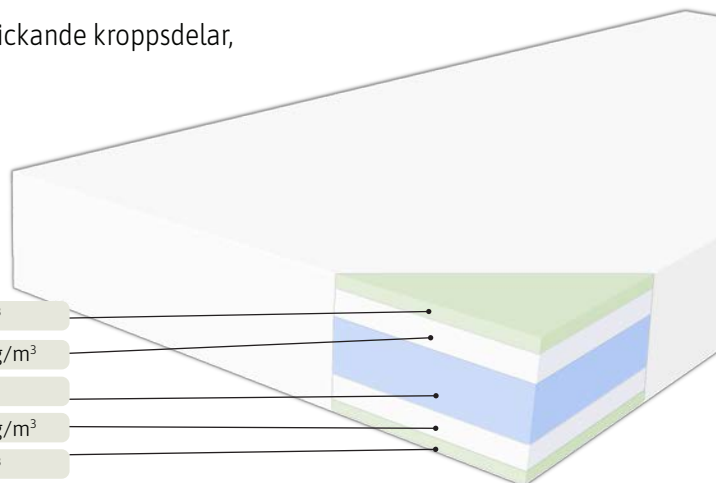

STANDARD FÖR OBJEKTIV UTVÄRDERING AV MADRASSERS TRYCKAVLASTANDE EGENSKAPER.

För att få en objektiv bedömning av madrassers tryckavlastande egenskaper har RISE utvecklat en standard där man med intryckskroppar mäter det faktiska mottrycket i en madrass ger. Mätmetoden är beskriven i Svensk standard SS 876 00 13.

Lentex® Air0 har testats av RISE enligt SS 876 00 13 och är tryckavlastande upp till och med sårkategori 3.

Testresultaten redovisas nedan.

Belastning	Extra låg	Låg	Medel	Hög
Stor intryckskropp 300 N	< 30.0	30.0 - 34.9	35.0 - 39.9	40.0 - 44.9
Stor intryckskropp 600 N	< 45.0	45.0 - 52.9	53.0 - 60.9	61.0 - 68.9
Liten intryckskropp 40 N	< 45.0	45.0 - 52.9	53.0 - 60.9	61.0 - 68.9

Madrass	Stor intryckskropp 300 N	Stor intryckskropp 600 N	Liten intryckskropp 40 N
Lentex Air0	26	43	42

PRODUKTSPECIFIKATIONER



Material	2 cm supersoft kallskum 23kg/m ³ , 4 cm tryckavlastande Flexskum 55 kg/m ³ , 2x4 cm Waterlilyskum 53 kg/m ³ , 4 cm tryckavlastande Flexskum 55 kg/m ³ , 2 cm supersoft kallskum 23kg/m ³ . Ytskiktet Lentex® är av polyuretan.
Storlekar	200/205/210 x 80/85/90/105/120 x 13 cm (För andra storlekar kontakta Järven Health Care.)
Sårkategori	Till och med kategori 3
Madrassvikt	15-23 kg beroende på längd och bredd
Hygien	ISO 811:2018.
Madrasstvätt	Godkänd av Sonosteam/Semistaal

Max brukarvikt	300 kg.
Garanti	3 år på utmattning av madrasskärnans B-värde enligt SS 876 00 11. 5 år med åldersavskrivning på vidhäftningen av Lentex.
Brand	SS 87600 01, normalrisk (testmetod EN 597-1)
Återvinning	Helt återvinningsbar. Sorteras som brännbart avfall. Demontering krävs ej.
Märkning	Storlek, Artikelnummer, Ordernummer, Tillverkningsdatum, EAN, Tillverkare, Max brukarvikt, Sårkategori, Brandstandard samt Placering i säng.



Bromsvägen 3 | 891 60 Örnsköldsvik | Sverige
Telefon: 0660 - 22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10
www.jarven.se | healthcare@jarven.se