




BRUKSANVISNING

Specialmadrass Brand Specialkudde Brand

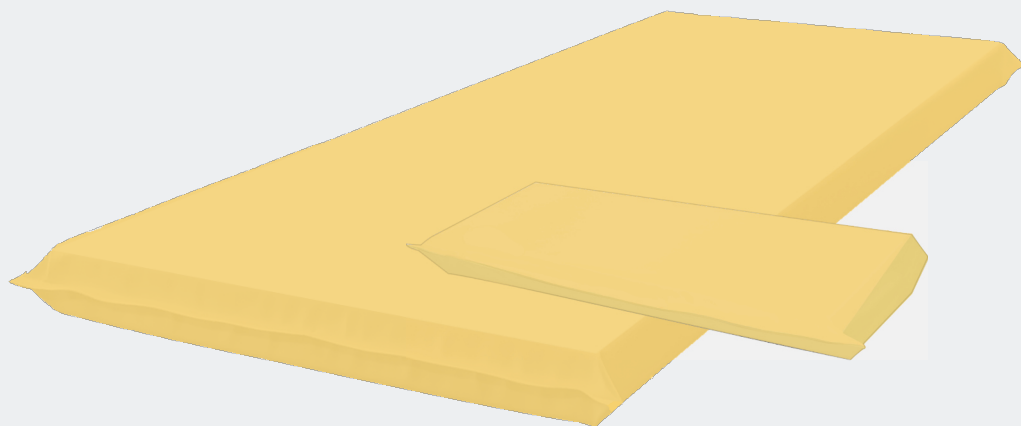

Järven Health Care

Tack till ditt val av specialmadrass från Järven Health Care. Vårt mål är att du ska bli nöjd med madrassen både vad gäller funktion och livslängd. Vi ber dig därför att ägna några minuter till att läsa igenom denna bruksanvisning för att på bästa sätt hantera din madrass.

Har du några frågor som inte berörs i denna bruksanvisning ber vi dig att ta kontakt med oss på Järven Health Care. Du hittar våra kontaktuppgifter på baksidan av denna bruksanvisning.

Varnings- och informationsrutor



Varningsruta som informerar om en viktig säkerhetsaspekt eller fara.

Om du inte förstår eller följer informationen kan du skada dig själv eller andra!

Informationsruta med anvisningar som, om de inte följs, kan skada och/eller försämra produkten.

CE-märkning

Järven Health Cares madrasser och överdrag är CE-märkta enligt den medicintekniska förordningen MDR (EU) 2017/745 klass 1. CE-märkningen innebär att Järven Health Care har tillverkarens ansvar för att säkerställa att denna produkt uppfyller de väsentliga kraven i relevant europeisk lagstiftning. Detta inkluderar tillhandahållande av teknisk dokumentation och försäkran som upprätthålls i minst tio år efter att produkten har släppts ut på marknaden.

Försäkran om överensstämmelse med väsentliga krav har lämnats in till Läkemedelsverket i Sverige.

Vårt kvalitetsarbete

Våra kvalitetsstandarder och mål för kundfokus förverkligas genom att vi svarar upp mot våra kunders behov och förväntningar. Vi tror på att bygga långsiktiga relationer genom samarbete och förtroende.

Ständiga förbättringar av våra produkter och tjänster är grunden för vår förmåga att tillfredsställa både nuvarande och framtida kunder. I vårt arbetssätt ingår att utveckla utvärderingsmetoder och standarder som ger kunden en garanterad kvalitet när det gäller komfort, funktion, hållbarhet och pris.

Genom vårt team av kompetenta och engagerade medarbetare fokuserar vi på att stödja utbildning, utveckling och innovation inom vårddyrket. Våra mål är att underlätta vård av hög kvalitet för att förebygga trycksår, minska vårdrelaterade infektioner och förbättra brandsäkerheten i vårdmiljöer.

Om du behöver ytterligare information eller hjälp är du välkommen att kontakta oss.

Telefon: +46 660-22 28 50
E-post: healthcare@jarven.se
Webb: www.jarven.se

Järven Health Care
Bromsvägen 3
SE-891 60 Örnsköldsvik, SWEDEN

Innehållsförteckning

Introduktion	2
Varnings- och informationsrutor	2
CE- märkning	2
Vårt kvalitetsarbete	2
Innehållsförteckning	3
Säkerhetsföreskrifter	4
Brandskydd	4
Produktinformation	5
Specialmadrass Brand och Specialkudde Brand	5
Avsedd användning	5
Kontraindikationer	5
Handhavande	6
Mottagande och uppackning	6
Skötsel och rengöring	6
Förvaring	7
Förväntad Livslängd	7
Övrigt	8
Returer och reklamationer	8
Transportskador	8
Återvinning och miljö	8
Symbolförklaring	10
Märkning	11
Etiketter	11
Kontaktinformation	12

Säkerhetsföreskrifter

Läs följande information innan du använder din Specialmadrass Brand och Specialkudde Brand!

- Järven Health Care madrasser och kuddar ska bara användas i enlighet med beskrivningen i denna bruksanvisning.
- Produkten skall optiskt bedömas innan och efter varje användning.
- Järven Health Care madrasser/kuddar ska inte kombineras, monteras eller repareras med andra delar, tillbehör eller reservdelar än de som beskrivs i denna bruksanvisning eller annan dokumentation från Järven Health Care.
- Madrassen/kudden ska användas så att den inte blir klämd eller skadad.
- Undvik att använda vassa föremål i närheten av madrasserna/kuddarna.
- Alla våra madrasser är brandtestade. Det är kundens ansvar att göra en risk bedömning utifrån risken för anlagd brand eller andra brandrisker och därefter välja rätt madrass. Kontakta oss gärna vid frågor.
- Försäkra er om att ni beställer rätt madrass till rätt ändamål.
- Vid allvarliga tillbud som inträffar i samband med produkten ska detta omgående rapporteras till Järven Health Care och behörig myndighet.

Brandskydd

Produkterna uppfyller alla av oss kända brandnormer i världen. Madrasskärnan och kuddens kärna (37 kg/m³) är tillverkad av CMHR-polyeter som uppfyller brandstandard SS 876 00 10:2016.

Överdraget motstår öppen gaslåga och glödande partiklar (900°).

Uppfyllda brandstandarder:

- SS 876 00 10 testmetod NT-Fire 055
- BS 6807:2006 Crib 7
- FAR 25.853

Produktinformation

Specialmadrass Brand och Specialkudde Brand

Järvens Specialmadrass Brand och Specialkudde Brand är framtagna för extremt krävande och brandfarliga miljöer. Produkterna har en grundväv som består av armid, ett material som bland annat används till skottsäkra västar och som tål höga temperaturer. Överdraget av armidbaserat kompositmaterial är högfrekvenssvetsat vilket gör madrassen och kudden exceptionellt slitstarka och vätsketäta. De är också lätta att rengöra och desinficera.

Bruksanvisningen gäller för följande produkter:

- Specialmadrass Brand.
- Specialkudde Brand.

Avsedd användning

Madrassen och kudden lämpar sig väl för användning inom sektorer som polisarrester, fängelseceller, avvänjningskliniker, psykiatriska avdelningar med mera. De är extremt slitstarka, lätt att rengöra/desinficera samt helt vätsketäta.

Madrassen placeras direkt på sängbotten, brits eller vid behov direkt på golv. Kompletteras vid behov med Specialkudde Brand.

Kontraindikationer

Inga kända kontraindikationer finns.

Handhavande

Mottagande och uppackning

Börja med att kontrollera att produkten inte är skadad. Vid eventuell transportskada, se sid 8. Ta bort förpackningen samt eventuellt skyddsmaterial. Användning av kniv bör undvikas vid hantering av förpackningen och produkten. Produkten kan användas direkt efter uppackning.

Skötsel och rengöring

Upprätta en inspektionsplan för revision av produkten. Kontrollera regelbundet madrassen/kudden för synliga tecken på skador eller slitage, exempelvis revor, sprickor, hål, fläckar eller färgning. Kontrollera madrassens alla sidor.

Madrassen och kudden kan rengöras med tvålbaserade rengöringsmedel. Se till att använda rätt spädningsförhållanden enligt rekommendationer för rengöringsmedlet. Använd aldrig koncentrat. Torka torrt med trasa.

Desinficering sker med alkoholbaserat rengöringsmedel med tensider. Spola därefter med vatten eller använd högtrycksspolning, max 10 Bar. Torka torrt med trasa.

Om madrasskärnan är kontaminerad skall madrassen omedelbart kasseras.



Vid rengöring är det viktigt att beakta de instruktioner och säkerhetsföreskrifter som finns för de rengöringsmedel som används!



Madrasser med skadade överdrag måste omedelbart kasseras för att inte riskebakterieansamlingar och därmed en ökad risk för VRI.

Ett skadat överdrag påverkar även brandsäkerheten och överdragets rivstyrka negativt.

Om madrassens kärna är förorenad ska du omedelbart kassera madrassen.



Rengöring bör ske med tvålbaserade rengöringsmedel. Följ rengöringsmedlets bruksanvisning och rekommendationer angående säkerhet och personligt skydd o.s.v. Se till att använda rätt spädningsförhållande.

Använd aldrig koncentrat.



Desinficering av madrass sker med alkoholbaserat eller liknande rengöringsmedel med tensider. Ex.vis Dax Ytdesinfektion Plus, Virkon, Perform och Dismozon Pur.

OBS! Alkoholer har en uttorkande effekt och bör därför användas sparsamt.



Undvik vassa föremål i närheten av madrassen.

Förvaring

Förvara produkterna i torra, rumstempererade lokaler. Undvik direkt solljus.

Förväntad livslängd

Följ alltid våra skötselråd för produkterna för längsta möjliga livslängd med bibehållen funktion. Förväntad livslängd är 5 år.

ÖVRIGT

Produktansvar

Med produktansvar avses tillverkarens, importörens eller försäljarens lagstadgade skadeståndsansvar för eventuella skador som produkten orsakat. Produktansvarslagen fastställer tillverkarens, importörens eller försäljarens lagstadgade skadeståndsansvar för eventuella skador som produkten orsakat. Reglerna gäller för fysiska produkter i form av lösa föremål men även för produkter som kopplas ihop med andra lösa föremål eller fast egendom. Finns det ingen produkt som orsakat någon form av egendoms- eller personskada är lagstiftningen kring produktansvar inte relevant.

Returer och reklamationer

Reklamationer skall skriftligen anmälas till Järven Health Care. Retur av produkt skall efter godkänt reklimationsärende ske enligt våra instruktioner. Returneras produkt innan reklimationsärendet är godkänt räknas ärendet som avslutat och ersättning till kund betalas inte ut.

Transportskador

Eventuella transportskador skall noteras på fraktsedeln innan påskrift för att vara giltig. Ta därefter kontakta med Järven Health Cares (se sidan 2 eller bruksanvisningens baksida för kontaktuppgifter).

För snabbare behandling av ditt ärende ber vi dig fotografera transportskadan så utförligt som möjligt innan ni kontaktar kundtjänst.

För snabbare behandling av ditt ärende ber vi dig fotografera transportskadan så utförligt som möjligt innan ni kontaktar kundtjänst.

Återvinning och miljö

Specialmadrass Brand och Specialkudde Brand är helt energiåtervinningsbara och skall sorteras som brännbart avfall. Ingen demontering är nödvändig.



Använd handskar och alkoholbaserat rengöringsmedel för att först desinficera madrassen innan återvinning eller deponering, detta för att undvika att spridning av infektioner bland de personer som utför arbetet.

Järven Health Care jobbar kontinuerligt med att utveckla sitt miljöarbete.

Vi eftersträvar att alltid använda material och produkter med minsta möjliga miljöavtryck. Järven Health Care är ansluten till Näringslivet Producentansvar, www.npa.se, och uppfyller därigenom sitt producentansvar.

För mer information om vårt miljöarbete kontakta Järven Health Care.



Symbolförklaring



Anger artikelnummer



Anger serienummer



Anger batchnummer



Produkten är en
medicinteknisk pro-
dukt




Anger
tillverkningsdatum



Anger tillverkare



Denna produkt är CE-
märkt i enlighet med
MDR 2017/745 (Klass
1)

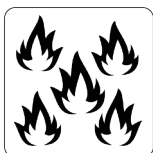

Denna produkt är tes-
tad och godkänd en-
ligt BS7177:2008
Hög risk



Denna produkt är
vätskeavvisande




Ej autoklavering



Rengöring bör ske
med tvålbaserade
rengöringsmedel



Desinficering av produk-
ten
sker med alkoholbaserat
eller liknande
rengöringsmedel med ten-
sider

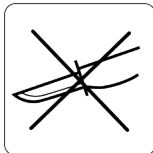


Undvik vassa föremål

Märkning

Etiketter

Nedan följer exempel på produkternas märkning. Etiketternas utseende kan variera.

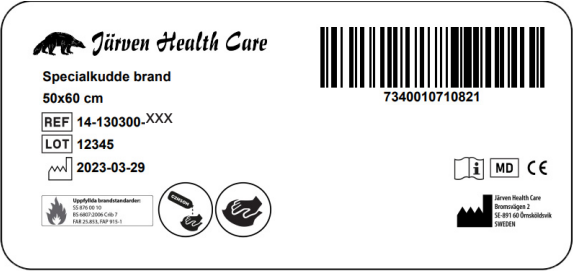



Bruksanvisning Specialmadrass Brand 25:10.00-SE

Bruksanvisning Specialmadrass Brand. Alla varumärken tillhör respektive ägare.
Järven AB förbehåller sig rätten att uppdatera denna bruksanvisning
vid behov och/eller påträffande av eventuella stav- eller faktafel.

Ytterligare exemplar kan beställas från Järven Health Care.
Kopiering för internt bruk är tillåten.

 **Järven Health Care**



Bromsvägen 3
SE-891 60 Örnsköldsvik
SWEDEN

Tel: +46 660-22 28 50
Fax: +46 660-824 10
Email: healthcare@jarven.se

www.jarven.se