

Medicinskt tekniskt produkt i klass 1 enligt MDR (EU) 2017/745. Dessa produkter är avsedd att användas av alla som kan läsa och förstå bruksanvisningen.

Patientprofil: Alla typer av patienter vars patologi kräver användning av en hjälpanordning för att förebygga och/eller behandla trycksår.

Operatörsprofil för installation, genomförande, justering och underhåll: Patient, hälso- och sjukvårdspersonal, underhållstekniker, tredje part. Det finns inga särskilda restriktioner för hantering och användning av anordningen.

AVSEDD ANVÄNDNING AV PRODUKTEN

Stöd för hållning i sittande ställning. Utrustning för användning i stol med armstöd.

INDIKATION

P951D: Ryggstöd och terapeutisk kombiutrustning kan användas för att förbättra positioneringen i rullstol, förbättra sittorienteringen, bidra till att minska framåtgång och lindra ryggsmärtor.

P961F: Utformad för patienter med partiell eller fullständig postural brist i sittande ställning efter nerv- eller muskelsvikt. Positioneringsprodukten P961F används för att positionera de övre extremiteterna i sittande ställning.

Produktvalet måste godkännas av hälso- och sjukvårdspersonal.

ANVÄNDARVILLKOR

Produkter med ett integrerat POLYMAILLE®/POLYMAILLE®HD-överdrag kan användas av en eller flera patienter. De kan rekonstrueras i enlighet med produktanvisningarna och rengörings- och desinfektionsanvisningarna.

Den första förebyggande åtgärden mot trycksår: kroppen bör lyftas så ofta som möjligt för att begränsa kompressionen av blodkärlen och på så sätt möjliggöra en korrekt blodcirkulation.

KONTRAINDIKATIONER

Använd inte produkten utöver det avsedda ändamålet och indikationerna. Använd inte om du är allergisk mot polyuretan. Vid eventuella problem bör du kontakta din vårdgivare. Den är inte lämpad för användning i säng.

BIVERKNINGAR

Det finns inga oönskade bieffekter. Patienten kan dock uppleva de effekter som följer av nedsänkning: eventuell (begränsad) minskning av perception och rörlighet. Ökad känsla av värme.

PRODUKTENS PRESTANDA

Upprätthåller god hållning i sittande ställning.

KLINISK NYTTA

P951D: Förbättrad patientkomfort. Bidrar till att minska ryggsmärtor och till stabilitet i bälen.

P961F: Minskar risken för skulderdislokation och bidrar till att bibehålla/stabilisera balansen i bälen.

INFORMATION TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL

Använd positioneringshjälpmedel eller tryckavlastningsprodukter för patienter med trycksår. Kontrollera att produkten är lämplig för patientens miljö. Säkerställ kontinuerlig behandling.

LAGRING, HANTERING, TRANSPORT

- Företrädesvis plant. Utsätt den inte för betydande värmekällor.
 - Den måste förvaras i skyddsväska på en torr och tempererad plats, skyddad från värme och ljus.
 - Hantera produkten försiktigt för att förhindra att överdraget skadas.
 - Transportera i en transportväska eller i dess låda.
- Följ dessa anvisningar vid all hantering/transport.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING

- Använd inte utan överdrag.
- Placera inga främmande föremål mellan patienten och utrustningen förutom kläder.
- Var försiktig så att du inte skadar överdraget. Frekvent förfall/slitage som har observerats: brännskador från cigaretter, repor från husdjur, nålhål, skärmärken från skalpeller eller vassa föremål, skador orsakade vid användning av utrustning med vassa kanter.
- Vi rekommenderar att du tillhandahåller ett extra skyddsöverdrag.
- Använd endast reservöverdrag, tillbehör eller komponenter som tillhandahålls av SYST'AM®.
- Se anvisningarna för "Rengöring och desinfektion".
- Om du ser en försämring av produkten (deformation av skummet eller läckage) eller «bottning» (att produkten trycks ihop när den används), kontakta din leverantör.
- Förvaras utom räckhåll från brandfarliga källor.
- Rapportera till din vårdgivare så snart som möjligt om något onormalt inträffar, t.ex. smärta, rodnad vid stödpunkterna eller om huden vid kontaktpunkterna vitnar.
- Alla allvarliga incidenter som inträffar och som är länkade till produkten ska anmälas till tillverkaren och till den lokala behöriga myndigheten.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material i dynan: viskoelastiskt polyuretanskum (PU).

Överdragsmaterial: POLYMAILLE®: polyuretan beläggning på jersey.

FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD

Produkterna har en livslängd på 5 år om de används i enlighet med skötsel- och underhållsanvisningarna. Livslängden kan vara längre om produkten underhålls med omsorg och kan förkortas avsevärt vid extrem eller felaktig användning. Detta utgör ingen ytterligare garanti för dessa produkter.

GARANTI

Två år mot eventuella tillverkningsfel, från det datum då kunden köpte produkten. Små brister (små revor, marmorering, ytdefekter etc.) som beror på tillverkningsprocessen påverkar inte på något sätt produktens kvalitet och effektivitet och kan inte vara ett skäl till att byta ut produkten under garantin. Garantin täcker inte missbruk av stödet, normalt slitage av produkten eller dess överdrag. I händelse av defekt, kontakta din leverantör och ge dem produktens partinummer.

SÄKERHET OCH MILJÖ

Bränn eller kasta inte i naturen. Respektera de återvinningmöjligheter som finns i ditt land. Förtär inte. 0 % C.F.C.-skum. Överensstämmer med brandstandarderna EN 597-1 och 597-2.



MD P951D



MD P961F



**Hjälp för kroppshållning
i sittande position**
BRUKSANVISNING




SYSTEM ASSISTANCE MEDICAL SAS
72 Zone d'Activité de Campagnac
47300 LEDAT - FRANCE

Tel. commercial : 05 53 40 23 50 - Fax commercial : 05 53 40 50 40
International phone + 33 553 40 50 30 - International fax + 33 553 40 58 38
www.system.com

Siret : 392 011 920 00015 - APE 3250A - FR 12 392 011 920

© SYST'AM®
2024-03
4772DV3

REF P951D1HW

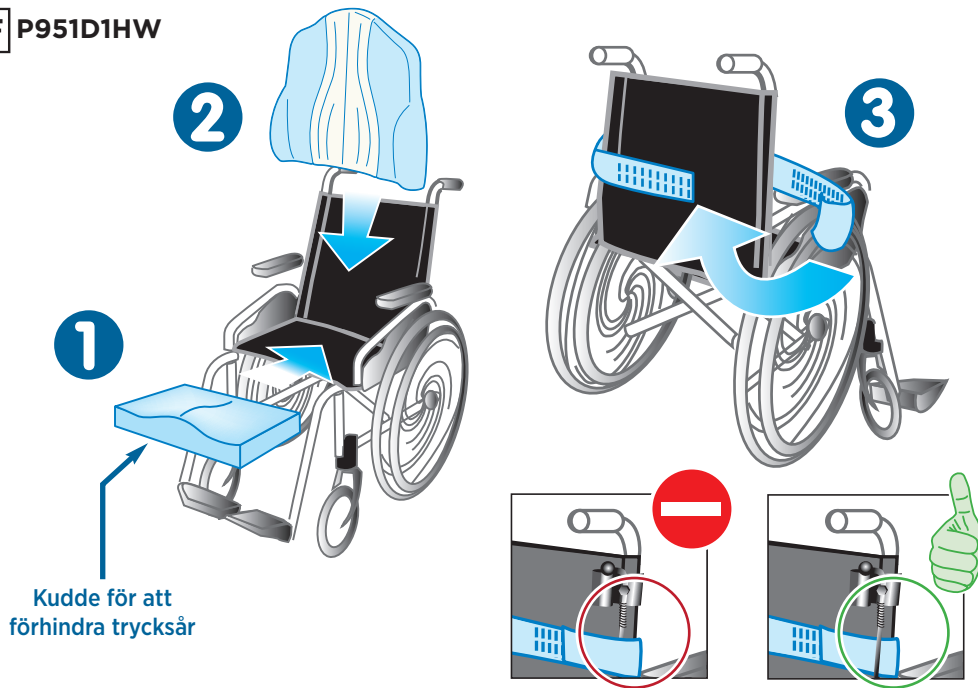

Installation:


För en bra sittposition i en stol, säkerställ att utrustningens storlek passar till stolen.

REF							REF
P951DS1HW		SMALL	44 cm / 17"	39 cm / 15"	9 cm / 3,5"	0,75 kg / 0,34 lbs	P951SHW
P951D1HW		STANDARD	49 cm / 19"	44 cm / 17"	9 cm / 3,5"	0,90 kg / 0,40 lbs	P951HW
P951DL1HW		LARGE	49 cm / 19"	50 cm / 20"	10 cm / 4"	0,95 kg / 0,43 lbs	P951LHW
P952D1HW		STANDARD	49 cm / 19"	44 cm / 17"	9 cm / 3,5"	0,70 kg / 0,31 lbs	P952HW

RULLSTOLSBREDD

REF	30 cm 12"	32 cm 12,5"	34 cm 13"	36 cm 14"	38 cm 15"	40 cm 15,5"	42 cm 16"	44 cm 17"	46 cm 18"	48 cm 19"	50 cm 19,5"
P951DS1HW	+	+++	+++	+++	++						
P951D1HW P952D1HW				+	+++	+++	+++	++			
P951DL1HW							+	+++	+++	+++	++

REF P961F1HW

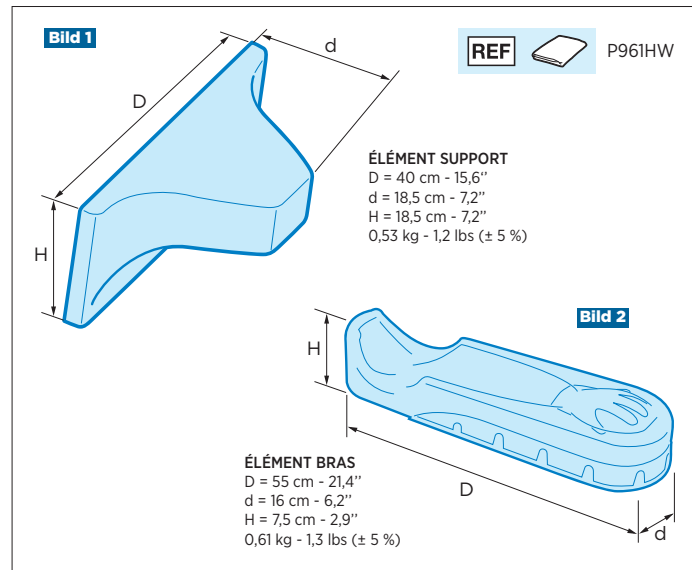

Installation:

För en bra sittposition i en stol, säkerställ att utrustningens storlek passar till stolen.

- Placera patienten i stolen. Placera **stödkilen (Bild 1)** på patientens lår med den stabila sidan (**A** jfr. **bild 3**) på utsidan mot armstödet.
- Placera sedan armdynan (**Bild 2**) på stödkilen och säkerställ att handen stödjer mot on the handtaget (**B** jfr. **Bild 3**). Fixeringssystemet på båda delarna (**C** jfr. **Bild 4**) gör det möjligt att justera positionen på ett enkelt sätt och anpassa den efter patientens morfologi och komfort (**Bild 5**).
- Håll armen i önskat läge med hjälp av remmar (**D** jfr. **Bild 3**).

